



**METASYS**  
**GREEN & CLEAN M2**

**ÚJ! JAVÍTOTT RECEPTÚRA**  
GREEN&CLEAN M2

Kettős, aktív habzó koncentrátum szívóvezetékek és amalgámleválasztó fertőtlenítéséhez és tisztításához.

- ▶ Kettős rendszer (zöld / piros) a batériumrezisztencia ellen
- ▶ Igen jó aktív habzás, kiváló tisztítóhatás
- ▶ Egyszerű kezelés és esztétikus adagolóval
- ▶ Nagymértékben környezetkímélő
- ▶ Kiváló összeférhetőség a különböző anyagokkal
- ▶ Enzimátikus termék, kiváló fehérjeoldó képességgel
- ▶ Ideális minden amalgámleválasztóhoz és víz-levegő szeparátorhoz
- ▶ VAH/DGHM (Német Higiéniai és Mikrobiológiai Társaság) felsorolásában szerepel

**HATÁSSPEKTRUM:**  
baktericid, fungicid, Tb, HBV/HIV/HCV

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
M2 zöld: alifás nitrogénvegyület, alkilamin

M2 piros: quarter ammoniumvegyület, alkilamin, guanidin vegyület

GREEN&CLEAN M2 bevezető készlet  
2 x 480 ml tasak + adagoló

RENDELÉSI SZ.: 60010001-színjelölés  
adagoló: BL-kék


GREEN&CLEAN M2 utántöltő készlet  
4 x 480 ml tasak (320 használat)

RENDELÉSI SZ.: 60010002

GREEN&CLEAN M2 utántöltő készlet 2  
2 x 480 ml tasak (160 használat)

RENDELÉSI SZ.: 60010003

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen  
Dr. med. P. Weidner, Weiterstadt

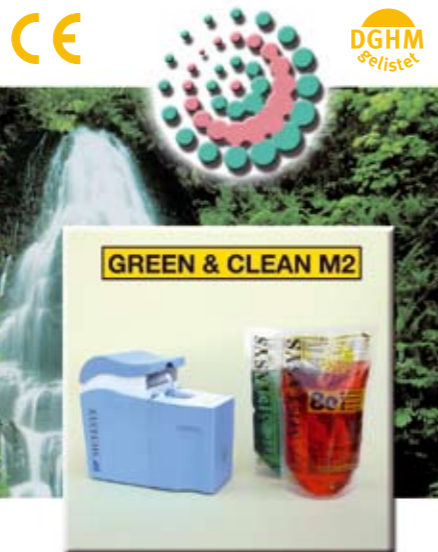

4 tasak GREEN&CLEAN M2 320 alkalomra elegendő  
Biztosítson optimális fertőtlenítést és gondozást elszívó berendezéséhez és amalgámleválasztójához.




### Megkönnyíti a fertőtlenítést:



#### Adagolás:

Nyomja meg kétszer az adagoló pumpáját. Ezzel pontosan 6 ml Green&Clean M2 anyagot juttat a keverőedénybe.

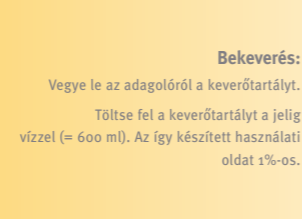


#### Bekeverés:

Vegye le az adagolóról a keverőtartályt. Töltse fel a keverőtartályt a jelig vízzel (= 600 ml). Az így készített használati oldat 1%-os.



#### Elszívás:

Tartsa a kis nyálszívót a kisebb, 1-essel jelzett nyíláshoz, míg levegőbeszívást nem hall. Ezzel optimális idő alatt 200 ml fertőtlenítőoldatot szívott fel. Ezt követően ismétlje meg a műveletet úgy, hogy az exhaustort a 2-essel jelzett, nagyobb nyíláshoz illeszti.

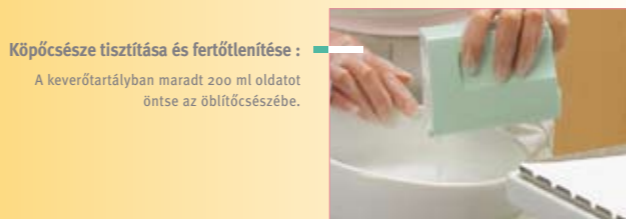

**Köpőcsésze tisztítása és fertőtlenítése :**  
A keverőtartályban maradt 200 ml oldatot öntse az öblítőcsészébe.

Az elszívó és szájbörlő berendezést naponta kétszer tisztítsa és fertőtlenítse. Sebészeti beavatkozások után még egy külön tisztítás is ajánlott! Így biztosított a nagyfokú higiénia és amalgámleválasztójának zavartalan működése.

# METASYS

# GREEN & CLEAN



## A BIZTOSÍTÉK praxisának higiéniájához

VK-Flyer GREEN&CLEAN, 18.02.2009 7 0011401 ZK-55-907/01

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

HATÁSSPEKTRUM

RENDELÉSI SZÁMOK

SAKKÉLÉNYEK





A higiénikus  
kézfertőtlenítés  
művelete:



Kézet a kézre



Öszetett tenyerek feszesen  
terpesztett ujjakkal



Tenyerek a kézháton, terpesztett  
ujjakkal



Az ujjak külső oldala (terpesztve)  
a másik tenyérre helyezve



A hüvelykujjak körkörösén  
dörzsölik a másik zárt tenyeret



Ujjhegyek körkörösén dörzsölik  
a másik tenyeret

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
baktericid, fungicid, Tb, HBV, HIV,  
HCV valamint herpes-simplex vírus I. típusa,  
Norwalk-like vírusok és rotavírus ellen

**BEHATÁSI IDŐK:**  
Higiénikus fertőtlenítés:  
3 ml GREEN&CLEAN HD anyagot 30  
másodpercig dörzsöljön szét a tenyerén.  
Sebészeti fertőtlenítés:  
10 ml GREEN&CLEAN HD anyagot 3 percig  
kenjen szét a kezein és alkarjain.

GREEN&CLEAN HD utántöltő szett 1  
1 x 5 l Kanna

RENDELÉSI SZ.: 60030063

GREEN&CLEAN HD utántöltő szett 2

6 x 1000 ml europalack

RENDELÉSI SZ.: 60030069

GREEN&CLEAN HD europalack 1000 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030161

GREEN&CLEAN HD europalack 1 x 500 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030162

GREEN&CLEAN HD europalack 6 x 500 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030070

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen  
Prof. Dr. Wille, Gießen

RENDELÉSI SZÁMOK

SZAKVÉLEMÉNYEK

1



GREEN&CLEAN HD

Bőrápoló bedörzsölő készítmény a kéz  
fertőtlenítéséhez és a sebészeti kéz- és  
alkar-fertőtlenítéshez.

- ▶ Kiváló alkohol, meggátolja a bőr kiszáradását
- ▶ Dermatológiai szakvélemények (Dermaconsult GmbH)
- ▶ VAH/DGHM és RKI jegyzék tartalmazza

RENDELÉSI SZÁMOK

SZAKVÉLEMÉNYEK

RENDELÉSI SZÁMOK

SZAKVÉLEMÉNYEK

1



GREEN & CLEAN HL

GREEN&CLEAN HL

Bőrápoló kézmosó oldat, sokoldalú  
csírátlanító hatással.

- ▶ Széles hatásspektrum
- ▶ Lúgmentes, pH-semleges
- ▶ Megvédi a bőr természetes savköpenyét
- ▶ Nem irritálja a bőrt
- ▶ Allantoinnal mint fő bőrápoló szerrel

GREEN&CLEAN HL bevezető szett

5 x 750 ml + adagoló palack

RENDELÉSI SZ.: 60030051

GREEN&CLEAN HL utántöltő szett 1

6 x 750 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030052

GREEN&CLEAN HL utántöltő szett 2

1 x 5 l kanna

RENDELÉSI SZ.: 60030053

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZÁMOK

1



GREEN & CLEAN MB

GREEN&CLEAN MB

Praktikus citromsav- és enzimalapú  
kefés tisztító a szájöblítő tál alapos  
tisztításához.

- ▶ Oldja a mész- és festéklerakódásokat
- ▶ Kiváló fehérjeoldó képesség az enzimentartalom révén
- ▶ Ideális minden amalgámválasztóhoz

GREEN&CLEAN MB bevezető szett

2 x 500 ml + 2 palack + 2 kefe

RENDELÉSI SZ.: 60020001

GREEN&CLEAN MB utántöltő szett 1

4 x 500 ml + 4 kefe

RENDELÉSI SZ.: 60020002

GREEN&CLEAN MB utántöltő szett 2

4 x 500 ml

RENDELÉSI SZ.: 60020004

GREEN&CLEAN MB pótkefék

4 kefe

RENDELÉSI SZ.: 60020008

GREEN & CLEAN WK



GREEN&CLEAN WK

METASYS WEK vízcsírátlanító  
készülékhez hidrogénperoxid alapon.

GREEN&CLEAN WK utántöltő szett 1

4 x 500 ml tasak

RENDELÉSI SZ.: 60040100

GREEN&CLEAN WK utántöltő szett 2

METASYS WEK részére Ultradent  
kezelőegységekbe

6 x 1000 ml

RENDELÉSI SZ.: 60040101

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZÁMOK

6



HYGIENESYSTEM H1

GREEN&CLEAN H1

Enzim alapú fertőtlenítő és tisztító  
koncentrátum a METASYS H1 higiéniai  
rendszerben való használatához.

GREEN&CLEAN H1 utántöltő szett

4 x 500 ml tasak

RENDELÉSI SZ.: 60010021

DENTAL XR



DENTAL XR

Egyrészes előhívó- és fixir oldatok.

- ▶ Egyszerű és gyors bekeverés
- ▶ Optimális képminőség: minden kereskedelmi röntgenfilmmel ellenőrizve
- ▶ Állandó minőségű előhívás a tartósság egész ideje alatt

A KÖVETKEZŐ ELŐHÍVÓGÉPEKHEZ:  
DÜRR AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 PRO,  
XR 24 NOVA, Phillips,  
Clarimat Super SII / III, Velopex DE 260 (4 l),  
Clarimat GX 300 (4 l), Girardelli X-20, X-24

METASYS DENTAL XR:  
2 x előhívó koncentrátum  
2 x fixáló koncentrátum  
5-5 liter használatra kész oldat  
készítéséhez

RENDELÉSI SZ.: 10110001



GREEN & CLEAN IK

GREEN&CLEAN IK

Használatra kész alkoholos fertőtlenítő spray a  
turbinák, valamint a kézi- és könyökdarabok  
spraycsatornáinak fertőtlenítésére és tisztítására.

- ▶ Biztonságos használat a rögzített adapterekkel
- ▶ egy szórópalack 300 használatra elegendő 2 sec szóródókkal
- ▶ egy univerzális adapter minden kézi- és kézi darabokhoz és saját adapter a leggyakoribb turbina típusokhoz
- ▶ fertőtlenítőszer oldat, VAH/DGHM jegyzék tartalmazza
- ▶ nem helyettesíti a gyár által ajánlott olajozást!
- ▶ Üzemi engedélyezés (W&H, Sirona)

**HATÁSSPEKTRUM:** HBV/HIV/HCV: 15 másodperc  
baktericid/fungicid: 2 perc  
tuberkulocid: 2 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ**  
Alkohol, quarter ammoniumvegyület és  
segédanyagok.

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray  
kézi- és könyökdarabokhoz

2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030182

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray

W&H turbinához 2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030183

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray

Bien Air turbinához 2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030184

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray

KaVo turbinához 2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030185

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray

Sirona turbinához 2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030186

GREEN&CLEAN IK fertőtlenítő spray

Castellini turbinához 2 x 180 ml

RENDELÉSI SZ.: 60030187

Dr. med. J. Steinmann, Bremen  
Prof. Dr. med. M. Rotter, Wien  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

HATÁSSPEKTRUM

RENDELÉSI SZÁMOK

SZAKVÉLEMÉNYEK

6





**GREEN&CLEAN ID N**

Koncentrátum műszerek, fűrók, endoszkópok és gyógyászati termékek fertőtlenítéséhez és tisztításához.

- ▶ Rendkívül nagy tisztítóhatás
- ▶ Használható rugalmas és merev, valamint hőre érzékeny és hőálló műszerekhez
- ▶ 5 liter koncentrátumból 500 liter használati oldat készíthető 1%-os alkalmazás mellett
- ▶ Meggátolja a korróziót műszerei védelmében
- ▶ Ultrahangos tisztítókádkhoz is használható
- ▶ Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen (Németország) endoszkópjának ajánlása 2005. december 19.-től
- ▶ Aldehyd- és fenolmentes
- ▶ Tartósság: 7 nap
- ▶ VAH/DGDM és ÖGHMP jegyzékben
- ▶ NTI-Kahla engedélyezés (Rotary Dental Instruments)

HATÁSSPEKTRUM:	BEHATÁSI IDŐK:
HBV/HIV/HCV:	15 perc
1 %-os oldat:	
Vakcinia-vírusok:	5 perc
1 %-os oldat:	
baktericid/fungicid/tuberkulocid:	60 perc
1 %-os oldat:	
2 %-os oldat:	15 perc
7,5 %-os oldat:	5 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
Quarter ammoniumvegyület, alkilamin, korrózióvédő inhibitorok

**GREEN&CLEAN ID N**  
4 x 500ml + mérőedény 100 ml  
RENDELÉSI SZ.: 60030033

**GREEN&CLEAN ID N**  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030034

mérőedény 100 ml  
RENDELÉSI SZ.: 40200003

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

HATÁSSPEKTRUM

RENDELÉSI SZÁMOK

SAKVALÉMIÉNYEK



**METASYS FERTŐTLENÍTŐKÁD**, nagy  
4 liter térfogat, fedél és csepegtető betét.

METASYS fertőtlenítőkád, nagy  
RENDELÉSI SZ.: 40200008



**METASYS FERTŐTLENÍTŐKÁD**, kisméretű  
1,25l térfogat, fedél és csepegtető betét.

METASYS fertőtlenítőkád, kisméretű  
RENDELÉSI SZ.: 40200015



**METASYS FŰRÓFERTŐTLENÍTŐ BOX**  
200 ml térfogat, fedél és csepegtető betét.

METASYS fűrófertőtlenítő box  
RENDELÉSI SZ.: 40200013



**METASYS VISSZASZÁMLÁLÓS JELZŐÓRA**  
RENDELÉSI SZ.: 90110012

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZ.



**GREEN & CLEAN AD**

**GREEN&CLEAN AD**

Használatra kész oldat mindenfajta formázóanyag és protétikus munkák fertőtlenítéséhez és tisztításához.

- Formastabilitási tanúsítvány (Fresenius Intézet)
- ▶ Használható algináthoz, szilikonhoz, poliéterhez, hidrokolloidhoz és formázó kanálhoz
- ▶ A formázóanyag minőségére és méretviszonyaira nem gyakorol hatást
- ▶ Kiváló tisztítóhatás
- ▶ Nagy anyagtűrő képesség
- ▶ Formaldehyd- és fenolmentes
- ▶ Tartósság: 7 nap
- ▶ Listázott VAH/DGDM fertőtlenítő oldat

HATÁSSPEKTRUM:	BEHATÁSI IDŐK:
HBV/HIV/HCV:	1 perc
baktericid/ tuberkulocid:	5 perc
fungicid:	5 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
Quarter ammoniumvegyületek, Alkilamin, tenszidek

**GREEN&CLEAN AD**  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030074

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen  
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz

HATÁSSPEKTRUM

RENDELÉSI SZ.

SAKVALÉMIÉNYEK

RENDELÉSI SZ.

**GREEN & CLEAN BR**

**GREEN&CLEAN BR**

Használatra kész hidrogénperoxid alapú oldat, mellyel eltávolítható a fogászati kezelőegységek tömlőrendszerében meglepedett biofilm. Csak METASYS biofilmtisztító készülékkel együtt használendő.

**GREEN&CLEAN BR**  
2 x 1000 ml palack  
RENDELÉSI SZ.: 60040300

RENDELÉSI SZ.



**GREEN & CLEAN HW**

**GREEN&CLEAN HW**

Ápoló hatású kézmosó oldat, természetes bőrápoló adalékokkal.

- ▶ pH-érték 5,6, illetve a bőr természetes védő savköpenyéhez
- ▶ Igen alkalmas az érzékeny bőrhöz
- ▶ A hidratálószer meggátolja a bőr kiszáradását a gyakori kézmosásánál is
- ▶ Természetes bőrápoló szer cukorrépa kivonattal

**GREEN&CLEAN HW** bevezető szett  
5 x 750 ml + adagoló palack  
RENDELÉSI SZ.: 60030041

**GREEN&CLEAN HW** utántöltő szett 1  
6 x 750 ml  
RENDELÉSI SZ.: 60030042

**GREEN&CLEAN HW** utántöltő szett 2  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030043

RENDELÉSI SZÁMOK

RENDELÉSI SZ.

**GREEN & CLEAN HC**

**GREEN&CLEAN HC**

A mandulaolaj alapú kézápoló krém gyorsan beszívódik és értékes hatóanyagokkal gazdagítja a bőrt és a körmököt.

- ▶ E és B vitaminnal dúsítva
- ▶ Alkalmas az érzékeny bőrre

**GREEN&CLEAN HC** kézápoló krém  
6 x 100 ml Tubus  
RENDELÉSI SZ.: 60030120  
1 x 100 ml Tubus  
RENDELÉSI SZ.: 60030122

RENDELÉSI SZ.



**A KÉZ HIGIÉNIÁJA A FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉNEK LEGFONTOSABB FELTÉTELE!**

A helyesen végzett higiéniai kézápolás segít a kéz problémáinak megelőzésében.  
Ezért fontos: Mosás helyett fertőtlenítés!  
(szennyeződés, kosz kivételével)

A kezek egészséges bőrfelülete kiegészíti a fertőzés elleni védelmet, mert megnehezíti a kórokozók behatolását!

**TIPPEK A KÉZ HATÉKONY FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ:**

- Ügyeljen rá, hogy körmei lakkozatlanok és rövidek legyenek
- Ne viseljen ékszert
- Kellő mennyiségű alkoholos kézfertőtlenítőt jól dörzsöljön be a kéz bemélyedő részeibe (a felületet legalább 30 másodpercig, sebészeti kézfertőtlenítéskor 3-5 percig tartsa nedvesen)

**HIGIÉNIKUS KÉZFERTŐTLENÍTÉS**

- munkahely előkészítése előtt a kezelőtérben
- munkahely karbantartása után
- a kesztyű felhúzása előtt, és lehúzása után is
- nem sebészeti kezelés előtti és utáni használatra

**SEBÉSZETI KÉZFERTŐTLENÍTÉS**

- nagyobb sebészeti beavatkozások előtt



Tippek a helyes adagoláshoz:



mindig hideg vizet használjon!



vegyen fel védőkesztyűt!



Pontosan a gyári előírások szerint adagoljon!



Tartsa be a behatási időket! Legyen figyelemmel az eltarthatóságra!

A GREEN&CLEAN RDN felületi fertőtlenítőszer helyes keverése:

A táblázatból leolvasható, hogy adott koncentráció eléréséhez és adott mennyiségű vízhez mennyi fertőtlenítőszer szükséges adagolni!

PL.: 8 liter 25%-os oldat: 20 ml koncentrátumot adagoljon!

	0,25 %	0,5 %	1,5 %
1 Lt.	2,5 ml	5,0 ml	15,0 ml
2 Lt.	5,0 ml	10,0 ml	30,0 ml
3 Lt.	7,5 ml	15,0 ml	45,0 ml
4 Lt.	10,0 ml	20,0 ml	60,0 ml
5 Lt.	12,5 ml	25,0 ml	75,0 ml
6 Lt.	15,0 ml	30,0 ml	90,0 ml
7 Lt.	17,5 ml	35,0 ml	105,0 ml
8 Lt.	20,0 ml	40,0 ml	120,0 ml
9 Lt.	22,5 ml	45,0 ml	135,0 ml
10 Lt.	25,0 ml	50,0 ml	150,0 ml

3



#### GREEN&CLEAN SD

Alkoholtartalmú felületi fertőtlenítőszer, orvosi termékek felületeinek gyors fertőtlenítésére (pl. kézi és sarokelemek, fogók és függő asztalok).

- ▶ A remanencia hatás meggátolja a szálló csírák visszatelepülését
- ▶ Formaldehid mentes
- ▶ VAH/DGHM és ÖGHMP jegyzékben

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
HBV/HIV/HCV:  
baktericid, fungicid:  
tuberkulocid:

**BEHATÁSI IDŐK:**  
30 másodperc  
1 perc  
5 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
alkohol, quarter ammónium vegyületek és glikoxal.

RENDELÉSI SZÁMOK

GREEN&CLEAN SD bevezető szett  
5 x 750 ml tasak + szórópalack  
RENDELÉSI SZ.: 60030001

GREEN&CLEAN SD utántöltő szett 1  
6 x 750 ml tasak  
RENDELÉSI SZ.: 60030002

GREEN&CLEAN SD utántöltő szett 2  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030003

SD szórópalack  
RENDELÉSI SZ.: 40200005

csak az 5l-es kannához  
RENDELÉSI SZ.: 40200004

SZAKÉLÉNYEK

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen



#### GREEN&CLEAN SK / MK

SK: ápoló hatású fertőtlenítő- és tisztítóhab / MK: extra nagy alkoholmentes fertőtlenítő kendők orvosi termékek felületeinek gyors fertőtlenítésére (pl. a fogorvosi egység bőr- és műbőrhzataihoz).

- ▶ Használatra kész fertőtlenítő oldat
- ▶ Különösen alkalmas alkoholra érzékeny felületekre
- ▶ A remanencia hatás meggátolja a szálló csírák visszatelepülését
- ▶ Alkoholmentes
- ▶ Aldehyd-, fenol- és foszfátmentes
- ▶ Fertőtlenítő oldat, VAH/DGHM jegyzékben

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
HBV/HIV/HCV:  
baktericid/fungicid

**BEHATÁSI IDŐK:**  
1 perc  
1 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
Quarter ammonium vegyület

RENDELÉSI SZÁMOK

GREEN&CLEAN SK Start  
1 x 750 ml palack habképző sprayfejjel  
RENDELÉSI SZ.: 60030110

GREEN&CLEAN SK bevezető szett  
6 x 750 ml szórópalack, 2 x habképző  
RENDELÉSI SZ.: 60030111

GREEN&CLEAN SK utántöltő szett  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030112

GREEN&CLEAN MK Start  
1 adagolóedény + 70 kendő  
+ 750 ml palack SK  
RENDELÉSI SZ.: 60030130

GREEN&CLEAN MK utántöltő szett  
1 adagolóedény + 490 kendő  
+ 5 l kanna SK  
RENDELÉSI SZ.: 60030131

SZAKÉLÉNYEK

Prof. Dr. med. G. Frösner, München  
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz  
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

## FELÜLETI FERTŐTLENÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS



#### GREEN&CLEAN WD

Alkoholtartalmú fertőtlenítő kendők; orvosi termékek kis felületeinek gyors fertőtlenítésére (pl. kézi és sarokelemek).

- ▶ A remanencia hatás meggátolja a szálló csírák visszatelepülését
- ▶ Formaldehid mentes
- ▶ Fertőtlenítő oldat, VAH/DGHM és ÖGHMP jegyzékben

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
HBV/HIV/HCV:  
baktericid/fungicid:  
tuberkulocid:

**BEHATÁSI IDŐK:**  
30 másodperc  
1 perc  
5 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
alkohol, quarter ammónium vegyület és glikoxal

RENDELÉSI SZÁMOK


GREEN&CLEAN WD bevezető szett  
1 x doboz 150 törlőkendővel  
+ 3 x 120 kendővel  
RENDELÉSI SZ.: 60030011

GREEN&CLEAN WD utántöltő szett  
6 x 120 kendővel  
RENDELÉSI SZ.: 60030012

GREEN&CLEAN WD Start  
1 x doboz 150 törlőkendővel  
RENDELÉSI SZ.: 40200007

SZAKÉLÉNYEK

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

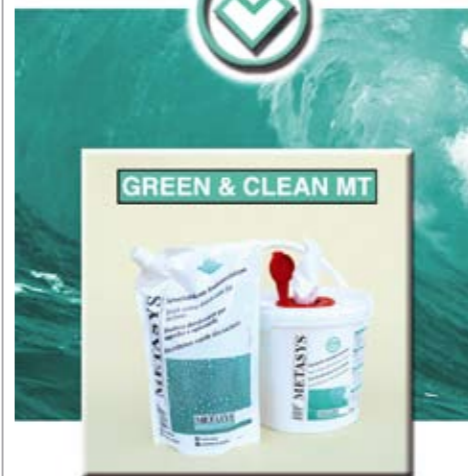

#### GREEN&CLEAN MT

Extra nagy alkoholmentes fertőtlenítő kendők; orvosi termékek nagy felületeinek gyors fertőtlenítésére (pl. kézi és sarokelemek, fogók és függő asztalok).

- ▶ A remanencia hatás meggátolja a szálló csírák visszatelepülését
- ▶ Formaldehid mentes
- ▶ Fertőtlenítő oldat, VAH/DGHM és ÖGHMP jegyzékben

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
HBV/HIV/HCV:  
baktericid/fungicid:  
tuberkulocid:

**BEHATÁSI IDŐK:**  
30 másodperc  
1 perc  
5 perc

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
alkohol, quarter ammónium vegyületek és glikoxal

RENDELÉSI SZÁMOK

GREEN&CLEAN MT Start  
1 x adagoló vödör 70 kendővel  
+ 1 x 750 ml SD tasakkal  
RENDELÉSI SZ.: 60030091

GREEN&CLEAN MT - bevezető szett 1  
1 x adagoló vödör 70 kendővel  
+ 5 x 70 kendő  
+ 6 x 750 ml SD tasakkal  
RENDELÉSI SZ.: 60030093

GREEN&CLEAN MT - bevezető szett 2  
1 x adagoló vödör 70 kendővel  
+ 6 x 70 kendővel  
+ 5 l SD kannával  
RENDELÉSI SZ.: 60030094

GREEN&CLEAN MT - utántöltő szett 1  
2 tekercs 70 kendővel  
RENDELÉSI SZ.: 60030095

GREEN&CLEAN MT - utántöltő szett 2  
1 x adagolóedény 70 kendővel  
+ 5 x 70 kendővel  
RENDELÉSI SZ.: 60030092

SZAKÉLÉNYEK

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

4



#### GREEN&CLEAN RDN

Orvosi termékek felületeinek fertőtlenítésére szolgáló koncentrátum (pl. fogók, a fogorvosi egység alkoholérzékeny felületei).

- ▶ Kiváló összeférhetőség a különböző anyagokkal
- ▶ Akril- és plexiüveghez alkalmas
- ▶ 5 liter koncentrátumból 0.25%-os koncentrátum mellett 2000 liter folyadék készíthető
- ▶ Aldehydmentes
- ▶ VAH/DGHM és ÖGHMP jegyzékben

HATÁSSPEKTRUM

**HATÁSSPEKTRUM:**  
HBV/HIV/HCV:

**BEHATÁSI IDŐK:**

0,25%-os oldat: 60 perc  
0,5%-os oldat: 30 perc  
baktericid/fungicid:  
0,25%-os oldat: 4 óra  
0,5%-os oldat: 1 óra  
1,5%-os oldat: 30 perc  
2%-os oldat: 15 perc  
tuberkulocid:  
2%-os oldat: 30 perc  
4%-os oldat: 15 perc

RENDELÉSI SZÁMOK

**MODERN HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ:**  
Quarter ammoniumvegyületek és alkilamin

GREEN&CLEAN RDN  
4 x 500 ml + mérőedény 100 ml  
RENDELÉSI SZ.: 60030023

GREEN&CLEAN RDN  
1 x 5 l kanna  
RENDELÉSI SZ.: 60030028

RD N mérőedény 100 ml  
RENDELÉSI SZ.: 40200016

SZAKÉLÉNYEK

Prof. Dr. med. G. Frösner, München  
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz  
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

FELÜLETEK