

**Aqua Ionofil Plus**  
**A DIN EN 29917 szerint**  
**Használati utasítás**  
**A termék leírása:**

Az **Aqua Ionofil Plus** a zománchoz és a dentinhez kémiaileg kötő, röntgenárnyékot adó, vízzel keverhető üvegeionomer tömőcement. Az **Aqua Ionofil Plus** A1, A2 és A3, a zománcéhoz hasonló transzlucenciával rendelkező színárnyalatokban kapható.

**Javallat:**

- Tejfog restaurációk (különösen I. osztály)
- V-alakú nyaki kopások és zománc, vagy gyökér eróziók ellátása beleértve az V. osztályú töméseket is.
- szuvas léziók ellátása
- III. osztályú tömések és kisebb I. osztályú tömések (beleértve a kiterjesztett barázdázást), valamint csonkfelépítés, alábélelés

**Használat módja:**

Az **Aqua Ionofil Plus** adhéziója a zománchoz és a dentinhez megakadályozza a marginális szivárgást és jó retenciót hoz létre.

Az alámenős részek kialakítása tovább növeli a tömés stabilitását. A tömések rétegvastagsága 1 mm-nél ne legyen vékonyabb.

Tisztítsa meg a kavitást (pl. 3%-os hidrogén-peroxiddal), alaposan öblítse le vízzel és szárítsa meg. Abban az esetben, ha a fennmaradó dentin vastagsága több mint 1 - 1,5 mm nincs szükség további alábélelésre. Ha az épen maradt dentin túl vékony, a pulpaközeli területeket fedje be kalcium-hidroxiddal.

Figyelem ! Az **Aqua Ionofil Plus** csak vízzel keverendő.

**Használat előtt alaposan rázza össze a port.** Hagyja, hogy az **Aqua Ionofil Plus** alkalmazás előtt elérje a szobahőmérsékletet (legfeljebb 23 °C). Magasabb hőmérséklet esetén hűtött üveglap használata ajánlott.

Helyezze az **Aqua Ionofil Plus** port egy üveglapra, vagy megfelelő keverőlapra és keverje össze a port kis adagokban a vízhez .

Adjon 1 csepp folyadékot 1 mérő kanál porhoz (keverési arány por : víz = 5,4 - 6,3 g : 1).

Amikor a vizet adagolja, tartsa a cseppentős üveget teljesen függőleges helyzetben, ügyelve arra, hogy a fém kanül

kb. 2 - 3 mm-rel legyen a teteje felett. Ne használja fel azt a cseppet, amely az üveg döntése közben cseppent el.

A keveréshez erős műanyag spatulát vagy más kopásálló spatulát használjon.

Keverési idő  
30 - 40 másodperc

Feldolgozási idő  
2,5 - 3,5 perc

Kötési idő  
5 - 6 perc

A keverési idő kb. 30 - 40 másodperc, de nem haladhatja meg az 1 percet.

A feldolgozhatósági idő a keverés végétől számítva kb. 2 - 3 perc (szobahőmérsékleten). Az **Aqua Ionofil Plus** kötési ideje mintegy 2 - 3 perc a tömés kavitásba helyezésétől számítva.

A tömés applikálása alatt a kavitást szárazon kell tartani.

Az V. osztályú üregeknek legalább 1 mm mélynek kell lenniük. Kerülje az érdes széleket. Kétség esetén, a hagyományos módon preparáljon.

A kötési fázis alatt, különösen az applikációt követően az üvegeionomer cementek érzékenyek a nedvességre (légzés, nyál). Ezért ha lehetséges, azonnal fedje le a tömést egy csíkkal, matricával, vagy védőlakkal (lásd a Final Varnish LC használati utasítását).

Az **Aqua Ionofil Plus** megkötése után, legkorábban az applikálást követő 4 - 6 perc múlva (a keverési hőmérséklettől és a keverési aránytól függően) a felesleges anyag éles eszközzel eltávolítható.

A finírozás ultra - finomszemcsés gyémántcsiszolóval vagy flexibilis korongokkal elvégezhető. Ezután fedje be ismét védőlakkal. A legjobb eredményt kb. 24 órával a tömés elkészítése után elvégzett végső polírozással érhető el.

**Óvintézkedések :**

A pulpairritáció elkerülése érdekében a pulpaközeli területen (kevesebb, mint 1 - 1,5 mm) alkalmazzon pulpavédelmet. Használat után jól zárja le a port és a folyadékot annak érdekében, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását és az anyag szilárdságának csökkenését.

Kerülje a nyálkahártyával és a szemmel történő érintkezését. Az **Aqua Ionofil Plus** fluor-szilikát üveget, poliakrilsavat tartalmaz.

Az **Aqua Ionofil Plus** nem alkalmazható a bármely összetevőjével szembeni ismert hiperszenzitivitás (allergia) esetén. A teljes tapadás megtartása érdekében ne használjon izolátorokat a dentinhez (kivéve pulpavédelem).

**Tárolás :**

Szobahőmérsékleten (4 °C - 23 °C) hőmérsékleten kell tárolni.

Ne használja fel a lejáratí idő után.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.