

## Calcimol LC

### Használati utasítás

A **Calcimol LC** fényre kötő, röntgenárnyékot adó, egykomponensű kalcium-hidroxid paszta.

### Javallatok:

- indirekt pulpasapkázásra
- tömőanyagok alábélelésre
- teljes savazásos technika esetén fogvédelemre

### Felhasználás:

Használat közben ügyeljen arra, hogy a fog felülete teljesen száraz legyen, kerülje a nyállal történő érintkezést. A preparáció megfelel az adhezív helyreállítási technika szabályainak. Használjunk hígán folyó kalcium- hidroxidot a Calcimol LC helyett közvetlenül a pulpa közelében.

A széli záródási hibák és a baktériumok infiltrációjának megelőzésére tartós izolálás ajánlott.

A **Calcimol LC** fecskendőből közvetlenül applikálható.

Annak érdekében, hogy megőrizzük a non-dripping fecskendő funkcióját, ne húzzuk vissza a dugattyút a használat alatt és után sem.

Tubusból adagolja a kívánt mennyiséget keverőlapra és a megfelelő műszerrel applikálja. Ha az alábélelés 1 mm-nél vastagabb, polimerizáljon rétegenként.

A **Calcimol LC**-t halogén lámpával polimerizálható. Tartsa a lámpát a felszínhez közel (1 - 2 mm), és legalább 20 másodpercig világítsa. Ha a távolság nagyobb, növelje a kötési időt. Óvatosan távolítsa el a felesleget fúróval és fejezze be a fogtömést a gyártó utasításai szerint.

### Javallatok:

A **Calcimol LC** hozzátapadhat bizonyos anyagokhoz, pl.: korona- és hídanyagokhoz, metakrilát tartalmú ideiglenes anyagokhoz, lenyomatanyagokhoz (pl. poliéter), ami az alábélelés elvesztéséhez vezethet. Ezekben az esetekben ajánlott valamilyen izoláló réteget az alábélelésre helyezni. A végleges helyreállítás előtt távolítsa el az izoláló anyagot.

A **Calcimol LC** konzisztenciája nem teszi lehetővé a felesleg szondával történő eltávolítását, mert ez az alábélelés teljes eltávolításához is vezethet (használgon forgó műszert).

A **Calcimol LC** tubusos alkalmazása során kerülje a közvetlen fényt (operációs lámpa, napfény) és azonnal használja fel az anyagot.

A **Calcimol LC** kalcium-hidroxidot, TEGDMA-t, BHT-t, UDMA-t és amint tartalmaz. A **Calcimol LC** nem használható fel a bármely ezen összetevőjével szembeni ismert hiperérzékenység (allergia) esetén.

Eugenol és más anyagok (pl. timol) gátolhatják a polimerizációt, ezért kerülje az ezekkel az anyagokkal való érintkezést.

Túl rövid megvilágítási idő vagy elégtelen fényintenzitás az anyag nem tökéletes megkötéséhez vezethet, ezért rendszeresen ellenőrizze a halogén lámpát.

A fecskendő alkalmazás esetén használat után fertőtlenítse a fecskendőt.

Tarolás:

Tárolja 4 °C és 23 °C közötti hőmérsékleten. Védje a fénytől és nedvességtől. Kérjük, hogy amíg használatba nem veszi a fecskendő, tartsa a zárt alumínium tasakban. A tasak felnyitása után az anyagot 6 hónapon belül fel kell használni, de minden esetben még a lejárat napja előtt. Tartsa meg az eredeti kupakot a fecskendő lezárásához és zárja le szorosan az egyes alkalmazások között.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.