

## Caries Marker

### Használati utasítás

#### Termékleírás:

A **Caries Marker** színes (sav piros) indikátort tartalmaz a fertőzött, szuvas dentin megjelölésére.

A **Caries Marker** a szuvas területek vizuális ellenőrzését teszi lehetővé. Az egészséges, nem fertőzött, remineralizációra képes dentint nem festi meg pirosra, így támogatja a kíméletes exkaválást. Amennyiben lehetséges, a nem fertőzött (meg nem festett) dentint meg kell őrizni.

#### Javallat:

A **Caries Marker** a kárieszes foganyag megfestésére szolgál:

- A szuvas területek eltávolítása után fennmaradó látható fogszuvasodás feltárása.
- A szuvas és az egészséges dentin határának pontos megállapítása, különös tekintettel a színében eltérő szekunder dentinre.
- A szuvas foganyag teljes eltávolításának ellenőrzése
- A nehezen látható szuvas területek felismerése
- A szuvas területek bizonyítása a beteg számára
- Képzési és oktatási célokra (kihúzott fogakon)
- Elmosódott gyökércsatorna felderítése
- Tömések és a tömés szélek mikro-repedéseinek felderítése

#### Alkalmazás:

Először távolítsa el a felpuhult és az egyértelműen elszíneződött dentint. Nedvesítse meg a kavitást **Caries Marker**-rel és hagyja hatni 5-10 másodpercig (nem tovább!), majd öblítse le vízszaggárral. A legjobb eredményt, a **Caries Marker Pele Tim** habpellel történő applikálása biztosítja.

A szuvas dentin élénkpiros színűre változik.

Távolítsa el a teljesen megfestett dentin területeket, ügyelve az egészséges dentin rész megőrzésére. Ismétlje meg az alkalmazást addig, amíg további dentin már nem színeződik el.

A plakk és a visszamaradó zománc káriesz szintén pirosra festődik meg, ezeket szintén el kell távolítani.

#### Tanácsok és óvintézkedések:

Az elszíneződés intenzitása fokozható a kavitás enyhe szárításával.

Az alkalmazás nem haladhatja meg a 10 másodpercet. Távolítsa el az összes festék maradványt vízzel való öblítéssel. Ellenkező esetben fennáll a nem szuvas dentin megfestődésének és eltávolításának a veszélye.

Ne használja a pulpa közvetlen közelében, hogy elkerülhető legyen a **Caries Marker** vérrel történő összetévesztése.

Kerülni kell a bőrrel és ruházattal való érintkezést (elszíneződés megelőzése).

A szennyezett ruha hígított ecettel tisztítható (miután ellenőrizte a színtabilitást).

A **Caries Marker** propilén glikolt tartalmaz. Túlérzékeny pácienseknél allergiás reakció vagy irritáció tapasztalható, ha a hígítatlan **Caries Marker** a bőrrel vagy nyálkahártyával érintkezik.

A **Caries Marker** nem alkalmazható a bármely összetevőjével szembeni ismert hiperszenzitivitás (allergia) esetén.

#### Tárolás:

Tárolja 4 °C és 23 °C közötti hőmérsékleten. Ne használja fel a lejáratási idő után.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk

minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.