

VOCO

Fissurit FX

EN 26874 megfelelően Használati utasítás

A **Fissurit FX** magas töltőanyag és fluorid tartalmú, fehér, fényre kötő barázdazáró.

Indikációs terület:

- gödröcskék, barázdák és kis üregek tömése, barázdazárása
- sérült zománcfelszínek zárása
- caries predilekciós helyek fedése fogszabályozó kezelés közben, vagy fogszabályozók rögzítése
- kompozit és amalgám tömések kis defektusainak helyreállítása
- cement vagy más tömések felületvédelme
- carieses laesiok ideiglenes zárása
- tejfogak barázdazárása

Felhasználás:

A barázdazárást a fog előtörését követően a lehető leghamarabb el kell végezni. A fogat először fluorid mentes tisztító pasztával és forgó kefével alaposan meg kell tisztítani, majd lemosni vízzel és szárítani. Caries incipiens esetén, ha szükséges a barázda finomszemcsés gyémántfűrővel feltárható.

Savazás:

Használja a Vococid savazó zselét (kék színű) és egyszerhasználatos rövid szálú ecsetet. Kondicionálja a zománcfelszínt 15 - 30 másodpercig, majd alaposan mossa le a savat és szárítsa le a fogfelszínt. A savazott zománc mattfehér.

Lásd: Vococid használati utasítás.

Applikáció:

Távolítsa el a védőkupakot és csavarjon egy kanült a Fissurit FX fecskendőre. Tartsa függőlegesen a fecskendőt és nyomja addig, amíg barázdazáró anyag megjelenik. A Fissurit FX a fecskendő enyhe, közepes nyomásával adagolható.

Applikálja a Fissurit FX-et a kívánt barázdákba, majd hagyja szétfolyni a barázdában 15 - 20 másodpercig.

Szonda segítségével távolítsa el az esetleges légbuborékokat.

Fontos: Annak érdekében, hogy megőrizzük a non-dripping fecskendő funkcióját, **ne** szívjuk vissza a dugattyút a használat során, valamint után.

Polimerizáció:

Polimerizálja a Fissurit FX barázdazárót 20 - 30 másodpercig majd ellenőrizze. Halogén lámpáknál a fény kibocsátás legyen legalább 500 mW/cm², LED lámpánál pedig 300 mW/cm². A hiányos helyekre újra helyezzen anyagot. Óvatosan távolítsa el a felesleges barázdazárót finomszemcsés gyémánttal, majd gumival polírozza, ha szükséges. Ellenőrizze a fogak zárodását! Végül, fluoridos lakkal kezelje a kezelt és a szomszédos fogakat.

Tárolás:

Használat után távolítsa el a kanült és zárja vissza a Fissurit FX fecskendőt, vagy tubust. Tárolja szobahőmérsékleten (4 C - 23 C), fénytől

védett helyen. Ne használja lejárta után.

Indikációk és óvintézkedések:

A megfelelő izolálás hiánya a barázdázó anyag korai elvesztését vonhatja maga után. Ezekben az esetekben inkább fluoridlakk vagy üvegeionomer cement használata javasolt, amíg a tökéletes barázdázás el nem végezhető.

Amennyiben a savazott zománcot a kezelés közben nyál éri, a Fissurit FX tapadása csökken. Ebben az esetben tisztítsa le a fog felszínét és savazzon újra 10 - 20 másodpercig, ezt követően vízzel mossa le, majd szárítsa a fogfelszínt.

A barázdázó anyag tapadása bond használatával tovább növelhető. Helyezzük az anyagot egy rövid időre az operációs lámpa alá, máskülönben elkezdődik a polimerizáció.

Barázdázás után távolítsa el a felesleges anyagot.

A Fissurit FX Bis-GMA-t, TEDMÁt, diuretán metakrilátot és BHT-t tartalmaz, ezekre az anyagokra érzékeny betegeknél ne használja.

Kerülje az anyagnak a nyálkahártyával való érintkezését.

Ne használjon fenol tartalmú tisztító és szárító szereket (eugenol, thymol), mert ezek gátolják a tökéletes polimerizációt.

Amennyiben nincs szükség vagy mód a tömés teljes cseréjére, a tömés melletti másodlagos fogszuvasodás helyreállítható a barázdázó anyaggal. Ilyenkor távolítsa el a szuvas területet a lehető legkevesebb foganyag feláldozásával, savazza a zománcfelszínt, majd használja a barázdázó anyagot.

Fogszabályozó kezelések esetén a csökkent szájhigiéné miatt a kevésbé tisztítható fogfelszínnek védelmére javasolt a barázdázó anyagok használata. Fluoridálás minden esetben szükséges a kariesz kialakulásának megelőzésére.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.