

## **GC Fuji PLUS CONDITIONER**

### **FOGKONDITIONÁLÓ ANYAG**

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

### **AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A GC Fuji PLUS CONDITIONER egy fogfelszín-kondicionáló anyag, mely kifejezetten a GC Fuji PLUS üvegeionomer ragasztócementtel történő alkalmazáshoz lett kifejlesztve. Az anyag tökéletesíti a kötést a GC Fuji PLUS és a fog szerkezete között.

### **ELLENJAVALLATOK**

A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót tapasztal, függesse fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

### **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

1. A preparációt követően egy vattagombóc vagy szivacs segítségével vigyen a rögzítési felszínre GC Fuji PLUS CONDITIONER-t 20 másodpercre.
2. Alaposan öblítse le vízzel. **NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA.**
3. Végezze el a ragasztást a GC Fuji PLUS használati útmutatójának megfelelően.
4. Használat után az üveget azonnal zárja vissza.

### **TÁROLÁS**

4-25°C (39,2-77,0°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.

(Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év)

### **KISZERELÉS**

Flakon 7g (6,5mL)

### **FIGYELMEZTETÉS**

1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.
2. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
3. A GC Fuji PLUS CONDITIONER 2% vas-kloridot tartalmaz. Használata nem javasolt Epinephrine tartalmú anyagok alkalmazásakor, melyek reakcióba lépnek a vassal és elszínezhetik a nyálkahártyát.

Utoljára módosítva : 05/2008