

G-COAT PLUS

NANOTÖLTÉSŰ, ÖNRAGASZTÓ, FÉNYRE KEMÉNYEDŐ VÉDŐLAKK
Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Üvegionomer, direkt/indirekt kompozit és provizionális helyreállítások felületének lezárására és megóvása
2. A fogszerkezet és a helyreállítás közötti adhezív felület lezárása és megóvása

ELLENJAVALLATOK

A termék egyes személyeken ritkán érzékenységi reakciót válthat ki. Amennyiben bármi hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT

Ne használja az anyagot érzéstelenítőkkel vagy eugenol tartalmú anyagokkal együtt, mert azok gátolhatják a G-COAT PLUS megfelelő kötését vagy megszilárdulását.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés

Új készítésű helyreállítás esetén:

- 1) Finírozza a helyreállítást szuperfinom gyémántfűrővel. A felszínt a gyártó utasításai szerint is polírozhatja.
 - 2) Mossa le a keletkezett port vízzel. Gyengéd olajmentes légárammal szárítsa meg.
- Megjegyzés:

A bevonandó felületnek száraznak kell tünnie.

Meglévő helyreállítás előkészítése:

- 1) Érdesítse a bevonandó felületet szuperfinom gyémántfűrővel.
 - 2) Mossa le a keletkezett port vízzel. Gyengéd olajmentes légárammal szárítsa meg.
- Megjegyzés: A bevonandó felületnek száraznak kell tünnie.

A határterületek előkészítése:

A preparálatlan zománcot 35-40%-os foszforsavval kezelje a gyártó utasításai szerint. Öblítse le, majd szárítsa meg olajmentes légárammal.

Megjegyzés:

A bevonandó felületnek száraznak kell tünnie.

Alkalmazás

1. Cseppentsen néhány cseppet egy eldobható adagolóedénybe. Használat után azonnal helyezze vissza a kupakot.
 2. AZONNAL (a kicseppentés után 1 percen belül) hordja fel a felületre egy mikro-tip applikátor segítségével. Győződjön meg róla, hogy az eldobható mikro-tip applikátor szilárdan rögzítve van az applikátor tartón. **NE SZÁRÍTSA LE**
- Megjegyzés:

Amennyiben a bevont felület vízzel, vérrel vagy nyállal szennyeződné a fénykezelés előtt, mossa le és szárítsa meg a felületet, majd ismétlje meg a lakkozási folyamatot.

Fénykezelés

AZONNAL fénykezeljen minden bevont felületet látható fényt kibocsátó fénykezelő készülékkel. (>500mW/cm²: halogén, GC G-Light, LED) 20 másodpercig.

Megjegyzés:

- 1) A fényforrást a lehető legközelebb tegye a bevont felülethez.
- 2) Amennyiben a felszín ragacsos vagy sárgás, ismétlje meg a fénykezelést.
- 3) A fénykezelés ideje alatt használjon védőszemüveget vagy más, szemet védő felszerelést.

TÁROLÁS

Amennyiben hosszabb ideig nem használja, tárolja hűtőszekrényben. Egyéb esetben tárolja szobahőmérsékleten (4-25°C) (39,2-77,0°F).

Felhasználható: A gyártástól számított 2 évig.

KISZERELÉS

G-COAT PLUS 4ml (1), Eldobható adagolóedény (20), Mikro-tip applikátor (50), Applikátortartó

FIGYELMEZTETÉS

1. A G-COAT PLUS gyúlékony anyag. Ne használja nyílt láng közelében. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Egy helyiségben ne tároljon nagyobb mennyiséget. Óvja a közvetlen napfénytől.
2. G-COAT PLUS illékony anyag. Jól szellőző helyiségben használja. Használat után azonnal helyezze vissza a kupakot.
3. Amennyiben szembe kerül, azonnal mossa ki folyó vízzel és forduljon orvoshoz.
4. Amennyiben szájnyálkahártyához ill. bőrhöz ér, azonnal távolítsa el szivacs vagy vattadarab segítségével. A helyreállító kezelés végeztével alaposan öblítsen vízzel.
5. Amennyiben a szövet, melyhez az anyag ért, kifehéredik vagy felhólyagosodik, tanácsolja betegének a terület érintetlenül hagyását az elváltozás eltűnéséig. Ez általában 1-2 hetet vesz igénybe. Az érintkezés elkerülése érdekében a kofferdámmal nem fedett területeken kakaóvaj használata ajánlott.
6. Kerülje az anyag belélegzését ill. lenyelését.
7. Óvja ruházatát a ráfröccsenéstől.
8. Ne keverje más anyagokkal.

Utoljára módosítva : 06/2008