



octenisept® sebgél

**Fájdalommentes, gyors segítség akut sérülések esetén.
Heveny sérülések és könnyebb égési sebek kezelésére.**

Amit nyújt

- Segíti a sebgyógyulást.
- Mindenféle seb kezelésére alkalmas.
- Színtelen, így nem hagy foltot a ruhán.
- Jódmentes, így nem allergizál.
- Alkoholmentes, így nem csíp.

Alkalmazási terület

Az octenisept® sebgélt minden típusú akut bőrsérülésre használhatjuk (horzsolás, vágás, és enyhe égési sérülések, mint pl: napégés). A megfelelő sebgyógyulás érdekében, a sebeket nedvesen kell tartani, mivel a gyógyulás feltétele a bőr sejtjeinek osztódása és vándorolása. Ez legjobban nedves sebkörnyezetben valósul meg. Ezen felül a sebet meg kell óvnunk a fertőzésektől!

Az octenisept® sebgél speciális kivitelének köszönhetően kellőképpen nedvesen tartja a sebet és azon egy réteget képez, ami megóvja a baktériumoktól. Ez a védőréteg megakadályozza a kórokozókat, hogy bejussanak a sebbe, mert azok már a gélben elpusztulnak. Így az octenisept® sebgél megakadályozza a seb felülfertőzését és véd a gulladástól.

Csírák inaktiválása

Az octenisept® sebgél már 1 perc behatási idő elteltével kiváló csíra inaktiváló hatást mutatott.

Ezt kvantitatív szuszpenziós teszt segítségével, magas szérumterhelés mellett vizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy az octenisept® sebgél csíra inaktiválása egy perc behatási idő után az összes vizsgált organizmussal szemben kielégítően hatékonyak bizonyult.

Az octenisept® sebgél szövet- és biokompatibilitása

Nem irritál, nem tesz érzékennyé, fájdalommentes, nincs szöveti toxicitás a granuláció és hámosodás során. Az octenidin hatóanyag jó szövet kompatibilitását a krónikus sebekben végzett hosszú távú klinikai tapasztalatok és klinikai kísérletek támasztják alá.

Termék adatok

Összetétel:

- Tisztított víz,
- propilén-glikol,
- hidroxí-etil-cellulóz,
- oktenidin-hidrokorid.

Kémiai / fizikai adatok	
Megjelenés	szagtalan, áttetsző gél

Használati útmutató

Fertőtlenítsük le a sebet octenisept® sebfertőtlenítő szerrel a sérülést követően. Ezután fedjük le a sebet egy vékony réteg sebgéllal. Amennyiben szükséges kötözzük be, vagy tegyük rá sebtapaszt.

Használjuk a sebgélt napi 1-2 alkalommal, amíg a seb teljesen be nem gyógyul!

Higiéniai okokból, ne érintkezzen a sebgél kupakja a sebbel vagy más felszínnel!

Terhesség és szoptatás alatt is használható!

Csak külsőleg használja!

Mellékhatások

Az octenisept® sebgélnél ez idáig mellékhatások nem ismeretesek.

Ellenjavallat

- A készítmény hatóanyagai elleni érzékenység esetén nem használható!
- Hialinporcon nem alkalmazható!

Figyelmeztetés

- Gyermekek elől elzárva tartandó!
- Tartsa be a használati útmutatót!
- Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
- Óvja a közvetlen napfénytől!
- Ne nyelje le!
- Csak sérülésmentes, bontatlan csomagolású terméket használjon!
- A címkén feltüntetett lejárati időn túl ne használja!

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
20 ml-es tubus	20 x 20 ml	121607

Környezeti információk

Schülke & Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) és továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma: DES-150 00003).

CE0297

