

## VOCO

### Registrado Clear

#### Használati utasítás

A **Registrado Clear** harapásregisztrációra használható transzparens A-szilikon, nagy végső keménységgel: legfeljebb Shore A 70 (az elasztomerek specifikus keménység mérése) és rövid kötési idővel rendelkezik. A **Registrado Clear** katalizátorként polidimetilsziloxánt és platinát tartalmaz.

#### Indikációk:

- harapás regisztráció
- szilikon kulcs kompozit restaurációk készítéséhez
- harapási helyzet és centrális reláció rögzítésére
- intraorális rajzolókészülékkel történő regisztrációhoz
- röntgen sablon fém golyójának rögzítésére

#### Alkalmazás:

Használja a VOCO 2-es típusú adagoló pisztolyt, vagy bármilyen más megfelelő adagoló pisztolyt a **Registrado Clear** adagolásához. Technikai okok miatt előfordulhat, hogy a patron kamráinak töltöttségi szintje kissé eltérő. Ezért vegye le a patron kupakját, azután helyezze a patron a 2-es típusú adagolóba és addig nyomja ki az anyagot, amíg mind a két kamrában egyenlő szintet érnek el.

Ezután rögzítse a 16-os számú keverő kanült, majd a kar megnyomásával nyomja ki az anyagot. Az anyag tökéletesen, automatikusan és a helyes arányban keveredik meg a kanülon keresztül. A finomabb, pontosabb applikálás érdekében a 2-es típusú intraorális végződést rá lehet illeszteni a 16-os keverőcsőr nyitott

végére. Okklúziós harapásvétel esetén a **Registrado Clear**-t közvetlenül a felső vagy alsó

fogsor ívre kell applikálni. A harapást 20 másodpercen belül kell pozícionálni. A

**Registrado Clear** feldolgozási ideje szobahőmérsékleten

(23 ° C) legalább 25 másodperc. Ezután csukott szájban 120 másodpercig kell

kötnie, majd a regisztráció eltávolítható. Kikeményedés után a **Registrado Clear** szikével vagy ollóval könnyen vágható

és továbbra is formatartó.

#### Technikai adatok:

Feldolgozási idő (23 °C-on)	≥ 25 s
Intraorális idő (37 °C-on)	120 s
Shore A keménység	> 70
Rugalmasság	> 99%

#### Információk / óvintézkedések:

- A **Registrado Clear**-t bármely összetevőjével (platina katalizátor) szembeni ismert allergia esetén nem szabad alkalmazni.

- Ne használja a **Registrado Clear**-t kondenzációs szilikonnal vagy eugenol tartalmú anyagokkal együtt.
- A latex kesztyű, kézkrémek, tisztítószer, szájöblítő / retrakciós oldat és egyéb anyagmaradványok (pl. lenyomatanyagok) kedvezőtlenül befolyásolhatják a kötési folyamatot. Ezeket ezért a **Registrado Clear** felhordása előtt el kell távolítani (le mosással, ha szükséges).
- Kerülje a nem teljesen megkötött szilikon ruházattal történő érintkezését.
- A lenyomatot további használat előtt vizes fertőtlenítővel ajánlott lefertőtleníteni. Kövesse a fertőtlenítőszer gyártójának utasításait.

#### **Tárolás:**

Tárolja 4 ° C és 23 ° C közötti hőmérsékleten. Ne használja fel a **Registrado Clear**-t a lejáratási idő után.

Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban

és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ

és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az

Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk

alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó

felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk

készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint

megfelelve azon általános feltételeknek, melyeket az

értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.