

VOCO Remin Pro

Használati utasítás

A **Remin Pro** hydroxilapatit és fluorid tartalmú, vizes alapú krém.

A **Remin Pro** sárgadinnye, eper és mentol ízekben kapható.

A **Remin Pro**:

- extra védelmet nyújt a fogaknak
- segít a plakkban lévő baktériumok által termelt savak közömbösítésében.
- a szájbán előforduló, belső vagy külső forrásból származó egyéb savakat is semlegesíti.

Felhasználási terület:

- Fogfehérítés után
- Professzionális fogtisztítás és fogkőleszedés után
- Túlérzékenység megelőzésére
- A fogszabályozó kezelés ideje alatt

Alkalmazás:

1. Tegyük egy borsónyi **Remin Pro** krémet az ujjunk hegyére (otthoni használat esetén), vagy megfelelő műszerre, és kenjük szét a fogazaton.
2. A páciens segítsen a nyelvvel a fogain szétkenni az anyagot.

A **Remin Pro** és a nyál minél

tovább (legalább 3 percig) maradjon a szájbán.

3. A fölösteget a páciens köpje ki. Ne öblítsen, ha lehetséges.

A páciens a kezelés után 30 percig ne egyen és ne igyon.

Otthoni használatra is alkalmas.

Tárolás:

A napfénytől elzártnan, száraz, hűvös helyen tartandó (2 - 23 C fokon). Lejárat után ne használjuk fel.

Elővigyázatosság:

1. Használat után azonnal zárjuk vissza a tubust.
2. A **Remin Pro** parabént, hydroxilapatitot és fluoridot tartalmaz. Ezekre való allergia esetén tekintsünk el a használatától.
3. 6 éven aluli gyermekeknél nem ajánlott, és 12 éves kor alatt az otthoni használata sem javasolt.
4. A szembe kerülése esetén mossuk ki bő vízzel és forduljunk orvoshoz.
5. A kezelést azonnal szakítsuk meg ha angioderma lép fel, és kérjünk orvosi segítséget.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.