

Használati utasítás

Termékleírás:

Az Ufi Gel hard C hidegen kötő, tartósan kemény alábélelő anyag protézisek alábélelésére. Direkt és indirekt alábéleléseknél könnyen és gyorsan felhasználható. Az Ufi Gel hard C nem tartalmaz metilmetakrilátot, így minimálisra csökkenti a nyálkahártya-allergia és -irritáció veszélyét. A készlet adhezívet is tartalmaz, amelynek segítségével az alábélelő anyag tökéletes és végleges tapadása érhető el.

Indikációs terület:

- Funkcióját veszített teljes vagy részleges protézisek kemény, tartós, teljes vagy részleges alábélelése
- Protézisszélek meghosszabbítása

Felhasználás:

1. A protézis előkészítése

Ellenőrizze az okklúziót, és szükség esetén végezze el a korrekciót. Ezután alaposan tisztítsa meg a protézist kefével és szárítsa meg. A protézist a szükséges helyeken érdesítse fel egy alkalmas forgóeszközzel, beleértve a bukkális és labiális széleken. Tisztítsa és szárítsa meg a protézist. Vazelinnel izolálja a protézis egyéb felszíneit (műfogak, műny), hogy az Ufi Gel hard C-vel nem kívánt kontaktust elkerülhesse.

A protézis kapscaít, csúsztatóit és finommechanikai rögzítőit ki kell blokkolni szilikonnal (folyékony) vagy alacsony olvadáspontú viasszal!

2. Az adhezív applikálása

Cserélje ki az üveg (szállítási) kupakját az ecsettel ellátott kupakra. Applikálja az adhezívet a teljes alábélelendő felületre és hagyja megszáradni (30 másodperc).

Figyelem: Az üveget használat után azonnal szorosan zárja vissza és tárolja függőleges helyzetben.

Fontos: A biztos kötés csak az Ufi Gel hard C adhezív használatával garantálható!

3. A patron előkészítése

Tegye a Ufi Gel hard C patronra a VOCO adagolóba (2. típus) vagy bármely más megfelelő keverési arányú adagolóba. Technikai okok miatt a patron kamrák töltési szintje között kisebb különbségek előfordulhatnak. Ebben az esetben távolítsa el a patron kupakját és nyomja ki az anyagot mindaddig, amíg az homogén módon nem folyik.

Ezután helyezze fel a keverőcsőrt és 90 °-os fordulattal rögzítse.

Nyomja meg a kart és az anyag a helyes arányban és automatikusan megkeveredik. Használat után hagyja a keverőcsőrt a patronon vagy helyezze vissza a védőkupakot a patronra.

4. Az Ufi Gel hard C applikálása

Applikálja az Ufi Gel hard C-t egyenletesen az előkészített fogsor szélekre és / vagy alapra, kerülje el az anyagfelesleg képződését, vagy távolítsa el az anyagfelesleget a megfelelő eszközzel.

Helyezze vissza a fogsort, és okklúziós helyzetben a páciens gyakoroljon enyhe nyomást a fogsorra 1 percig, majd végezzen funkcionális rágó és a nyelőd mozgást 2 percig. Győződjön meg arról, hogy a felső fogsor alábélelésekor nem történt jelentős anyagbeáramlás a torokba, különösen a kemény és a lágyszájpad átmenetnél (A-vonal).

4.1 Részleges vagy teljes protézis alámenős részekkel

Az applikálás kezdete után 3,5 perc elteltével vegye ki a fogsort és azonnal távolítsa el az ollóval vagy szikével a kifolyt felesleget. Helyezze vissza a szájba, ellenőrizze az okklúziót és hagyja kötni 2 percig. A végső kötési fázis kuktában kb. 40 ° C-os meleg vízben is elvégezhető, ha az alábélelt fogsort nem kell újra beilleszteni.

Ne engedje, hogy a kötés ideje alatt az anyag a levegővel érintkezzen, és így megkötetlen, oxigén-inhibíciós réteg alakuljon ki az anyag felszínén.

4.2 Teljes fogsor alámenős felszínek nélkül

Az anyagfelesleg a végső polimerizáció előtt intraorálisan vagy extraorálisan is eltávolítható.

Intraorálisan: Távolítsa el a felesleges anyagot 3 perc után (az applikáció elejétől számítva) a megfelelő eszközzel. További 2 percig hagyja a szájban, amíg az Ufi Gel hard C teljesen meg nem köt.

Extraorálisan: Lásd a 4.1 pontban leírtakat.

5. Befejezés

Az egész alábélelt felületet (bazálisan is) finirozni kell (vidia fúróval, szilikon polirozóval) és polirozni is kell (polirozó paszta, polirozó korong).

extraorális intraorális intaorális vagy extraorális

Jelezések, elővigyázatossági intézkedések:

- Az adhezív palackot gondosan lezárva és függőleges helyzetben tárolja.
- Kerülje az adhezív bőrrel érintkezését. Az érintkezésbe került bőrfelületet öblítsük le alaposan vízzel és szappannal.
- A szemmel való érintkezés esetén a szemet alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon szemorvoshoz.
- Az Ufi Gel hard C benzoilperoxidot (katalizátor), hidroxietilmetakrilátot és acetont (ragasztó) tartalmaz. Ne használja az ezekkel az anyagokkal szembeni túlérzékenység (pl. allergia) esetén.
- A megadott időtartékek, 25 °C-os szobahőmérsékletre és 35 °C-os szájhőmérsékletre vonatkoznak. A polimerizáció lassabb lesz alacsonyabb hőmérsékleten, míg a magasabb hőmérséklet gyorsítja a polimerizációt.
- Ne sterilizálja a keverőcsőrt ultrahangos kádban.
- Tárolási feltételek: 4 °C - 23 °C.
- Ne használja a lejáratú időt követően.

Tisztítás:

Az Ufi Gel hard C-vel alábélelt fogsor a szokásos tisztító anyagokkal és eljárásokkal tisztítható.

Ez a háztartási, valamint a professzionális tisztításra is egyaránt vonatkozik.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.