



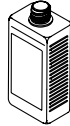

assistina

Heti teendők


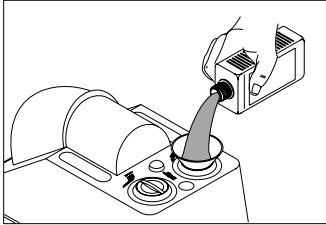


Szintkijelzőt ellenőrizni! Esetleg utántölteni!

Szervizolaj:
500 ml – 02675910


Tisztítóoldat:
1000 ml – 02680200

Csomag 02680500:
1000 ml tisztítóoldat és 500 ml olaj

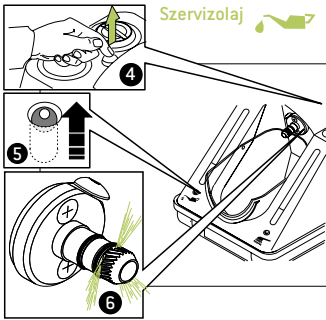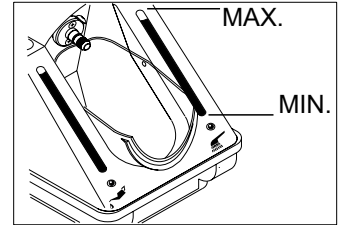

Szervizolaj


Működést ellenőrizni!

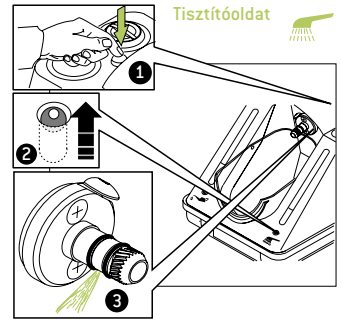

Tisztítóoldat

0 gyűrűket megvizsgálni!


Megfelelő pozícióra
és/vagy
sérülésre ügyelni!

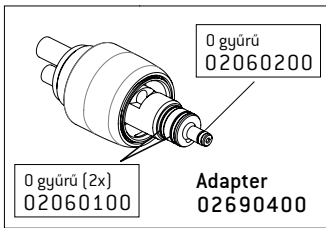

0 gyűrű
02060200

0 gyűrű (2x)
02060100

Adapter
02690400

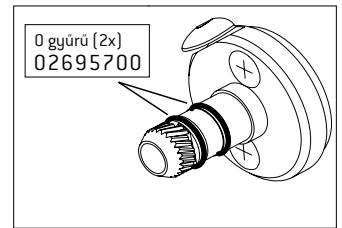


0 gyűrű (2x)
02695700



Általános utasítások



Minden páciens utáni olajozásnál – Start gombot 1x megnyomni!
Napi kétszeri olajozásnál – Start gombot ! 2x megnyomni!

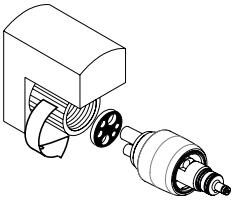

Csatlakozásokat jól meghúzni! (Tömítettség)

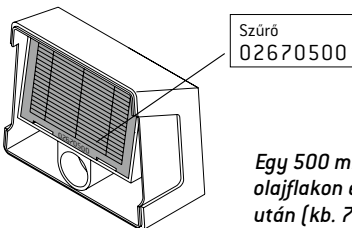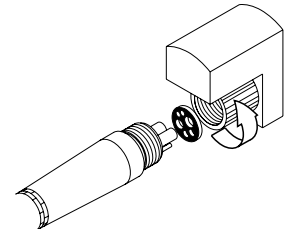

Szűrő
02670500

Egy 500 ml-es
olajflakon elhasználása
után (kb. 7000 ciklus)

Szűrőcsere!

Szűrő
02675200

Évente

