




Rövid útmutató az Implantmed készülékhez SI-1010 / SI-1015 / SI-1023


Üzembe helyezés – Általános tudnivalók

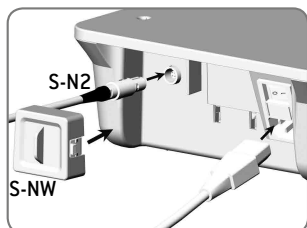


Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a lábvezérlést.




Csatlakoztassa a motorkábelt.

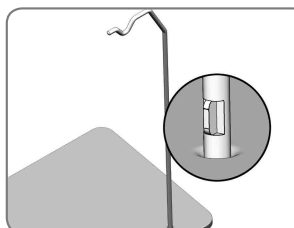


Dugja be az állványt.

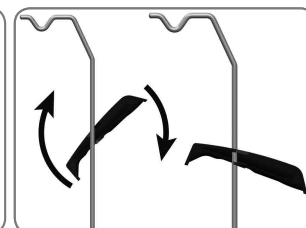

Akassza be és rögzítse az univerzális tartót.

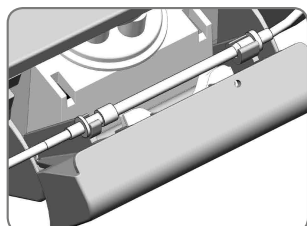


Nyissa ki a szivattyúfedelelet. Helyezze be a sprayömlőt.

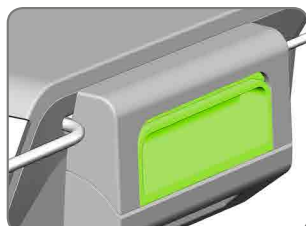

Zárja le a szivattyúfedelelet.




Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy földelőérintkezővel rendelkező dugaszolóaljzatba.

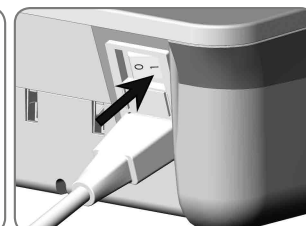

Kapcsolja be a vezérlőegységet a hálózati kapcsolóval.

A vezérlőegység kezelése – Főmenü

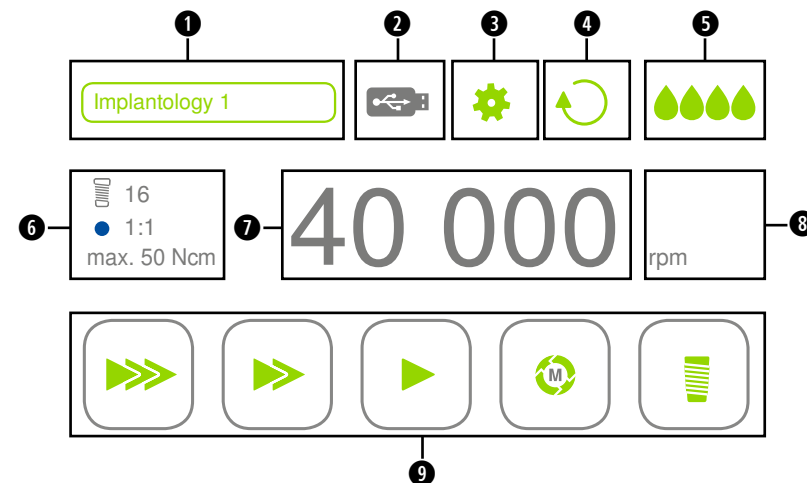

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Saját kedvencek | 6 | Program beállítása |
| 2 | Dokumentálás (DOKU) | 7 | Fordulatszám/forgatónyomaték beállítása |
| 3 | Beállítás | 8 | Feladatmegjelenítési mód |
| 4 | Jobbra/balra forgás | 9 | 1 – 5 programok |
| 5 | Hűtőfolyadék mennyiségének beállítása | | |

Higiénia és ápolás – Motor és a kábel

1 Előfertőtlenítés

> Erősebb szennyeződésnél fertőtlenítőkendővel végezzen előfertőtlenítést.

2 Motor és a kábel



Ne csavarja meg és ne törje meg a motorkábelt! Ne hajlítsa a kábelt kis sugárban!

3 Kézi tisztítás

> Öblítse le, és tisztítsa meg kefével, demineralizált vízzel (< 38 °C).

4 Gépi tisztítás és fertőtlenítés

> Az előkészítéshez kizárólag szárítóprogrammal rendelkező thermodezinfektort használjon.



5 Sterilizálás



A W&H az EN 13060 szabvány szerinti B osztályos sterilizálást ajánlja. Egyéb sterilizálási eljárások csökkenthetik a motor élettartamát.









6 tárolás

> A sterilizált tárgyakat pormentes és száraz helyen tárolja.

Rövid útmutató az Implantmed készülékhez SI-1010 / SI-1015 / SI-1023


Ikonok – Navigálás

-  Felhasználó hozzáadása
-  Fúrési protokoll hozzáadása
-  Vissza
-  Választás/mentés
-  Szerkesztés
-  Segítség
-  Lapozás a következő oldalra
-   Csökkentés/növelés

Ikonok – Információ

-  Beállítás kiválasztva
-  Kedvenc kiválasztva
-  Információ
-  Információ választási lehetőséggel
-  Hibaüzenet, a további munka nem lehetséges
-  Hibaüzenet, a további munka lehetséges
-  Piros = Cserélje ki az elemeket
-  S-NW lábvezérlés

Ikonok – Információ


 S-N2 lábvezérlés

Ikonok – Főmenü


 Dokumentálás (DOKU)

 Új pozíció

 Új DOKU

 DOKU befejezése


 Sáv

 Százalék

 Abszolút

 Fúrési protokollcsoport

 Fúrési protokoll

 Szerkesztés

 Másolás

 Átnevezés

 Aktiválás

 Törlés

 Kedvenc

Ikonok – Főmenü

 Áttétel

 Fordulatszám

 Forgatónyomaték

Ikonok – Beállítás

 Képernyőzár

 Felhasználó

 Rendszer

 Forgatónyomaték-görbe

 Felhasználó kezelése

 Lábvezérlés

 Párosítás (pairing)

 változó

 BE/KI

 Rendszerellenőrzés

 Képernyőzár beállítása


 Időköz

 LED

Ikonok – Beállítás


 Elsőtétedési idő

 Hang

 Eszközinformáció

 Szerviz

 Licencek

 Modulinformáció

 Felhasználói felület

 Motorvezérlés

 Lábvezérlés

 Osstell

 Szoftverfrissítés

 Alaphelyzetbe állítás

 Újraindítás

 Nyelv

 Fogszámozási rendszer

 I-IV FDI

 1-32 UNS

