



aspirmatic® aspirmatic® cleaner

Orvosi és fogászati szívókészülékek tisztítására, fertőtlenítésére, szagtalanítására és vízkőmentesítésére.

Amit nyújt

- Hatékonyágát széleskörű gyakorlati tesztek igazolják.
- Bármilyen típusú integrált amalgám-leválasztó berendezéshez használható (KaVO, Simenes/ Sirona, Anthos, stb.).
- Abszolút habzásmentes.
- Kellemes illatú, szagtalanító hatású.
- Aldehyd-, fenol- és klórmentes.
- Egyszerű, gazdaságos és biztonságos használat.
- Mindenféle egészségügyben ismert orvosi és fogászati szívókészülékhez használható.

Alkalmazási terület

- Valamennyi orvosi és fogászati szívókészülék tisztítására, fertőtlenítésére, szagtalanítására és vízkőmentesítésére szolgál.
- Mindkét termék használata után alapos öblítés szükséges.

Kiszerezési egységek

| Kiszerezési egységek | Csom.egység | Cikkszám |
|-------------------------------|-------------|----------|
| aspirmatic® 2 literes | 5 x 2l | 150113 |
| aspirmatic® cleaner 2 literes | 5 x 2l | 150313 |

Mikrobiológiai hatásspektrum

Az aspirmatic® a Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága (DGHM) által kifejlesztett új teszt módszereknek megfelelően baktericid, fungicid, virucid (HBV, HCV és HIV elleni) hatással rendelkezik.

Koncentrációk és behatási idő

| aspirmatic® | |
|---|---------------------------------------|
| Baktericid, fungicid, virucid (HIV, HBV, HCV) | 2% - 30 perc |
| aspirmatic® cleaner | |
| Nagyfokú szennyezettség vagy hosszabb állásidő után | 5% - kb. 1-2 óra 10% - kb. 1-2 óra |

Készítmény típusa

aspirmatic®

Folyékony kvaterner ammónium-vegyület alapú koncentrátum, amely mindenféle szívókészülék tisztító hatású fertőtlenítésére használható. Alkalmazása **napi 1-2 alkalommal** ajánlott.

aspirmatic® cleaner

Szerves savakat tartalmazó koncentrátum, amely mindenféle szívókészülék tisztítására és vízkőmentesítésére használható. Alkalmazása szennyezettségtől függően **heti 1-2 alkalommal** ajánlott.

Adagoló segédeszközök / tartozékok

| Kiszerezési egységek | Cikkszám |
|-----------------------------|----------|
| aspirmatic® system (kancsó) | 183701 |

Termékadatok

Összetétel:

100 g aspirmatic®:

- 7,5 g dioktil-dimetil-ammoniumklorid, nemionos tenzid, korróziógátló, habzástgátló, illatanyag, színyanyag.

aspirmatic® cleaner:

- Szerves savak, nemionos tenzid, korróziógátló, színyanyag.

Kémiai / fizikai adatok

aspirmatic®

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Koncentrátum | |
| Megjelenés | átlátszó, türkizkék folyadék |
| pH érték | kb. 7,0 |
| Illat | kellemes, friss |
| 2%-os munkaoldat | |
| Megjelenés | kékszínű folyadék |
| pH érték | kb. 8,0 |

aspirmatic® cleaner

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Koncentrátum | |
| Megjelenés | opálos, világossárga folyadék |
| pH érték | kb. 0,9 |
| Illat | szagtalan |
| 5%-os munkaoldat | |
| Megjelenés | átlátszó, tiszta folyadék |
| pH érték | 5%-os kb. 2,1 10%-os, kb.1,9 |

Alkalmazás módja

Az aspirmatic® és az aspirmatic® cleaner koncentrátum formájában kerül forgalomba, és mindkét szer vízzel hígítható.

Használja az aspirmatic® oldatot napközbeni, és kezelés végén esti tisztító-fertőtlenítésre! Az adagolást megkönnyíti az aspirmatic® system, a keverő kancsó és a flakonra rácsavarható, újra felhasználható adagoló (adagonként 20 ml).

2 liter oldat elkészítéséhez az aspirmatic® kancsóban keverjen össze 1960 ml vizet és 40 ml koncentrátumot! 1400 ml oldatot szívjon fel, a maradék 600 ml-t öntse a szájjöblítő medencébe. Behatási idő 30 perc. Kezelés után öblítés szükséges.

Használja az aspirmatic® cleaner-t hetente 1-2 alkalommal! 2 liter oldat elkészítéséhez az aspirmatic® kancsóba keverjen össze 1900 ml vizet és 100 ml koncentrátumot! 1400 ml oldatot szívjon fel, a maradék 600 ml-t öntse a szájjöblítő medencébe. Behatási idő 1, maximum 2 óra. Kezelés után öblítés szükséges.

Csomagolásra vonatkozó információk

Az aspirmatic® és az aspirmatic® cleaner az előírt koncentrációkra hígítása esetén a szennyvíz csatornába üríthető, biológiailag lebomló és semmiféle veszélyt nem jelent a víztisztító üzemekre.

A csomagolásul szolgáló flakonok PVC mentes, újrahasznosítható polietilén (HDPE) műanyagból készültek.

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti jelölés

aspirmatic® és aspirmatic® cleaner esetében is

Xi: Irritáló.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S37: Munkavégzés közben védőkesztyűt kell viselni!

Figyelmeztetés

Az Európai Unió egészségügyi és munkavédelmi előírásainak megfelelően védőkesztyű használata minden esetben kötelező, bármiféle fertőtlenítőszer használata esetén, ami nem kézfertőtlenítésre szolgál.

Soha ne használja a szert a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után!



Környezeti információk

Schülke & Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) és továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma: DES-150 00003).

OTH engedélyszám: 421-2/2003

