



## mikroqid<sup>®</sup> sensitive törlőkendők

Alkoholmentes, azonnal használható, gyors felületfertőtlenítő kendők, az érzékenyebb felületekre is.

### Amit nyújt

- Alkohol érzékeny felületekre;
- Felhasználásra kész fertőtlenítő kendők;
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum, a lehető legrövidebb behatási idő alatt;
- Rendkívül gyors és hatékony;
- Praktikus jumbo méretben: 200 db kendő/doboz vagy utántöltő tasak;

### Alkalmazási terület

- Orvosi műszerek (CE 0297) és egyéb felületek fertőtlenítésére.
- Különösen alkalmas alkoholra érzékeny felületekre (pl. plexiüveg és ultrahangos transzducer)

### Behatási idők és alkalmazási módok

Mikroorganizmusok	Behatási idők
Baktericid, fungicid (a VAH/DGHM* lista rövid behatási időre vonatkozó irányelve alapján)	5 perc
Virucid aktivitás (beleértve HIV, HBV, HCV)	1 perc
BVDV	1 perc
Rotavírus	1 perc
Vaccina	1 perc

\* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

### Mikrobiológiai hatásspektrum

A mikroqid<sup>®</sup> sensitive törlőkendők

- baktericid,
- fungicid,
- virucid (HBV, HCV, HIV, rotavírus, vaccina) hatással rendelkeznek.

## Termék adatok

### Összetétel:

1 doboz vagy utántöltő tasak 200 db kendőt tartalmaz.

100 g oldat:

- 0,26 g kvaterner ammónium vegyület,
- 0,26 g didekil-dimetil ammónium klorid,
- benzil-C12-C18-alkildimetil,
- kloridok.

### Kémiai / fizikai adatok

Megjelenés	tiszta, színtelen folyadék
Hőstabilitás	-5°C - +40°C
Fajsúly (20°C)	kb. 0,998 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás	< 15 másodperc (DIN 53211)
pH érték	kb. 6,0 - 0,8
Robbanáspont	61°C (DIN 51755)

### Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
200 db-os doboz	10 doboz / karton	109184
200 db-os utántöltő tasak	12 tasak / karton	109190

## Alkalmazás módja

A mikrozid<sup>®</sup> sensitive törlőkendővel törölje át a fertőtlenítenő felületeket alaposan, győződjön meg róla, hogy a felületek teljesen nedvesek legyenek, majd hagyja, hogy az oldat kifejtse hatását. Nagyobb felületnél használjon több kendőt, ha szükséges.

Különösen alkalmas alkoholra érzékeny tárgyak felületére (pl. plexiüveg, ultrahangos transzducerre).

## Figyelmeztetés

- Védőkesztyű használata ajánlott.
- Használja óvatosan a fertőtlenítőszer!
- Mindig olvassa el a címke információit mielőtt használná!

## Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
Falra szerelhető fém doboztartó	134417

