




KATALÓGUS

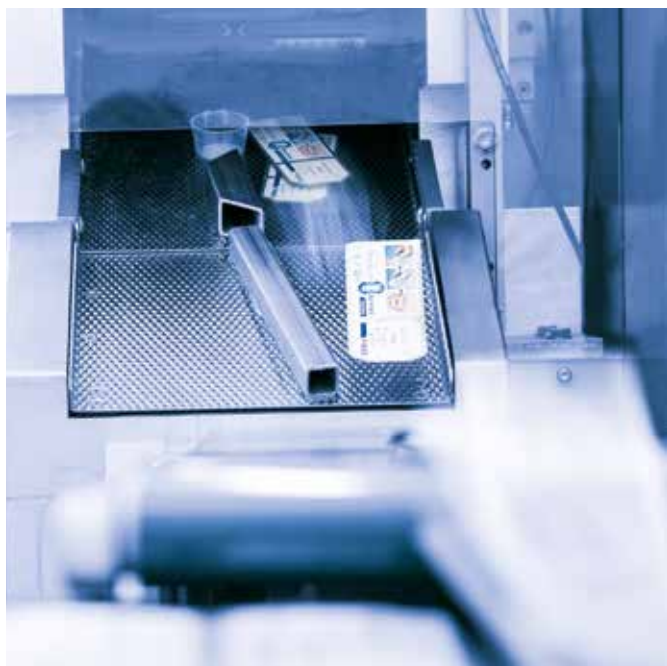

ÜDVÖZÖLJÜK A DENTALISTÁKNÁL

Tisztelt ügyfelek és üzleti partnerek!

Fogászati kutatócéggként elsősorban és leginkább Önre és az Ön elvárásaira összpontosítunk. Akár a fogorvosi rendelőben vagy a laboratóriumban használják az anyagainkat, egyaránt az a fontos a számunkra, hogy biztosítsuk az egyszerű munkavégzést, a megbízhatóságot, az egyediséget és természetesen a kiváló minőséget.

Mindezek a teljes termékportfóliónkat jellemzik, amely kiváló minőségű anyagokat tartalmaz az indikációk széles köréhez: a profilaktikus termékektől a kompozitok és bondok széles skáláján keresztül a ragasztókon vagy az ideiglenes anyagokon át a lenyomat készítéséhez szükséges anyagokig.

Ezen felül a VOCO a fényre kötő gyanták területén szerzett tapasztalatait a digitális fogászatban is kamatoztatja: akár az ultramodern 3D nyomtatókról, a V-Print család világszerte sikeres nyomtatási anyagairól, vagy az innovatív kompozit blokkok CAD / CAM alkalmazásáról legyen is szó. A VOCO olyan termékeket fejleszt, amelyek megfelelnek a fogorvosok és fogtechnikusok legmagasabb igényeinek is.

A CediTEC és a V-Print dentbase termékeinkkel először csak egy teljes protézist lehetett elkészíteni, mostanra már egy egész készlet áll rendelkezésre - az alaptól a protézisfogakon át a ragasztóanyagig (erről bővebben a 52. oldalon).

Olvassa a katalógust, tudjon meg többet a sokszínű portfóliónkról a megelőzés, helyreállítás és fogpótlás és a digitális fogászat anyagairól! Ismerje meg termékeinket az alábbi területeken

- Szájápolás
- Közvetlen helyreállítás
- Közvetett helyreállítás és
- Készülékek · Egyéb termékek

és fedezze fel a VOCO csúcsmínőségű színvonalát.

Amennyiben bármilyen kérdése van, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon az Ön VOCO fogorvosi tanácsadójához. Természetesen ügyfélszolgálatunk is szívesen segít (kérjük, vegye fel velük a kapcsolatot e-mailben a service@voco.de címen).

Termékinformációk, használati utasítások, tudományos információk, klinikai esetek és egyéb elérhetők a www.voco.dental oldalon.

Hírek, információk és egyéb VOCO érdekességek megtalálhatók a Facebookon, az Instagrammon és a Youtube-on!

Az Ön VOCO GmbH-ja



www.voco.dental

MEGELŐZÉS

Professzionális fogtisztítás

CleanJoy	7
----------	---

Barázdazárók

Grandio Seal	8
Fissurit FX	9
Fissurit F	9

Megelőzés

Bifluorid 10	10
Remin Pro	11

Túlérzékenységre

Admira Protect	11
VOCO Profluorid Varnish + BioMin	12
VOCO Profluorid Varnish	13
Profilaxis készlet	14

Fogfehérítés

VOCO Perfect Protect	14
Perfect Bleach	15
Perfect Bleach Office+	15

DIREKT RESTAURÁCIÓK ANYAGAI

Alábélelő anyagok

MTA vpt	17
Calcimol LC	18
Calcicur	18
Ionoseal	19

Bondok

Futurabond U	21
Futurabond M+	22
Futurabond DC	23
Vococid	23
Admira Bond	24
Solobond M	24

Tömőanyagok (ORMOCER®)

Admira Fusion 5	27
Admira Fusion	28
Admira Fusion Flow	29
Admira Fusion x-tra	30
Admira Fusion x-base	31

Tömőanyagok (Kompozitok)

AlignerFlow LC	26
Alfacomp LC	26
GrandioSO Unlimited	32
GrandioSO	33
GrandioSO Light Flow	34
GrandioSO Flow	34
GrandioSO Heavy Flow	35
GrandioSO x-tra	36
GrandTEC	36
VisCalor bulk	37
Grandio	38
Grandio Flow	39
Amaris	40

Amaris Flow	40
Amaris Gingiva	41
FinalTouch	41
x-tra base	42
x-tra fil	43
Polofil Supra	44

Tömőanyagok (Kompomer)

Twinky Star	44
Twinky Star Flow	44

Tömőanyagok (Üveg ionomer anyag)

Ionolux	46
IonoStar Plus	47
IonoStar Molar	48
VOCO Ionofil Molar AC Quick	49
VOCO Ionofil Molar	49
Aqua Ionofil Plus	50
Easy Glaze	50

INDIREKT RESTAURÁCIÓK ANYAGAI

CAD / CAM anyag

V-Print splint	52
V-Print splint comfort	52
V-Print SG	53
V-Print IBT	53
V-Print model 2.0	54
V-Print cast	54
V-Print Try-In	55
V-Print tray	55
V-Print c&b temp	56
V-Print dentbase	56
Structur CAD	57
Grandio blocs	58
Grandio disc	59
CediTEC DT	60
CediTEC	60
CediTEC DB	61

Ragasztó anyagok

Bifix Veneer LC	63
Bifix Veneer Try-In	63
Bifix SE	64
Bifix QM	65
Bifix Hybrid Abutment	65
Ceramic Bond	66
Meron Plus QM	66
Meron (Application capsule)	67
Meron	67
Aqua Meron	67
Quick Up	68
BrackFix	68

Csonkfelépítők

Rebilda Post	69
Rebilda Post GT	70
Rebilda DC	71
Grandio Core Dual Cure	72

Ideiglenes anyagok

Structur 3	73
Structur 2	74
Structur Premium	75
Ideiglenes készlet	75
Provicol QM Aesthetic	76
Provicol QM Plus	76
Provicol · Provicol QM	77
Provicol C	77
Bifix Temp	77
Clip · Clip F	78
Clip Flow	78

Fogsor alábélelők

Ufi Gel hard C · Ufi Gel hard	79
Ufi Gel SC · Ufi Gel P	80

Lenyomat anyagok

V-Posil Putty Fast	81
V-Posil Putty Soft Fast	81
V-Posil Heavy Soft Fast	81
V-Posil Mono Fast	81
V-Posil Light Fast	82
V-Posil X-Light Fast	82
Registrado X-tra	83
Fit Test C & B	83
VOCO Retraction Paste	84
Individo Lux	85
Profibase	85
LC Dam	86

Protetikai javításra

Cimara	86
--------	----

KÉSZÜLÉKEK · EGYÉB TERMÉKEK

Eszközök

VisCalor Dispenser	88
Caps Warmer	88
Celalux 3	89
VOCO GIC Mixer	90
VOCO Dynamic Dispenser	90

Tisztító anyagok

Caries Marker	91
Block Out Gel LC	91
Pele Tim	91

Egyéb

Traypurol	92
Traypurol tabs	92

Kisméretű eszközök

Caps Dispenser	93
Dispenser	93
QuickMix Dispenser	93
AC Applicator	93
AC Activator	93
Dispenser adagoló	93

Egyszer használatos eszközök

Egyszer használatos eszközök	95
------------------------------	----

IKONOK

Az alábbi ikonok segítségével gyorsan megtalálhatja a megfelelő terméket, és másodperceken belül eljuthat az első benyomástól a döntés meghozataláig, ezzel segíti a gyors általános áttekintést.



Anyagösszetétel

A töltőanyagok és a rezin-mátrix is tisztán szilícium-oxid alapúak.



Anyagösszetétel

Ez a termék nano-hibrid technológián alapszik.



Az anyag applikálása

Ez a termék az anyag megszaladását, csepegését megakadályozó NDT® fecskendőben áll rendelkezésre.



Javallatok

Az indikációja szerint ez a termék alkalmas a megnevezett üreg osztályok tömésére. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Röntgenárnyék

A munkafolyamat befejezése után ez az anyag erős röntgenárnyéket ad. Az érték az alumínium röntgenárnyékához viszonyított arány százalékban kifejezve.



Fluorid tartalom

Ez a termék a feltüntetett mennyiségű fluoridot tartalmazza. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Munkaidő feltüntetése

A képen látható a termék maximális extraorális munkaideje. Részletes információkért olvassa el a használati utasítást.



Retenciós idő jelzése a szájban

Ezt a terméket a jelzett minimális ideig a szájban kell tartani. Részletes információkért olvassa el a használati utasítást.



Anyagmunkálási előírás

Ez az anyag alkalmas az úgynevezett alap tömések (bulk fill) készítésére. Maximális réteg vastagság 4 mm. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Az anyag kötése

Ez a termék fény hatására köt meg. A megadott idő az átlagos időt jelenti. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Térfogat zsugorodás

A kötése során ennek a terméknek a megjelölt százalékban zsugorodik a térfogata.



VTT

Fotopolimerizáció előtt translucens – a természetes fog színéhez illő esztétikus opacitás fotopolimerizáció után.



Az alkalmazás módja

A ragasztó rendszer (bond) használata előtt a fog felületének külön savazása nem szükséges. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Az alkalmazás módja

A ragasztó rendszer (bond) használata előtt a fog felületének külön savazására van szükség. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Az alkalmazás módja

Ennek az anyagnak az alkalmazása előtt a fogfelszín előkészítő kondicionálása nem szükséges. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



Töltőanyag tartalom

Ez a termék a jelzett tömeg százalékban tartalmaz töltőanyagot.



Az anyag keménysége

Ez a termék a feltüntetett Shore-A keménységgel rendelkezik.



Anyagkompatibilitás

Ez a termék a megjelölt anyagokkal együtt is használható. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



CAD / CAM

Ez a termék digitális fogászati alkalmazásra alkalmas. Részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.



A kommunikációs adatok formátuma

Ez a termék a megjelölt adatformátumot dolgozza fel.



Nem üledékes

Ez a termék nem üledékes. A termék lehetővé teszi homogén oldatból készült tárgyak additive gyártását a teljes nyomtatási folyamat alatt.



Folyékony Injektálós Technika

Ez a termék alkalmas a Folyékony Injektálós Technika alkalmazására. A FIT anyagot átlátszó szilikon kulcsra keresztül applikálják.



Fluoreszcencia

Kiváló láthatóság az aktiválható fluoreszcenciának (UVA fény) köszönhetően.



Láthatatlan Rétegzéses Technológia

Ez a termék a fog természetes színátmenetét utánozza. Az egyes rétegek zökkenőmentesen illeszkednek egymásba, amely rendkívül esztétikus színátmenetet eredményez.

MEGELŐZÉS

Védelem. Gondoskodás. Konzerválás.

Az egészséges fogazat nagy érték, és hogy sokáig egészségesek is maradjanak, Ön és a páciensei velünk együtt sokat tehet a közös cél érdekében. A VOCO termékek jelentős mértékben hozzájárulnak ehhez a sikerhez. A fluorid lakkok sokféle indikációban felhasználhatóak. A barázdazárók a magas töltőanyag-tartalom mellett átláthatóságot is kínálnak. Találhat még azonnal ható deszenzibilizálókat, különböző erősségű tisztító pasztákat. Nem számít, melyik terméket választja, mindig a helyes döntést fogja meghozni. A fogfehérítés területén is teljes sorozatot kínálunk, amelyek használatával meggyőző eredményt érhet el, akár a rendelői, akár az otthoni fehérítést választja.



MEGELŐZÉS

Fogtisztítás				
Oldal	fluorid tartalom	RDA érték	ízesítés	kiszerelés
7	Cleanjoy 700 ppm	durva (195), közepes (127), finom (16)	menta, karamell, cseresznye	tubus
sajátosságok				
xilít, „forgalmai jelzőlámpa kódolás”				

Barázdázárók				
Oldal	tömeg %	opák		
8	Grandio Seal 70 tömeg %	•		
9	Fissurit FX 55 tömeg %	•		
9	Fissurit F nincs megadva	•		

Fluoridálás · deszenzibilizálás				
Oldal	Fluoridálás	deszenzibilizálás	fluoridtartalom	kiszerelés
ízesítés				
10	Bifluorid 10	•	22,600 ppm	SingleDose, flakon
11	Remin Pro	•	1,450 ppm	tubus
12	VOCO Profluorid Varnish + BioMin	•	22,600 ppm	SingleDose, tubus
13	VOCO Profluorid Varnish	•	22,600 ppm	SingleDose, tubus, patron
14	VOCO Perfect Protect	•	1,130 ppm	fecskendő
11	Admira Protect	•	•	flakon
klinikai				
menta, dinnye, karamell, cseresznye, rágógumi, cola lime, pina colada				
klinikai				

Fogfehérítés				
Oldal	karbamid-peroxid	hidrogén-peroxid	otthoni	rendelői
15	Perfect Bleach 10 % / 16 %	egyenértékű: 3,5 % / 6 %	•	•
15	Perfect Bleach Office+ 35 %	35 %		•

CleanJoy®

Fluorid tartalmú fogtisztító és polírozó paszta három tisztítási fokozatban



Javallatok

Puha és kemény felületi lepedék eltávolítása

Külső eredetű elszíneződések (pl. festék, kávé, tea és dohány) eltávolítása

A fogfelszín polírozása professzionális fogtisztítás részeként, fogfehérítés előtt, vagy fogszabályozó eszközök eltávolítását követően

Fogpótlások tisztítása és polírozása professzionális fogtisztítás részeként

Ideiglenes ragasztó anyag maradványainak eltávolítása végleges beragasztás (cementezés) előtt

Előnyei

- Stabil, homogén állag
- Nem fröccsen (2.000 - 3.000 fordulat / perc)
- Nem tartalmaz parabént
- Három tisztítási fokozatban érhető el – külön-külön is alkalmazható, igazodva minden helyzethez
- RDA értékek (mérés a DIN EN ISO 11609 szerint)
 - durva (piros) RDA = 195
 - közepes (sárga) RDA = 127
 - finom (zöld) RDA = 16
- Forgalmi lámpa színkódolás: egyszerű a használata összetévesztés nélkül
- Használható bármilyen hagyományos eszközzel (kis kefe, kehely stb)
- Tartalmaz fluoridot (700 ppm) és xilitet
- Három kellemes íz: menta, karamell, cseresznye

Applikáció



Enyhe külső elszíneződés az alsó anterior területen



A sárga tisztítópaszta használata után a zöld polírozó pasztával befejezve



Tiszta és sima fogfelszín



Durva (piros)	
Íz	Tubus 100 g
Menta	REF 2092
Karamell	REF 6092
Cseresznye	REF 6100
Közepes (sárga)	
Íz	Tubus 100 g
Menta	REF 2091
Karamell	REF 6091
Cseresznye	REF 6099
Finom (zöld)	
Íz	Tubus 100 g
Menta	REF 2090
Karamell	REF 6090
Cseresznye	REF 6098
REF 2089	Tubus 4 x 100 g finom (zöld), Menta

Grandio® Seal

Fényre kötő nano-hibrid barázdázó anyag



Javallatok

Ragasztásra / tömésre gödrök, barázdák esetén

Sérült zománc felszínek fedésére

Fogszabályozó kezelés alatt a kariesz predilekciós helyeinek fedésére

Tejfogak sealerezésére


Előnyei

- Az optimális folyékonyság eléréséhez nano-töltő anyagot használtak
- Osztályában a legmagasabb, 70 % töltőanyagot tartalmaz
- Kiváló fizikai tulajdonságok:
 - alacsony kopás
 - nagy hajlítószilárdság
 - rendkívül alacsony zsugorodási érték
- Kitűnő kezelhetőség
- Optimális nedvesítő képesség
- Tökéletes széli záródás
- Ideális kompozit vagy üveg ionomer tömések fedésére (nedvesség elleni védő réteggént)

Grandio® Seal NDT® fecskendőben

- NDT® non-dropping (nem elcseppenő) technológiát jelent
- Különösen finoman folyik az anyag
- Precízen lehet adagolni és alkalmazni
- Anyagvesztés nélkül

Klinikai eset

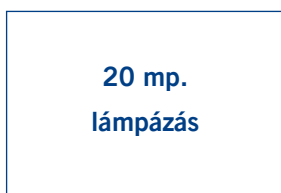

20 mp.
lámpázás

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazília

Fissurit® FX

Megemelt töltőanyag tartalmú fényre kötő barázdazáró anyag fluoriddal, fehér



Javallatok

Ragasztásra/tömesre gödrök, barázdák esetén, valamint kisebb kavitások ellátására

Sérült zománc felszínek fedésére

Fogszabályozó készülékek rögzítése, a caries predilekciós helyeinek fedésére fogszabályozó kezelés alatt

Kompozit és cement tömések fedésére (nedvesség elleni védőréteggént)

Kárieszes léziók ideiglenes zárása

Kompozit és amalgám tömések kis defektusainak helyreállítása

Tejfogak barázdazárása

Előnyei

- 55 % töltőanyag-tartalom a kiváló kopásállóság érdekében
- Gyors és könnyű alkalmazás, fecskendőből, hajlítható fém kanüllel
- Optimális viszkozitás
- Nagy stabilitás és jó tapadás a zománchoz
- Tökéletes széli záródás
- Folyamatos fluorid leadás
- Fehér szín a kontrollálhatósághoz



REF 1181	Fecskendő 2 x 2,5 g, tartozékok
REF 2145	Applikációs kanülök 40-es típus, 100 db

Fissurit® F

Fényre kötő barázdazáró anyag fluoriddal, fehér



Javallatok

Fisszúrák és gödröcskék, valamint kis kavitások zárása/tömése

Sérült zománcfelületek zárására/fedésére

Fogszabályozó készülékek rögzítése, a caries predilekciós helyeinek fedésére fogszabályozó kezelés alatt

Kompozit és cement tömések fedésére (nedvesség elleni védőréteggént)

Kárieszes léziók zárása a stagnáló állapot fenntartásához

Kompozit- és amalgám tömések kis defektusainak helyreállítása

Tejfogak barázdazárása

Előnyei

- Gyors és egyszerű applikálás az "el nem cseppenő" NDT® fecskendőből
- Fehér szín a könnyebb kontrollhoz
- Alacsony viszkozitás, hígan folyik
- Nagy stabilitás, jól tapad a zománchoz
- Tökéletes széli záródás
- Folyamatos fluorid leadás



REF 1180	Flakon 2 x 3 ml
REF 1292	Fecskendő 2 x 2 g, tartozékok
REF 1293	Készlet fecskendő 5 x 2 g, Vococid gél fecskendő 5 ml, Vococid flakon 2 x 3 ml, tartozékok
REF 2145	Applikációs kanülök 40-es típus, 100 db

Bifluorid 10®

Fluoridlakk túlérzékeny fogak kezelésére



Javallatok


Minden hiperszenzitivitás (dentin-túlérzékenység) kezelése, beleértve a következőket:

- a nyaki terület és a koronai szélek hiperszenzitivitása
- professzionális fogtisztítás és fogkőszedés utáni érzékenységre
- túlérzékenység a fogfelszín preparálása és / vagy a csiszolás után
- kopott okkluzális felszínek és olyan fogak túlérzékenységeinek kezelésére, melyeket kivethető pótlások kapcsai koptattak ki
- túlérzékenység zománcsérüléseket szenvedett fogaknál (pl.: törések, kicsorbult fogak)
- rebonding technikaként, a kavitás szélek restaurációk utáni zárására, különösen, ha savazásos technikát alkalmaztunk
- dentin védelemre / alábélelésre amalgámtöméseknél

Előnyei

- Rögtön csökkenti az érzékenységet
- Védő bevonatot képez a hő- és mechanikai hatások ellen
- Átlátszó, nem színezi el a fogat
- Speciális bázislakk hosszú távú hatást és mély fluoridálást biztosít
- Gazdaságos és egyszerű – magas hozam, alacsony ár, gyors applikáció
- Gyorsan szárad
- Gyantamentes
- 5 % nátrium-fluoridot (megfelel 22.600 ppm fluoridnak) és 5 % kalcium-fluoridot tartalmaz
- Fogfehérítéssel kompatibilis, csökkenti az érzékenységet a fogfehérítő kezelés akadályozása nélkül

Applikáció

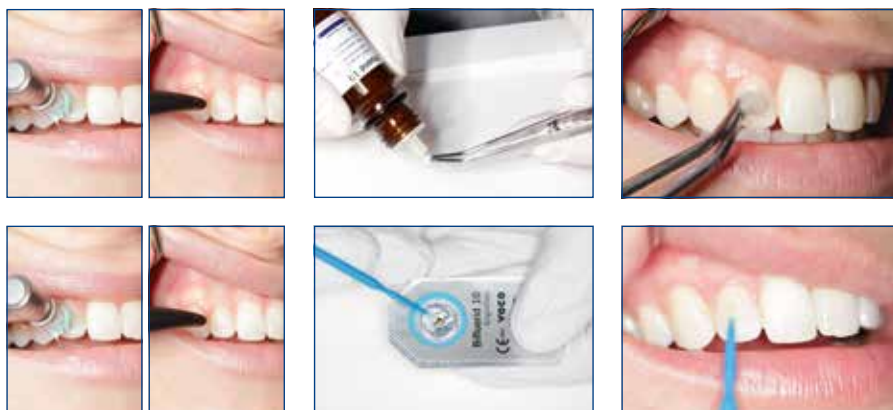

REF 1615	Flakon 4 g, Solvent flakon 10 ml
REF 1616	Flakon 10 g
REF 1617	Flakon 3 x 10 g, Solvent flakon 10 ml, Pele Tím No. 1
REF 1618	SingleDose 50 db, tartozékok
REF 1619	SingleDose 200 db, tartozékok
REF 1032	Solvent flakon 10 ml
REF 2247	Single Tím, applikációs pamacs, 100 db
REF 2252	Pele Tím, No. 1, 3.000 x ø 4 mm

Remin Pro®

Fluorid és hidroxilapatit tartalmú védő krém



Javallatok

Fogfehérítés után

Professzionális fogtisztítás után

Túlérzékenység megelőzésére és kontrolljára

Állkapocs-sebészeti kezelés alatt

Előnyei

- Fluoridot (1.450 ppm), hidroxilapatitot és xilitet tartalmaz
- Egyensúlyban tartja a száj flóráját, így megóvjaa a fogakat az erőteljes, káros savas behatásoktól
- Erősíti a fogakat a fehérítő kezelés és a professzionális tisztítás után
- 3 különböző ízben (dinnye, menta, eper)
- Naponta használható, különösen alkalmas otthoni használatra
- MIH esetén optimális



REF 2003	Tubus 12 × 40 g dinnye
REF 2004	Tubus 12 × 40 g menta
REF 2005	Tubus 12 × 40 g eper
REF 2006	Tubus 12 × 40 g mixed
REF 2007	Tubus 3 × 40 g mixed

Admira® Protect

ORMOCER® bázisú fényre kötő védőlakk, az érzékeny fogak kezelésére



Javallatok

Dentin-túlérzékenység kezelésére

Fognyak illetve koronaszélek kezelésére

A fognyaki felszín kezelésére, professzionális fogtisztítás és fogkőszedés után

Előnyei

- Biokompatibilis
- A túlérzékenység tartós megszüntetése
- Biztos tapadás
- Nagyobb kopásállóság a speciális töltőanyag-technológiának köszönhetően
- Fluoridleadás



REF 1650	Flakon 4,5 ml, tartozékok
REF 2247	Single Tim, applikációs pamacs, 100 db

VOCO Profluorid® Varnish + BioMin®

Jelentősen megkeményíti a legyengült zománcot



A VOCO Profluorid Varnish + BioMin az évek óta létező és jól bevált, túlérzékenység csökkentő fluorid lakkunkon, a VOCO Profluorid Varnish-on alapszik. A "+ BioMin verzió" újdonsága a londoni székhelyű BioMin Technologies Ltd oldható bioüvegének hozzáadása.

A BioMin bioüveg feloldódik a nyálban, és kalcium- és foszfátionokat szabadít fel, amelyek támogatják a fog remineralizációját. A lakkból származó fluoriddal kombinálódva kristályos szerkezeteket hoznak létre a fog felszínén, amelyek jelentősen megkeményítik a például a savaktól legyengített zománcot.

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin így kettős védelmet nyújt a betegeknek: a VOCO Profluorid Varnish + BioMin kristályos védőrétege a fentebb leírt tulajdonságai szerint a fluorid tartalmának köszönhetően is támogatja az érzékeny fogak átfogó és hosszan tartó deszenzibilizációját.

Javallatok

- Túlérzékeny fogak kezelése
- Érzékeny gyökérfelszín kezelése
- A remineralizáció támogatása

Előnyei

- Jelentősen megkeményíti a legyengült zománcot
- Megbízható deszenzibilizáció az 5 % NaF ($\triangleq$ 22.600 ppm fluoridnak) köszönhetően
- Esztétikus, fogszerű lakk
- Négy ízben kapható: menta, cseresznye, karamell és rágógumi
- Ideális a nyaki területek kezelésére professzionális tisztítás és fogkö eltávolítás után
- MIH betegeknél is használható
- Gazdaságos, vékony rétegben applikálva is jó eredményt biztosít




Tubus		
Íz	10 ml	
Karamell	REF 2266	
Cseresznye	REF 2267	
Menta	REF 2268	
Rágógumi	REF 2269	
<i>SingleDose</i>		
Íz	50 x 0,40 ml	200 x 0,40 ml
Karamell	REF 2270	REF 2276
Cseresznye	REF 2271	REF 2277
Menta	REF 2272	REF 2278
Rágógumi	REF 2273	REF 2279
Íz	48 x 0,40 ml	
Mixed	REF 2274	



VOCO Profluorid® Varnish

Fluorid tartalmú lakk érzékenység kezelésére (5 % NaF)

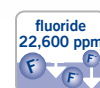

Javallatok

Túlérzékeny fogak kezelésére
Érzékeny gyökérfelszín kezelése

Előnyei

- Nedvesség tűrő
- Esztétikus fogszínű lakk
- Gyors deszenzibilizáció és fluoridleadás (5 % NaF $\triangleq$ 22.600 ppm fluorid)
- Hét kellemes ízben kapható: dinnye, menta, cseresznye, karamell, rágógumi, cola lime és pina colada
- Ideális fognyaki felszínek kezelésére professzionális fogtisztítás és fogköszedés után
- MIH esetén optimális

A SingleDose kiszerezés előnyei

- Egyszerű, gyors és higiénikus
- Más eszközt nem igényel
- Semmilyen pozícióban nem ömlik ki

A patronos változat előnyei

- Sokoldalú használhatóság, eldobható kanülök
- Tökéletesen pontos applikálás
- Rendkívül könnyű alkalmazás proximális területeken
- Tökéletes fluorid applikálás mindössze egyetlen egyszerű lépésben

Applikáció



SingleDose			
Íz	50 x 0,40 ml	200 x 0,40 ml	
Dinnye	REF 1269	REF 1271	
Karamell	REF 2226	REF 2229	
Cseresznye	REF 2227	REF 2230	
Menta	REF 2228	REF 2231	
Rágógumi	REF 2238	REF 2239	
Cola Lime	REF 2240	REF 2241	
Pina Colada	REF 2242	REF 2243	
Íz	48 x 0,40 ml	50 x 0,25 ml	
Dinnye	–	REF 1268	
Mixed	REF 2225	–	
Patron			
Íz	5 x 1,70 ml		
Dinnye	REF 2235		
REF 2167	Applikációs kanülök 43-as típus, 100 db		
Tubus			
Íz	10 ml	50 ml	
Dinnye	REF 1267	REF 1272	
Karamell	REF 2232	–	
Cseresznye	REF 2233	–	
Menta	REF 2234	–	
Cola Lime	REF 2236	–	
Pina Colada	REF 2237	–	
Íz	4 x 10 ml		
Mixed	REF 2971		

Profilaxis készlet

Minden az egyben – professzionális profilaxis termékek egyetlen készletben a VOCO-tól



Javallatok

További információ a javallatokról a CleanJoy, a Remin Pro, a VOCO Profluorid Varnish lakk és a Grandio Seal termékoldalon található

Előnyei

- Fluoridál. Véd. Ápol. Lezár
- Egyéni profilaxis esetén is
- Különböző ízek a teszteléshez
- Napi és speciális alkalmazásra

REF 2996 Készlet CleanJoy tubus 2 × 100 g, Remin Pro tubus 40 g, Profluorid Varnish *SingleDose* 12 × 0,4 ml, Grandio Seal fecskendő 2 × 2 g

A termék kiszemelése változhat

VOCO Perfect Protect®

Deszenzibilizáló gél fogfehéritéshez



Az otthoni fogfehérités tökéletes kiegészítője!

A VOCO Perfect Protect otthoni használatra alkalmas, az otthoni fogfehérités körülményeihez igazodó deszenzibilizáló gél. 3% kálium-nitrátot ($\pm$ 11 600 ppm) és 0,11 % fluoridot ($\pm$ 1 130 ppm) tartalmaz, így megbízhatóan hozzájárul az érzékeny fogak deszenzitivációjához. Míg a kálium-nitrát a túlérzékeny fogak fájdalomcsillapítását segíti, addig a fluorid a nyitott dentintubulusok lezárását támogatja, így kezelve a túlérzékenységet okát.

Javallatok

A szabadon lévő dentin lezárása

Előnyei

- Megbízható deszenzibilizáció, a dentintubulusok tehermentesítése és lezárása
- Fogfehéritő sínbe aplikálható, rövid és változtatható alkalmazási idő (15–60 perc)
- Semleges íz
- Kellemes konzisztencia
- A sín feltöltése egyszerű a csomagban mellékelt, előre összeszerelt kanül segítségével



REF 1019 Fecskendő 2 × 2 ml

Perfect Bleach®

Fehérítő zselé elszíneződött fogakra (10 % / 16 % karbamid-peroxiddal)



Javallatok

Kíméletes és tartós fogfehérítés élő és elhalt fogakhoz, pl. gyógyszerrel, fluorózzal, élelmiszertől, traumától, öregedéstől keletkezett fogelszíneződésekre

Előnyei

- Egyszerű, könnyen használható
- Kíméletes a foganyaghoz és a meglévő restaurációkhoz
- Egyértelmű fehérítő eredmény már rövid idő után
- Kellemes menta íz
- Tetszetős kiszerelés kozmetikai táskában

Perfect Bleach® 10 %

- REF 1658 Mini készlet fecskendő 4 × 2,4 ml 10 %-os karbamid peroxiddal, tároló doboz, kozmetikai táska
- REF 1662 Fecskendő 3 × 2,4 ml 10 %-os karbamid peroxiddal

Perfect Bleach® 16 %

- REF 1659 Mini készlet fecskendő 4 × 2,4 ml 16 %-os karbamid peroxiddal, tároló doboz, kozmetikai táska
- REF 1664 Készlet fecskendő 6 × 2,4 ml 16 %-os karbamid peroxiddal, Block Out Gel LC fecskendő 1,2 ml, két sínező fólia, tároló doboz, kozmetikai táska, fogszínkulcs, tartozékok
- REF 1665 Fecskendő 3 × 2,4 ml 16 %-os karbamid peroxiddal

Perfect Bleach® Office+

Fehérítő zselé elszíneződött fogakra



35 %
H₂O₂

auto
mix

Javallatok

A Perfect Bleach Office+ alkalmas egyetlen vagy több elszíneződött, vitális vagy devitalizált fog fehérítésére. A fehérítés sikere függ a természetes fogszíntől, valamint az elszíneződés intenzitásától. Fehéríteni a szerves eredetű elszíneződéseket lehet, amelyeket általában a következők okoznak:

- trauma okozta elszíneződés
- gyógyszerek okozta elszíneződés (pl. tetraciklin)

A szervetlen eredetű elszíneződések, mint például az amalgám (ezüst), nem lehet fehéríteni, ahogyan a pótlásokat sem

Előnyei

- 35 %-os hidrogénperoxid koncentráció az elszíneződések biztonságos és gyors fehérítéséért
- Vörös színének köszönhetően jó a kontraszt a fog és az LC Dam közt
- Külső és belső fehérítésre is használható
- Perfect Bleach Office+ a praktikus QuickMix fecskendőben
 - csak a szükséges mennyiségű gélt kell aktiválni
 - nincs keverési hiba, a zselé mindig friss
- Fényre kötés közben az ínyvédő nem forrósodik fel

- REF 1672 Készlet QuickMix fecskendő 2 × 4 ml, LC Dam fecskendő 2 × 2 g, tartozékok
- REF 1673 QuickMix fecskendő 4 ml, tartozékok
- REF 1655 LC Dam fecskendő 2 g, tartozékok
- REF 2194 Keverő kanülök 14-es típus, 50 db
- REF 2195 Keverő kanülök 15-ös típus (1-es típusú intraorális véggel), 50 db
- REF 2146 Applikációs kanülök 41-es típus, 100 db



Direkt restaurációk anyagai

Stabilitás. Esztétika. Gazdaságosság.

A konzerváló fogászat egyszerre igényli a fogorvos szakértelmét és a tökéletesen megbízható, kiváló minőségű tömőanyagokat. A direkt restaurációkhoz a VOCO számos anyag osztályban sokféle indikációra kínálja anyagait. Azonban minden tömőanyagunknak van egy közös jellemzője, legyen az akár kompozit, kompomer, ORMOCER®, üveginomer alábélelő, ragasztó anyag vagy üvegszál szalag: garantált, hogy a végeredményt a stabilitás és a tartósság jellemzi majd. Ezen felül a páciensek sugárzóan szép mosolyt szertnének. Termékeink, miközben könnyen felhasználhatók és gyorsan applikálhatók, a velük készült restaurációk kiszámíthatók, tervezhetők és esztétikusak lesznek.



MTA vpt

Anyag a vitális pulpaterápia számára



Javallatok

Minden tömőanyaghoz használható alábélelő cement

Közvetett pulpasapkázás

Közvetlen pulpasapkázás

A pulpa kezelése vitál amputáció után

Előnyei

- MTA a mindennapi klinikai praxishoz – biokompatibilis, monomer mentes
- Magas pH-érték (12) – bakteriosztatikus hatásáról ismert
- Kalcium- és hidroxidionok felszabadítása – elősegíti a harmadlagos dentin képződését és a remineralizációt
- Megbízható pulpavédelem – mineralizálódik, és baktériumálló réteget képez
- Időtakarékos – a nyomás nélküli rétegezésnek köszönhetően azonnal folytatható a munkaművelet
- Könnyű kezelhetőség – applikálás standard műszerekkel vagy közvetlenül a kapszulából
- Nem okoz elszíneződést – bizmut-oxidtól és vasvegyületektől mentes
- Radiópák (290 % AI)



REF 1645 Por 10 g / folyadék 10 ml
REF 1646 Applikációs kapszula 25 db
(elérhető 2025.06.01-től)

Applikáció




vagy



Applikálás


Applikálás

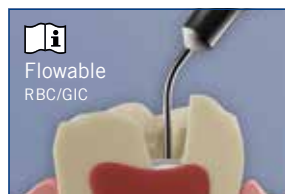

Nyomásmentes rétegezés azonnal az adaptáció befejezése után



A folyékony anyag fotopolimerizálása

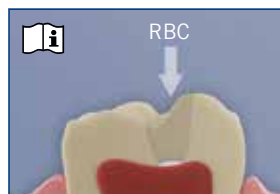

A helyreállítás folytatása felépítéssel

RBC = Resin Based Composite

Calcimol LC

Fényre kötő, röntgenárnyékot adó kalcium hidroxid paszta



Javallatok

Indirekt pulpasapkázás

Alábélelés minden tömőanyaghoz

Előnyei

- Hatásos pulpavédelem
- Használatra kész egykomponensű anyag
- Időtakarékos, fényre kötő és direkt applikálású NDT®-fecskendőből
- Savakkal szembeni magas szintű ellenálló képesség, védelem a teljes savazásos technika alkalmazása során
- Elősegíti a terciér dentin képződését



REF 1047	Tubus 2 x 5 g
REF 1307	Fecskendő 2 x 2,5 g, tartozékok
REF 2146	Applikációs kanülök 41-es típus, 100 db

Calcicur®

Használatra kész kalcium hidroxid paszta



Javallatok

Indirekt pulpasapkázás kariesz profunda esetén

Direkt pulpasapkázás nyitott pulpa vagy pulpotomia után

Kavitás alábélelés, fogvédelem a cementalábélelés során felszabaduló savakkal szemben

A gyökércsatorna ideiglenes tömése

Előnyei

- Bármilyen alábélelő vagy restaurációs anyaggal használható
- Azonnali használatra kész
- Bakteriosztatikus hatás a magas pH-értékének (12,5) köszönhetően
- Kalcium hidroxid tartalma 45 %
- Röntgenárnyékot ad
- Elősegíti a terciér dentin képződését
- Hatékony pulpa védelem



REF 1093	Fecskendő 2,5 g, tartozékok
REF 1096	Fecskendő 3 x 2,5 g, tartozékok
REF 2131	Applikációs kanülök 47-es típus, 30 db

Ionoseal®

Fényre kötő, üveg ionomer – kompozit alábélelő



Javallatok


Minden típusú tömőanyag alábélelésére

Kiterjesztett barázda zárására

Kisebb hiányok helyreállítására

Előnyei

- Azonnal használható, egykomponensű anyag
- Időtakarékos, fényre másodpercek alatt megköt
- Gyors és higiénikus alkalmazás
- Nagy szilárdság (226 MPa)
- Fluoridleadás a másodlagos szuvasodás megelőzésére
- Nagyfokú biokompatibilitás
- Röntgenárnyékot ad

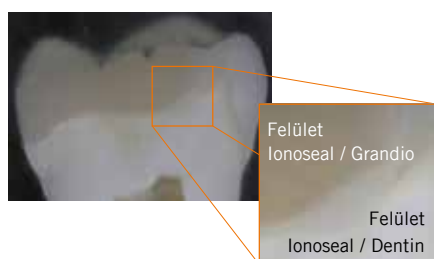

Az Ionoseal erős opacitása látható a 28-as fogon



A kemény fogszövet, az Ionoseal és a helyreállító anyag (Grandio) közötti rés mentes kapcsolat – mikroszkópos keresztmetszeti felvétel

Klinikai eset



Preparált kavitás



Az Ionoseal közvetlen applikálása



A kész alábélelés



A befejezett restauráció

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazília



REF 1126	Tubus 2 × 4 g
REF 1326	Fecskendő 3 × 2,5 g, tartozékok
REF 2146	Applikációs kanülök 41-es típus, 100 db

Bondok

					Savazás és őblítés					
Oldal	Termékleírás	Komponensek	Palackok száma	SingleDose mennyisége	Önsavazás	Szelektív savazás	Teljes savazás	Fényre kötés	Kettős kötés	Fotopolimerizálási idő
Bondok										
21	Futurabond U	Kettős kötésű univerzális ragasztóanyag	2	2	1	•	•	•	•	10 sec.
22	Futurabond M+	Univerzális ragasztóanyag	1	2		•	•	•	• ¹	10 sec.
23	Futurabond DC	Kettős kötésű önsavazó nanoszemcsékkel megerősített ragasztóanyag	2	2	1	•			•	10 sec.
24	Admira Bond	Egy komponensű ORMOCER® bázisú dentin- és zománctragasztó	1	1			•	•		20 sec.
24	Solobond M	Fényre kötő, egy komponensű dentin- és zománctragasztó	1	1			•	•		20 sec.

¹ csak DC aktivátorral együtt kombinálva

Futurabond® U

Kettős kötésű univerzális ragasztóanyag



Javallatok

Direkt és indirekt restaurációk bármilyen fényre kötő, önkötő vagy kettős kötésű, metakrilát alapú restaurációs anyaggal, csomkfelépítés vagy ragasztás kompozittal
Tömések, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások intraorális javítása kiegészítő primer nélkül

Túlérzékeny fogak kezelése a fognyaki részen

Üvegionomer cement tömések védő lakkozása

Üregek lezárása amalgám tömések előtt, vagy az ideiglenes ragasztást megelőzően

Futurabond U SingleDose / Futurabond U bottle DCA-val kombinálva

(Kettős kötésű aktivátor):

Direkt és indirekt restaurációk bármilyen önkötő vagy kettős kötésű metakrilát alapú helyreállító anyag felhasználásával, csomkfelépítő vagy ragasztókompozitokkal

Gyökércsapok ragasztása kettős vagy önkötő ragasztókompozitokkal


Előnyei

- Egyetlen bond minden esethez! Minden más adhezívet feleslegessé tesz a paraxisban!
- Önsavazás, szelektív savazás vagy teljes savazás: a felhasználó szabadon választhat
- Az applikálás kiemelkedő sokoldalúsága
 - Direkt vagy indirekt restaurációk
 - Teljesen kompatibilis az összes fényre kötő, kettős kötésű vagy önkötő, metakrilát bázisú kompozittal
 - Megbízható adhézio a különböző anyagokkal, úgy a fémekkel, cirkónium-dioxid, vagy alumínium oxiddal, amint a szilikát kerámiákkal is, kiegészítő primer nélkül
 - Túlérzékeny fogak kezelése a fognyaki részen
 - Üvegionomer cement tömések védő lakkozása stb
- Egy rétegben applikálható – mindössze 35 másodperc teljes munkaidő alatt
- Kiváló adhézio minden más univerzális, ön-, vagy teljes savazásos adhezívhez
- Nedvesség tűrő
- Nem igényel hűtést

Futurabond® U praktikus SingleDose kiszerelésben

- Egyszerű, gyors és higiénikus

Tegye egyszerűvé! Egyetlen nyomás – hosszantartó ragasztás!

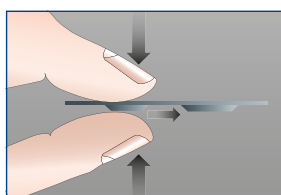

REF 1571	SingleDose 50 db, tartozékok
REF 1572	SingleDose 200 db, tartozékok
REF 1574	SingleDose próba készlet (SingleDose 20 db, Vococid gél fecskendő 2 ml, tartozékok)
REF 2246	Endo Tim applikációs ecset a foggyökéren belül használható, 50 db
REF 2247	Single Tim, applikációs ecset, 100 db
REF 1577	Futurabond U bottle – ÚJ flakon 5 ml
REF 1578	Futurabond U bottle DCA – ÚJ flakon 2 ml

Futurabond® M+

Univerzális ragasztóanyag



Javallatok

Direkt és indirekt restaurációk minden fényre kötő metakrilát alapú tömőanyaggal, csontfelépítővel és ragasztó kompozitokkal

Kiegészítő primer nélkül alkalmazható tömések, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások intraorális javítására

Túlérzékeny fogak kezelésére a fognyaki részen


Üvegionomer cement pótlások védőlakkozására

Üregek lezárására amalgám tömések és ideiglenes ragasztások előtt

A Futurabond® M+ DCA (Dual Cure Activator) kombinált használata:

Direkt és indirekt restaurációk bármely önkötő vagy kettős kötésű metakrilát alapú helyreállító, csontfelépítő vagy ragasztó kompozittal

Gyökércsapok ragasztása kettős kötésű vagy önkötő ragasztó kompozitokkal

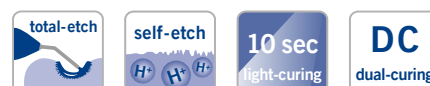

REF 1515	Flakon 5 ml, tartozékok
REF 1516	Flakon 3 x 5 ml
REF 1518	Futurabond M+ DCA – flakon 2 ml
REF 1519	Együveges 5 ml
REF 2246	Endo Tim applikációs ecset a foggyökéren belül használható, 50 db
REF 2247	Single Tim, applikációs ecset, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db

Szabadon választható savazásos technika:

- ✓ Önsavazás
- ✓ Szelektív savazás
- ✓ Teljes savazás

Direkt és indirekt

restaurációk bármilyen fényre kötő, önkötő vagy kettős kötésű, metakrilát alapú kompozithoz.*

Egy rétegben applikálható – mindössze **35 másodperc** teljes munkaidő.



Több mint **250 applikálás**ra elegendő tartalom.

Kedvező nedvesítő tulajdonsága biztosítja a dentintubulusok megbízható lezárását – nincs posztoperatív érzékenység.

Intraorális javítás

tömések, kerámia héjak és teljes kerámia pótlások

* a Futurabond M+ DCA-val (kettős kötésű aktivátor) kombinálva ön- vagy kettős kötésű kompozitok használatakor

Futurabond® DC

Kettős kötésű önsavazó nanoszemcsékkel megerősített ragasztóanyag



Javallatok

Önkötő vagy kettős kötésű kompozit restaurációk és csontfelépítés
Fényre kötő kompozit / kompomer / ORMOCER®-alapú restaurációk
Gyökércsapok rögzítésére kettőskötésű vagy önkötő kompozitokkal
Indirekt restaurációk beragasztására kettős kötésű vagy önkötő kompozitokkal, inlay, onlay, koronák és hidak beragasztása

Előnyei

- Kémiai kötés a polimerizációs lámpa fénye számára elérhetetlen területeken
- A Futurabond DC a foganyag kiegészítő savazása nélkül eléri a total-etch technika ragasztási tulajdonságait
- Nedvességtűrő
- Tartós széli záródás
- Könnyű és gyors alkalmazás – egy réteg-egyszeri világítás
- Fluoridot tartalmaz
- Nem szükséges hűvös helyen tárolni
- Ideális a gyermekfogászatban is



REF 1163	Flakon 2 × 4 ml (folyadék 1 / folyadék 2), tartozékok
REF 1164	SingleDose 50 db, tartozékok
REF 1165	SingleDose 200 db, tartozékok
REF 2246	Endo Tim applikációs ecset a foggyökéren belül használható, 50 db
REF 2247	Single Tim, applikációs ecset, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db

Vococid®

Gél (zselé) a zománc maratására

Javallatok

Savazó gél / folyadék zománc maratásos vagy teljes-maratásos technikához

Előnyei

- Rendelhető folyadék (36,1 %-os foszforsav) vagy gél (35 %-os foszforsav) tartalommal
- Kék színű az applikálás közbeni ellenőrzéshez
- Stabil, nem csepegő gél állag
- 60 ml-es fecskendő raktározható



REF 1063	Fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 1224	Fecskendő 5 × 2 ml, tartozékok
REF 1256	Üres fecskendő 10 × 2 ml
REF 1257	Fecskendő 60 ml, üres fecskendő 2 × 2 ml, tartozékok
REF 2310	Applikációs kanülök 42-es típus, 30 db
REF 2132	Applikációs kanülök 48-as típus, 50 db

Admira® Bond

Egy komponensű ORMOCER® bázisú dentin -és zománcragasztó



Javallatok

Direkt töméskészítés bármilyen típusú fényre kötő tömőanyaggal (ORMOCER®, kompozit, kompomer)

Előnyei

- ORMOCER®-bázisú
- Erős kötés és tartós széli záródás
- Egy komponens – egy réteg
- Minden fényre kötő tömőanyaggal használható



REF 2432	Flakon 2 x 4 ml
REF 2479	Flakon 4 ml

Solobond M

Fényre kötő, egy komponensű dentin- és zománcragasztó



Javallatok

Direkt restauráció valamennyi üreg osztályban, minden fényre kötő tömőanyaggal

Előnyei

- Egy komponens – egy réteg
- Kiváló kötés
- Nagyfokú rugalmasság és maradandó széli záródás
- Azonnal ragad a könnyű töméskészítés érdekében
- Minden fényre kötő tömőanyaghoz alkalmazható



REF 1226	Flakon 2 x 4 ml
REF 2249	Micro Tim applikációs pamacs, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db
REF 2338	Ecsettartó egyszer használatos ecsetek és Micro Tim részére, 5 db

Tömőanyagok (Kompozitok)

			kavítás osztály					árnyalatok				árnyalatok						
			I	II	III	IV	V	alap / alábélelés	kiterjesz- tett baráz- dazárás	tejfog- restaurá- ció	csonkfel- építés	indirekt inlay-k, onlay-k, héjak	opák	univerzális	transzlucens	kiszerezési forma	anyagcsoport	töl- tőanyag tartalom tömeg %
ORMOCER®-ek																		
27	Admira Fusion 5	univerzális, egyszerűsített árnyalat rendszer / biokompatibilis	•	•	•	•	•	• ⁴	•	•	•	•		5		fecskendő, Caps	nano-hybrid	83
28	Admira Fusion	univerzális / esztétikus biokompatibilis	•	•	•	•	•	• ⁴	•	•	•	•	4	13	1	fecskendő, Caps	nano-hybrid	84
29	Admira Fusion Flow	esztétikus / biokompatibilis						•	•	•			2	9	1	NDT® fecskendő	nano-hybrid	74
30	Admira Fusion x-tra	gyors / biokompatibilis	•	•	•	•	•	• ⁴	•	•	•		1			fecskendő, Caps	nano-hybrid	84
31	Admira Fusion x-base	gyors / biokompatibilis	• ¹		•		•	• ⁴	•		•		1			NDT® fecskendő	nano-hybrid	72
Kompozitok																		
32	GrandioSO Unlimited	univerzális / esztétikus / egyszerűsített árnyalat rendszer	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1	6		fecskendő, Caps	nano-hybrid	91
33	GrandioSO	univerzális / esztétikus	•	•	•	•	•			•		•	3	13	1	fecskendő, Caps	nano-hybrid	89
34	GrandioSO Light Flow (niedrigviszkos)	pontos / esztétikus						•	•				2	5	1	NDT® fecskendő	nano-hybrid	76
34	GrandioSO Flow (mittelviszkos)	univerzális / esztétikus	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT® fecskendő, Caps	nano-hybrid	81
35	GrandioSO Heavy Flow (hochviszkos)	univerzális / esztétikus	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT® fecskendő, Caps	nano-hybrid	83
36	GrandioSO x-tra	bulk fill	•	•	•		•	• ⁴	•	•	•		4			fecskendő, Caps	nano-hybrid	86
37	VisCalor bulk	bulk fill / thermoviskózus	•	•	•	•	•	• ⁴	•	•	•		4			Caps	nano-hybrid	83
38	Grandio	univerzális	•	•	•	•	•			•	•	•	2	13	1	fecskendő, Caps	nano-hybrid	87
39	Grandio Flow	univerzális	• ¹	•	•	•	•	•	•				2	10		NDT® fecskendő, Caps	nano-hybrid	80
40	Amaris / Amaris Flow	magas esztétikájú / 2 rétegű rendszer	•	•	•	•	•					•	7	4		fecskendő, Caps	mikro-hybrid	80
41	Amaris Gingiva	magas esztétikájú / ginigiva színű					•						3	1		fecskendő	mikro-hybrid	80
42	x-tra base	bulk fill / folyékony	• ¹		•		•	• ⁴	•		•		2			NDT® fecskendő, Caps	mikro-hybrid	75
43	x-tra fil	bulk fill	•	•							•		1			fecskendő, Caps	mikro-hybrid	86
44	Polofil Supra		•	•	•	•	•					•	6	1		fecskendő	mikro-hybrid	77
Kompomerek																		
44	Twinky Star / Flow	színes / csillogó								•			8 ² /2 ²			NDT® fecskendő, Caps	kompomer	78 / 65

¹ kis ² színes / csillogó hatású ³ őrlőfogak / premolárisok ⁴ I + II osztály

Áttekintés az üveg ionomer restaurációs anyagainkról a 45. oldalon található.

AlignerFlow LC

Fluoreszcens kompozit alignerek rögzítéséhez

Javallatok

Aligner attachmentek gyártása
Alignerek retenciója
Lingválisi retainerek ragasztása
Rágófelszín felépítése


Előnyei

- Biztonságos csiszolás és eltávolítás UV-A fényben
- Tökéletes folyási jellemzők, pontos alkalmazás
- Fotopolimerizálás az átlátszó sablonon keresztül
- Stabil és kopásálló a teljes kezelési időszak alatt
- Kellemes esztétika a fogárnyalatokban

Klinikai eset



Attachmentek

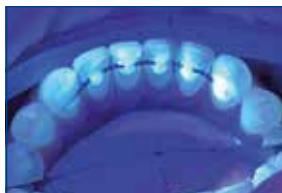

Linguális retainerek

Forrás: Montse Galiano, Egyesült Királyság



REF 1526	Fecskendő 2 x 2 g A1, tartozékok
REF 1527	Fecskendő 2 x 2 g A2, tartozékok
REF 1528	Fecskendő 2 x 2 g A3, tartozékok
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db
REF 2148	Applikációs kanülök 46-os típus, 100 db

Alfacomp LC

Fényre kötő csonkfelépítő és helyreállító anyag poszterior fogakhoz

Javallatok

I. és II. osztályú poszterior tömések készítéséhez
Csonkfelépítéshez

Előnyei

- A szürke szín révén láthatóan elkülönül a restauráció a fog kemény szövetétől
- Egyszerű applikálhatóság és kiváló fizikai tulajdonságok
- Erős röntgenárnyék
- Kompatibilis az összes fényre kötő dentin / zománc ragasztóanyaggal



REF 1058	Fecskendő 4 g
REF 1059	Caps 16 x 0,25 g

Admira® Fusion 5

Univerzális nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag
egyszerűsített színrendszerrel

Javallatok

Tömés I - V. osztályig

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

Traumásan sérült frontfogak rekonstrukciója

Elszíneződött frontfogak

Forma és színkorrekció az esztétikai hatás javítására

Meglazult fogak megerősítése, sínezés

Héjak javítása, kisebb zománcdefektusok és ideiglenes C&B-anyagok javítása

Kiterjesztett barázdazárás

Tejfogak tömése

Csonkfelépítés

Kompozit inlay-k

Előnyei

- Egyszerűsített színrendszer
 - az összes VITA® klasszikus árnyalat lefedhető mindössze 5 Cluster-Shad-del
 - jelentősen csökkentheti raktárkészletét
 - az új gyantamátrix fokozott kaméleonhatást tesz lehetővé a tökéletesített fényszóródás révén
- Univerzális
 - teljesen univerzális – a legmagasabb igényeknek is eleget tesz mind az anterior, mind a poszterior régiókban
- Könnyű és gyors kezelés
 - csak 10 másodperces fénykötés minden árnyalatnál
 - kiváló alakíthatóság, nem tapad a műszerhez
 - kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval
- Innovatív ORMOCER® technológia
 - tisztán kerámia alapú töltőanyag, vagyis a töltőanyagok és a rezin-mátrix is tisztán szilícium-oxid alapúak
 - kiváló biokompatibilitás, mivel nem tartalmaz klasszikus monomereket (nincs Bis-GMA [BPA], TEGDMA, UDMA stb.)
 - rendkívül stabil anyag, minden hagyományos restaurációs kompozithoz képest messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (1,25 térfogat %) és különösen alacsony zsugorodási stressz

Cluster-Shade-Rendszer

Admira Fusion 5	A1				A2		A3			A3.5					A4	
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4



REF 6243	Próbakészlet 10 × 0,2 g Caps (2 mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4), Futurabond U SingleDose 10 db, fogszínkulcs, tartozékok	
REF 6225	Készlet fecskendő 5 × 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs	
REF 6235	Caps 75 × 0,2 g (15 mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs	
Színek	Fecskendő 3 g	Caps 15 × 0,2 g
A1	REF 6227	REF 6237
A2	REF 6228	REF 6238
A3	REF 6229	REF 6239
A3.5	REF 6230	REF 6240
A4	REF 6231	REF 6241

Admira Fusion 5-tel tömött VITA fogak (Cluster-Shade A3.5)					
A3.5					
A3.5	C2	C3	D3	B4	

Admira® Fusion

Univerzális nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag



Javallatok

Tömés I - V. osztályig

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

Traumásan sérült frontfogak rekonstrukciója

Elszíneződött frontfogak

Forma és színkorrekció az esztétikai hatás javítására

Meglazult fogak megerősítése, sínezés

Héjak javítása, kisebb zománcdefektusok és ideiglenes C&B-anyagok javítása

Kiterjesztett barázdázás

Tejfogak tömése

Csonkfelépítés

Kompozit inlay-k

Előnyei

- A világ első tisztán kerámia alapú restaurációs anyaga
 - tiszta szilikát technológia, vagyis a töltőanyagok és a rezin-mátrix is tisztán szilícium-oxid alapúak
 - nem tartalmaz klasszikus monomereket (nincs Bis-GMA [BPA], TEGDMA, UDMA stb.)
- A leginnovatívabb ORMOCER® technológiának köszönhetően
 - összehasonlítva más, a kereskedelembe elérhető restaurációs kompozitokkal, messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (1,25 térfogat %) és különösen alacsony zsugorodási stressz
 - semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- Teljesen univerzálisan alkalmazható, a legmagasabb igényeknek is eleget tesz mind az anterior, mind a poszterior régiókban
 - a transzlucencia és az opacitás tökéletes összhangja természetes hatást eredményez
 - a színárnyalatok variálhatók egymással, vagy több színrétegzéses technika
- Kitűnő kezelhetőség, egyszerűen magas fényűre polírozhatóság, magas felületi keménység, ezek garantálják az első osztályú, hosszú távú eredményeket
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóanyaggal

Klinikai eset



Nem megfelelő amalgám restauráció a 46-os és 47-es fogakon




Az anyag modellezése, amely ebben a szakaszban még képlékeny



A kész, polírozott pótlások

Forrás: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brazília

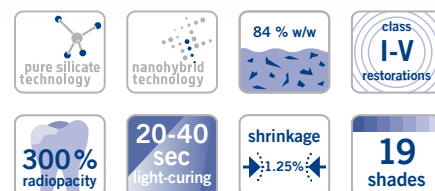

REF 2750	Készlet + ragasztóanyag fecskendő 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + Futurabond U SingleDose 20 db, tartozékok	
REF 2778	Próbakészlet Caps 9 x 0,2 g (3 x A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow fecskendő 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 x 0,2 g univerzális, tartozékok	
REF 2780	Készlet + ragasztóanyag Caps 75 x 0,2 g (15 x A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + Futurabond U SingleDose 20 db, tartozékok	
REF 2752	Fogszínkulcs	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Színek	Fecskendő 3 g	Caps 15 x 0,2 g
A1	REF 2754	REF 2782
A2	REF 2755	REF 2783
A3	REF 2756	REF 2784
A3.5	REF 2758	REF 2786
A4	REF 2759	REF 2787
B1	REF 2762	REF 2790
B2	REF 2763	REF 2791
B3	REF 2764	REF 2792
C2	REF 2766	REF 2794
D3	REF 2768	REF 2796
OA1	REF 2770	REF 2798
OA2	REF 2771	REF 2799
OA3	REF 2772	REF 2800
OA3.5	REF 2773	REF 2801
BL	REF 2775	REF 2803
BXL	REF 2777	REF 2805
Incizális	REF 2776	REF 2804
GA3.25	REF 2757	REF 2785
GA5	REF 2760	REF 2788
Mixed*	–	REF 2806

*(3 x B1, B3, D3, BL, incizális)

Admira® Fusion Flow

Folyékony, fényre keményedő nanohibrid ORMOCER® tömőanyag



Javallatok

Kisebb kavitások tömése és kiterjesztett barázdázás

Alámenős részek blokkolása

Alábélelés

III - V. osztályú kavitások tömése

Tömések és héjak javítása, ideiglenes restauráció

Áttetsző protetikai munkák ragasztása

Meglazult fogak megerősítése, sínezése

Előnyei

- A világ első tisztán kerámia alapú folyékony restaurációs anyaga
 - tiszta szilikát technológia, vagyis a töltőanyagok és a rezin-mátrix is tisztán szilícium-oxid alapúak
 - nem tartalmaz klasszikus monomereket
- A leginnovatívabb ORMOCER® technológiának köszönhetően
 - összehasonlítva más, a kereskedelembe elérhető restaurációs folyékony kompozitokkal, messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (2,75 térfogat %) és különösen alacsony zsugorodási stressz
 - semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- „Flow on demand” az anyag csak nyomás alatt válik folyékonnyá. Amikor az alkalmazás befejeződött, elég stabil ahhoz, hogy ne folyjon ki a kavitásból.
- A kiváló folyási jellemzők biztosítják az egész kavitás kiváló benedvesítését. A VOCO által szabadalmaztatott NDT® fecskendőben áll rendelkezésre, amelyből az anyag nem fut ki, nem csöpög, ezzel garantálva a biztonságos és pontos alkalmazást. A nemkívánatos anyagvesztés tehát a múlté.
- 12 árnyalat az esztétikus restaurációkhoz – és tökéletesen illeszkedik a tömöríthető Admira Fusion-hoz
- Kitűnő kezelhetőség, egyszerűen magas fényűre polírozhatóság, magas felületi keménység, ezek garantálják az első osztályú, hosszú távú eredményeket
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóanyaggal

Klinikai eset



Mesialis káriesz a 12-es fagon, disto-palatinális káriesz a 11-es fagon



Az Admira Fusion Flow egyszerűen applikálható és kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkezik



Az Admira Fusion Flow / Admira Fusion segítségével elért kiváló eredmény

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország



REF 2816	Készlet fecskendő 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0), fogszínkulcs, tartozékok
REF 2146	Applikációs kanülök 41-es típus, 100 db
Színek	Fecskendő 2 x 2 g
A1	REF 2818
A2	REF 2819
A3	REF 2820
A3.5	REF 2821
A4	REF 2822
B1	REF 2824
B2	REF 2825
C2	REF 2826
Incizális	REF 2828
OA2	REF 2829
BL	REF 2831
W0	REF 2832

Admira® Fusion x-tra

Nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag, 4 mm



Javallatok

I. és II. osztályú poszterior restaurációk készítése

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

V osztályú tömések


Meglazult fogak megerősítése, sínézés

Héjak javítása, kisebb zománcdefektusok és ideiglenes C&B-anyagok javítása

Kiterjesztett barázdazárás

Tejfogak tömése

Csonkfelépítés

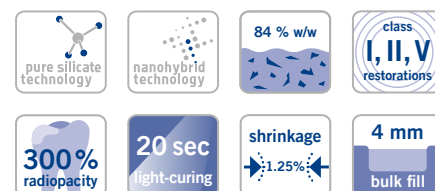

REF 2810	Fecskendő 3 g univerzális
REF 2811	Caps 15 × 0,2 g univerzális
REF 9301	Dispenser – Caps

Előnyei

- Tisztán kerámia alapú, bulk fill helyreállító anyag
- Gyors és kiváló minőségű – megbízható polimerizáció 4 mm-es rétegben
- A leginnovatívabb ORMOCER® technológiának köszönhetően
 - messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (1,25 térfogat %) és különösen alacsony zsugorodási stressz, kitűnő széli záródás
 - semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- Kitűnő kezelhetőség, egyszerűen magas fényűre polírozható, a magas felületi keménység garantálja az első osztályú, hosszú távú eredményt
- Univerzális színárnyalat kaméleon effektussal
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóanyaggal

Klinikai eset



Nem megfelelő kompozit restauráció a 45-ös fagon



A töméshez előkészített kavitás



Az Admira Fusion x-tra applikálása 4-mm-es rétegben



A funkcionális és esztétikus végeredmény

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország

Admira® Fusion x-base

Folyékony nanohibrid ORMOCER® bázis tömőanyag, 4 mm



Javallatok

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

Alábélelésre direkt restaurációs anyagok alá I. és II. osztályú kavitásokban

Kis, okklúzális stressznek ki nem tett I. osztályú restaurációk minimál invazív eljárás szerint

III. és V. osztályú restaurációk

Kiterjesztett barázdazárás

Alámenős részek blokkolása

Az apróbb zománc hibák javítása

Az esztétikus indirekt restaurációk apróbb hibáinak javítása

Ideiglenes C & B-anyagok javítása

Csonkfelépítés

Előnyei

- Tisztán kerámia alapú
- Gyors és kiváló minőségű – 4 mm-es restaurációs alap egyetlen egyszerű lépésben
- A leginnovatívabb ORMOCER® technológiának köszönhetően
 - messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (2,5 térfogat %) és különösen alacsony zsugorodási stressz, kitűnő széli záródás
 - semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- Kiváló folyási jellemzők biztosítják az egész kavitás benedvesítését
- Kitűnő kezelhetőség, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

Klinikai eset



Okklúzális káriesz a 36-os fagon



Az adhezív restaurációs technika szabályai szerint preparált kavitás



A fogzománc szelektív savazása



Az adhezív applikálása. Futurabond M+



Az Admira Fusion x-base applikálása 4-mm-es rétegben, a fotopolimerizációt követően




Az Admira Fusion fedőréteg a lámpázást követően, a fotopolimerizációt követően



A funkcionális és esztétikus végeredmény

Forrás: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Németország

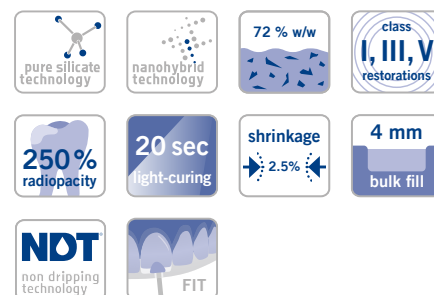

REF 2812 Fecskendő 2 x 2 g univerzális, tartozékok
REF 2148 Applikációs kanülök 46-es típus, 100 db

Grandio®SO Unlimited

Univerzális tömőanyag 4 mm rétegvastagsággal



Javallatok

- Tömés I - V. osztályig
- Traumásan sérült frontfogak rekonstrukciója
- Elszíneződött frontfogak
- Forma és színkorrekció az esztétikai hatás javítására
- Meglazult fogak megerősítése, sínézés
- Héjak javítása
- Tejfogak tömése
- Csonkfelépítés
- Kompozit inlay-k

Előnyei

- Univerzális
 - Abszolút univerzális felhasználás – anterior és poszterior terület esztétikai igényeihez
- Nincs rétegzés
 - Az üregbe egy darabban akár 4 mm-es lépésekben is beilleszthető
- Visual-Transformation-Technology (VTT)
 - Fotopolimerizáció előtt áttetsző – a fotopolimerizáció után a természetes foghoz hasonló, esztétikus opacitással rendelkezik
- Nagy teljesítményű kompozit
 - 91 tömeg % töltőanyagtartalom a maximális stabilitás és szilárdság érdekében
 - Alacsony polimerizációs zsugorodás, 1,44 térfogat %, és különösen alacsony szintű zsugorodási stressz
- Egyszerűsített árnyalatrendszer
 - Az 5 Cluster-Shade szín az összes klasszikus VITA® árnyalatot képes lefedni
 - Jelentősen leegyszerűsíti a készletezést
- Gyors és egyszerű kezelhetőség
 - Mindössze 10 másodperc szükséges a szokásos lámpázáshoz Cluster-Shade színek A1–A3.5
 - Kiválóan formázható és polírozható
 - Minden hagyományos bondrendszerrel kompatibilis



- REF 6257 Próbakészlet 10 × 0,3 g Caps (2 mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4), 10 × Futurabond U *SingleDose*, fogszínkulcs, tartozékok
- REF 6258 Fecskendő 5 × 4,5 g (A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs
- REF 6270 Caps 75 × 0,3 g (15 mindegyikből × A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs

Színek	Fecskendő 4,5 g	Caps 15 × 0,3 g
A1	REF 6259	REF 6271
A2	REF 6260	REF 6272
A3	REF 6261	REF 6273
A3.5	REF 6262	REF 6274
A4	REF 6263	REF 6275
Opaque	REF 6264	REF 6276
Bleach	REF 6265	REF 6277

Cluster-Shade-Rendszer

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5					A4	
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Grandio®SO

Univerzális nano-hibrid tömőanyag



Javallatok

I. – V. osztályú tömésekhez

Direkt héj készítése

Elszíneződött frontfogak ellátására

Forma és színkorrekció az esztétikai hatás javítása

Meglazult fogak sínezése

Leplezés javítása

Tejfogak tömése

Csonkfelépítés

Kompozit inlay-k

Előnyei

- Fogszerű tömőanyag megbízható fogpótlásokhoz
- Töltési tartalom 89 tömeg %
- A legmagasabb igényeket kielégíti mind az anterior, mind a poszterior régiókban
- A környezeti fénnel szembeni kiváló ellenállás
- Az opacitás és az áttetszőségét optimális összhangja, amely egyetlen színárnyalat használatával is a fogak természetességét tükrözi
- Sima konzisztencia, nem ragad, kitűnően formázható
- Könnyen magasfényűre polírozható – tartós, sima felületű
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóanyaggal

Klinikai esetek



14, 15-ös fog, szekunder karieses miatt cserére szoruló tömések



15-ös fog a distalis záróléc kialakítását követően



A kész restauráció

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország



Nem megfelelő kompozit tömések a 11. és 21.fogakon



A rétegzési technika alkalmazása GrandioSO A3.5 tömőanyaggal



A kész restauráció

Forrás: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brazília



REF 2600	Készlet fecskendő 5 x 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), fogszínkulcs	
REF 2640	Készlet Caps 80 x 0,25 g (16 x A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), fogszínkulcs	
REF 2607	Fogszínkulcs	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Színek	Fecskendő 4 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2610	REF 2650
A2	REF 2611	REF 2651
A3	REF 2612	REF 2652
A3.5	REF 2614	REF 2654
A4	REF 2615	REF 2655
B1	REF 2619	REF 2659
B2	REF 2620	REF 2660
B3	REF 2621	REF 2661
C2	REF 2624	REF 2664
D3	REF 2627	REF 2667
Incizális	REF 2629	REF 2669
OA1	REF 2630	REF 2670
OA2	REF 2631	REF 2671
OA3.5	REF 2633	REF 2673
BL	REF 2635	REF 2675
GA3.25	REF 2613	REF 2653
GA5	REF 2616	REF 2656

Grandio®SO Light Flow

Folyékony, nanohibrid tömőanyag – alacsony viszkozitású



Javallatok

Kis üregek tömése / karakterizálása

III. IV. és V. osztályú kavitások tömése / karakterizálása

Kiterjesztett barázdazárásra

Alámenős részek blokkolása

Alábélelésre vagy feltöltésre

Tömések, héjak és ideiglenes restaurációk javítása

Áttetsző protetikai munkák ragasztása

Előnyei

- Alacsony viszkozitás – kiemelkedő áramlási tulajdonságok, ezért optimálisan alkalmas nehezen elérhető területekre és kis üregekre
- Extra finom kanül – hajszálpontos alkalmazás, anyagmaradék nélküli adagolás
- Nagy teljesítmény – kiváló fizikai tulajdonságok, pl. töltőanyag-tartalma 76 tömeg%
- Kiváló kezelhetőség – NDT®-fecskendő – nem csöpög, kompatibilis az összes fényre kötő bond anyaggal

REF 2585	Készlet fecskendő 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), fogszínkulcs, tartozékok
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db
REF 2147	Applikációs kanülök 45-es típus, 100 db

Színek	Fecskendő 2 x 2 g	Színek	Fecskendő 2 x 2 g
A1	REF 2586	B1	REF 2590
A2	REF 2587	WO	REF 2591
A3	REF 2588	OA2	REF 2592
A3.5	REF 2589	Incisal	REF 2593

Grandio®SO Flow

Folyékony, univerzális nano-hibrid tömőanyag



Javallatok

I. – V. osztályú tömésekhez

Minimál invazív kavitások tömésére

Kiterjesztett barázdazárásra

Alámenős részek feltöltésére

Alábélelésre

Tömések és héjak javítására

Beragasztásra áttetsző protetikai munkáknál (pl. teljes kerámia koronák, stb)

Kilazult fogak rögzítésére és sínezésére (pl. üvegszál szalagokkal)

Üvegrostokkal vagy más hasonló anyagokkal együtt alkalmazva hosszú távú ideiglenes koronák és hidak készítésének alapanyagaként

Előnyei

- Közepesen viszkózus folyékony kompozit, kiváló folyási tulajdonságainak köszönhetően az üreg falán könnyen szétterül és bevonja azt
- Univerzálisan alkalmazható – az indikációhoz illeszkedő kezelések minden üreg osztályban
- 13 színárnyalat az esztétikai fogpótlásokhoz – tökéletesen összehangolva a GrandioSO-val
- Nagyon magas töltőanyag tartalom több mint 80 tömeg%
- Biztonságos és pontos applikálhatóság

REF 2720	Készlet fecskendő 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), fogszínkulcs, tartozékok
----------	--

Színek	Fecskendő 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2722	REF 2742
A2	REF 2723	REF 2743
A3	REF 2724	REF 2744
A3.5	REF 2725	REF 2745
A4	REF 2726	REF 2746
B1	REF 2729	REF 2749
B2	REF 2730	–
C2	REF 2732	–
Incizális	REF 2733	–
OA2	REF 2734	–
BL	REF 2736	–
WO	REF 2737	–
GA5	REF 2727	–

Grandio®SO Heavy Flow

Folyékony, univerzális, nano-hibrid tömőanyag – magas viszkozitású



Javallatok

I. – V. osztályú tömésekhez

Minimál invazív kavitások tömésére

Kiterjesztett barázdazárásra

Alámenős részek feltöltésére

Alábélelésre

Tömések és leplezések javítására

Beragasztásra áttetsző protetikai munkáknál (pl. teljes kerámia koronák, stb)

Kilazult fogak rögzítésére és sínzésére (pl. üvegszál szalagokkal)

Üvegrostokkal vagy más hasonló anyagokkal együtt alkalmazva hosszú távú ideiglenes koronák és hidak készítésének alapanyagaként

Előnyei

- Megnövelt stabilitás a hagyományos flow-khoz képest, azaz nem folyik meg
- Univerzálisan alkalmazható – az indikációhoz illeszkedő kezelések minden üreg osztályban
- A fizikai tulajdonságai jobbak, mint az egyéb tömöríthető anyagoké, pl.: keménység, stabilitás, kopásállóság
- Nagyon magas tömőanyag tartalom 83 tömeg %
- Kiváló folyási tulajdonságainak köszönhetően az üreg falán könnyen szétterül és bevonja azt
- Pontosan, anyagfelesleg nélkül adagolható, időtakarékos
- Az alámenős részeket, approximális ládákat és paragingivális területeket könnyen fel lehet tölteni
- Ideálisan kombinálható a GrandTEC-kel
- 13 színárnyalat az esztétikai fogpótlásokhoz – tökéletesen összehangolva a GrandioSO-val
- Kiemelkedően jó színstabilitás
- Nagyon jól polírozható és sokáig fényes marad
- Elérhető a nem cseppenő NDT®-fecskendőben és a flexibilis fém kanülös kapszulás flow változatban is

Klinikai eset



Tipikus V-alakú nyaki defektus 13



A GrandioSO Heavy Flow applikálása a kondicionálás és bondozás után



A restauráció közvetlenül a polírozás után



REF 2680	Készlet fecskendő 5 x 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), fogszínkulcs, tartozékok
REF 2607	Fogszínkulcs
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Applikációs kanülök 46-os típus, 100 db

Színek	Fecskendő 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2684	REF 2704
A2	REF 2685	REF 2705
A3	REF 2686	REF 2706
A3.5	REF 2687	REF 2707
A4	REF 2688	REF 2708
B1	REF 2690	REF 2712
B2	REF 2691	–
C2	REF 2692	–
OA2	REF 2693	–
Incizális	REF 2694	–
BL	REF 2695	–
WO	REF 2696	–
GA5	REF 2689	–

Grandio®SO x-tra

Esztétikus nanohibrid bulk fill tömőanyag



Javallatok

I. és II. osztályú poszterior restaurációk készítése

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

V osztályú tömések

Meglazult fogak megerősítése, sínezés

Héjak javítása, zománcdefektusok és ideiglenes C&B-anyagok javítása

Kiterjesztett barázdazárás

Tejfogak tömése

Csonkfelépítés

Előnyei

- Gyors és esztétikus poszterior restauráció
- Magasabb keménység, mint más "bulk fill" kompozitoknál – nem csak a felszínén, ha nem a 4 mm-es mélységben is
- Nagyon magas töltőanyag tartalom (86 tömeg %) és rendkívül alacsony polimerizációs zsugorodás (1,4 térfogat %)
- A1, A2, A3 és univerzális árnyalatokban
- Magas fokú színtabilitás
- Kiválóan kezelhető és egyszerűen magas fényűre polírozható



REF 9301 Dispenser – Caps

Színek Caps 16 × 0,25 g

Univerzális REF 2714

A1 REF 2715

A2 REF 2716

A3 REF 2717

GrandTEC®

Műgyantával impregnált, fényre kötő üvegszál szalag adhezív töméstechikához



Javallatok

Fogak rögzítésére

- állkapocs-ortopédiai kezelés után
- parodontológiai terápia után

Fogakat érő trauma utáni kezelés támogatása

- kiesett vagy meglazult fogak rögzítéséhez vagy sínezéséhez
- törés után fogdarab rögzítéséhez

Kompozit és ideiglenes C&B anyagból készült ideiglenes híd megerősítéséhez / helyreállításához

Extrakció után, ideiglenes fogpótlás készítéséhez, műanyag fog felhasználásával

Foghiány ideiglenes vagy hosszútávú ideiglenes ellátásához, extrahált természetes fog felhasználásával

Implantátum behelyezése után ideiglenes fogpótlás készítéséhez, az implantátum összeintegrációja idejére

Előnyei

- Kiegészítő termék a kompozit-felhasználások javallatainak jelentős kiterjesztésére, pl. traumatológia, parodontológia, állkapocs-sebészet, konzerváló fogászat és protetika területén

REF 1168 Üvegszál csík 5 × 55 mm
REF 1169 Teszt készlet 5 üvegszál csík mindegyik 55 mm, model, applikációs segédlet, GrandioSO Heavy Flow fecskendő 2 × 2 g A3, tartozékok

VisCalor® bulk

Thermoviskózus bulk fill kompozit

Megfelelő előmelegítő
készülék szükséges
(88. o.)

Javallatok

- I. és II. osztályú poszterior restaurációk készítése
- I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként
- V osztályú tömések
- Meglazult fogak megerősítése, sínézés
- Héjak javítása, zománcdefektusok és ideiglenes C&B-anyagok javítása
- Kiterjesztett barázdazárás
- Tejfogak tömése
- Csonkfelépítés

Előnyei

- Melegítés hatására a kompozit kezdetben folyékony, ebben a formában applikálható, majd közvetlenül utána formázhatóvá válik (thermoviskózus technológia)
- Optimálisan benedvesíti a széleket és az alámenős részeket – minimalizálja a marginális résképződés kockázatát.
- 4 mm-es bulk fill anyag, nem kell fedőtöméssel lezárni
- Buborék mentes applikálás
- Egy univerzális és három esztétikus árnyalat
- Vékonyított kanül – ideális a nehezen elérhető területekhez

Klinikai eset



Az előkészített kavitás



A felmelegített VisCalor bulk applikálása, kiváló folyékony konzisztencia és vékony kanül



A formázható VisCalor bulk könnyen adaptálható



A polírozott, száraz, II. osztályú kavitás egy nappal a töméskészítés után

Forrás: Dr. Fernando Feitosa, Americana / Brazília



REF 6062	Készlet Dispenser Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzális, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser
REF 6063	Készlet Caps Warmer Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzális, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer
REF 6065	Caps 16 × 0,25 g univerzális
REF 6066	Caps 16 × 0,25 g A1
REF 6067	Caps 16 × 0,25 g A2
REF 6068	Caps 16 × 0,25 g A3



Gyors felfűtés és
applikálás egyetlen
eszközzel

Alábelelő anyagok

Bondok

Tömőanyagok (ORMOCER®)

Tömőanyagok
(Kompozitok)

Tömőanyagok (Kompomer)

Tömőanyagok
(Üveg ionomer anyag)

Grandio®

Univerzális nano-hibrid tömőanyag



Javallatok

Tömés I - V. osztályig

Traumásan sérült frontfogak rekonstrukciója

Elszínződött frontfogak

Forma és színkorrekció az esztétikai hatás javítására

Meglazult fogak megerősítése, sínezés

Héjak javítása

Tejfogak tömése

Csonk felépítés

Kompozit inlay-k

Előnyei

- Kiváló fizikai tulajdonságok, tartós tömések
- Jelentősen kisebb polimerizációs zsugorodás az összes hagyományos kompozithoz képest
- Töltési tartalom 87 tömeg %
- Különösen magas kopásállóság
- Nagy hajlítózilárdság
- Megfelelően lágy konzisztencia a könnyű kezelhetőség érdekében
- Kiváló esztétikai tulajdonságok
- Minden dentin és zománc ragasztóval használható
- 16 színben kapható
- A színek a tömőanyagból készül



REF 1800	Készlet fecskendő 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), fogszínkulcs	
REF 1899	Fogszínkulcs	
REF 9301	Dispenser – Caps	
Színek	Fecskendő 4 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1810	REF 1840
A2	REF 1811	REF 1841
A3	REF 1812	REF 1842
A3.5	REF 1813	REF 1843
A4	REF 1814	REF 1844
B1	REF 1824	REF 1854
B2	REF 1815	REF 1845
B3	REF 1816	REF 1846
C2	REF 1817	REF 1847
C3	REF 1818	REF 1848
D2	REF 1825	REF 1855
D3	REF 1819	REF 1849
Incizális	REF 1820	–
OA2	REF 1821	REF 1851
OA3.5	REF 1822	REF 1852
BL	REF 1823	REF 1853

Klinikai eset



Kiindulási állapot



Preparálás és Grandio Flow réteg



A Grandio-val befejezett restaurálás

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazília

Grandio® Flow

Folyékony, univerzális nano-hibrid tömőanyag



Javallatok

Minimál invazív kavitások tömésére minden osztályban

Kisebb I. osztályú kavitások tömésére és kiterjesztett barázdázásra

II. és V. osztályú kavitások tömésére, beleértve a nyaki színárnyalat defektusokat és a nyaki karieszeket

Alámenő részek megszüntetésére

Kavitások alábélelésére

Tömések és héjak javítására

Alábélelésre áttetsző protetikai munkáknál (pl. teljes kerámia koronák, stb.)

Előnyei

- Optimális viszkozitás
- Magas töltőanyag-tartalom 80 tömeg %
- Grandio-val azonos színek
- Nedvességtűrő
- Kiváló fizikai tulajdonság
- Jelentősen alacsonyabb polimerizációs zsugorodás a hagyományos folyékony tömőanyagokhoz képest
- Kitűnő kopásállóság
- Nagy hajlítószilárdság
- Minden hagyományos ragasztóval használható
- A speciális színekkel: bleach-light és fehér-opák fehérített fogak ellátásához. A Bleach-light alkalmazható a gyermekfogászatban is. A fehér-opák kiváló rekonstrukciós alapot képez, pl. elszíneződött dentinterületek, csonk-felépítések

Grandio® Flow NDT® fecskendőben

- NDT® non-dropping (nem elcseppenő) technológiát jelent
- Különösen finoman folyik az anyag
- Precízen lehet adagolni és alkalmazni
- Anyagvesztés nélkül



REF 1860 Készlet fecskendő 8 x 2 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), fogszínkulcs, tartozékok

REF 1899 Fogszínkulcs

REF 9301 Dispenser – Caps

REF 2146 Applikációs kanülök 41-es típus, 100 db

Színek	Fecskendő 2 x 2 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1863	REF 1880
A2	REF 1864	REF 1881
A3	REF 1865	REF 1882
A3.5	REF 1866	REF 1883
A4	REF 1868	–
B1	REF 1869	–
B2	REF 1867	–
C2	REF 1873	–
D2	REF 1874	–
OA2	REF 1870	–
BL	REF 1871	–
WO	REF 1872	–

Alábélelő anyagok

Bondok

Tömőanyagok (ORMOCER®)

Tömőanyagok
(Kompozitok)

Tömőanyagok (Kompomer)

Tömőanyagok
(Üveg ionomer anyag)

Amaris® · Amaris® Flow

Fényre kötő esztétikus tömőanyag



Javallatok

Esztétikus felépítések III, IV, és V. osztályú kavitások esetén frontfogak területén
Esztétikus restaurációk I, II, és V. osztályú kavitásoknál a hátsó régióban
Traumás sérüléseknél a rekonstrukcióra a frontfogaknál
Direkt és indirekt kompozit héjak, elszíneződések elfedésére az elülső fogaknál
Esztétikai korrekció alaki-, és színeltéréseknél
Magas esztétikai igénytel készült kerámia restaurációk pl.: héjak kijavítására
Sínezésre a frontfogak területén

Előnyei

- Két egyszerű lépés, tökéletes eredmény
- Rétegezés mint a természetben: a fog belsejéből kiindulva
- Egyszerű és pontos színválasztás
- Természetes színátmenetek
- Természetes fogszínek mindössze 11 szín egyszerű rétegzéséből
- Könnyen elsajátítható, minimális feldolgozási idő, gyors esztétikus eredmény
- Intuitív munka a meghatározott színstandardok nélkül
- Nem ragad, modelláláshoz optimális konzisztencia
- Hosszan ellenáll a környezeti és műtő lámpa fényének
- Optimális polírozhatóság
- Természetes fluoreszcencia, kiváló színtabilitás
- Jó „kaméleon-effektus” az „észrevehetetlen” tömésekért

Előnyei Amaris® Flow

- Ideális kiegészítője az Amaris tömőanyagoknak
- Az incizális él egyszerűen modellezhető
- Könnyen nedvesít
- Finom kanül segít alkalmazni kis üregek esetén

Klinikai eset



Elégtelen MOD kompozit tömés a 25-ös fogon



Inkrementális rétegek opák alap dentin árnyalat



Utolsó réteg áttetsző zománc árnyalat

Forrás: Dr. Andreas Braun, Dr. Felix Krause, Bonn / Németország

REF 1930	Készlet fecskendő 8 × 4 g (01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow fecskendő 2 × 1,8 g (HT, HO), fogszínkulcs, tartozékok	
REF 1949	Starter Készlet Caps 32 × 0,25 g (4 × 01, 02, 03, 04, 05, TL, TN TD), Amaris Flow fecskendő 2 × 1,8 g (HT, HO), fogszínkulcs, tartozékok	
REF 1969	Fogszínkulcs	
REF 9301	Dispenser – Caps	
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db	
Bázis színek		
Opaque	Fecskendő 4 g	Caps 16 × 0,25 g
01	REF 1933	REF 1953
02	REF 1934	REF 1954
03	REF 1935	REF 1955
04	REF 1936	REF 1956
05	REF 1937	REF 1957
O Bleach	REF 1938	REF 1958
Porcelán színek		
Translucent	Fecskendő 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Light, TL	REF 1940	REF 1960
Neutral, TN	REF 1941	REF 1961
Dark, TD	REF 1942	REF 1962
Amaris® Flow		
Egyedi színek	Fecskendő 2 × 1,8 g	
High translucent, HT	REF 1945	
High opaque, HO	REF 1946	

Amaris® Gingiva

Gingiva színű, fényre kötő esztétikus tömőanyag

Javallatok

V. osztályú kavitások ellátására (nyaki kariesz, gyökér erózió, V. osztályhoz hasonlító defektusok), különösen olyan esetekben, amikor a gingiva visszahúzódtott, pl.: periodontális megbetegedések esetén

Az elszíneződött és hyperérzékeny fognyakak ellátására, különösen a látható front területen

Nagy esztétikai igényű restaurációk készítésénél, ha fogak helyzeti rendelkezéseit kívánjuk megszüntetni, direkt héjak készítésénél, fedésre és korrekcióra a vörös és fehér esztétikájának megoldására

Előnyei

- Egy bázis szín, kombinálva 3 keverhető opaquer-rel majdnem minden gingiva árnyalatot lefed
- Esztétikus és funkcionális megoldás a kavitások és V. osztályt formáló defektusok ellátására a nyaki területeken, amikor jelentős gingiva visszahúzódnak jelentkezik
- A legújabb kompozit technológia – Amaris know-how a gingiva szín kialakítására



REF 1970	Készlet fecskendő 4 g bázis színek nature, fecskendő 3 x 1,2 g opaques (white, light, dark), fogszínkulcs, tartozékok
REF 1971	Fecskendő 4 g nature
REF 2147	Applikációs kanülök 45-ös típus, 100 db
REF 2309	Egyszer használatos ecset, 100 db
REF 2338	Ecsettartó egyszer használatos ecsetek és Micro Tim részére, 5 db

FinalTouch®

Fényre kötő karakterizációs anyag

Javallatok

Direkt és indirect kompozit restaurációk egyedi karakterizációja

A fog elszíneződéseinek elfedése CAD / CAM héjak szék melletti karakterizációja

Előnyei

- A zománc egyedi jellemzőinek reprodukálása
- A VOCO kompozit és ORMOCER® helyreállító anyagok termékskálájának kibővítése
- Nagyon jó kezelhetőség a magas esztétikai végeredmény eléréséért
- Finom anyagszerkezet és homogén konzisztencia a pontos applikálásért
- Nem csöpögő NDT® fecskendőben
- 5 szín az alkalmazási területhez megfelelő opacitással



REF 2321	Készlet fecskendő 5 x 1,5 g (fehér, kék, sárga, narancssárga, barna), tartozékok
REF 2323	Fecskendő 1,5 g fehér, tartozékok
REF 2324	Fecskendő 1,5 g kék, tartozékok
REF 2325	Fecskendő 1,5 g sárga, tartozékok
REF 2326	Fecskendő 1,5 g narancssárga, tartozékok
REF 2327	Fecskendő 1,5 g barna, tartozékok
REF 2147	Applikációs kanülök 45-ös típus, 100 db

x-tra base®

Folyékony, fényre kötő bázis kompozit



Javallatok

I. és II. osztályú kavitások bázis-rétegeként

Alábélelésre direkt restaurációs anyagok alá I. és II. osztályú kavitásokban

Kis, okkluzális stressznek ki nem tett I. osztályú restaurációk minimál invazív eljárás szerint

III. és V. osztályú restaurációk

Kiterjesztett barázdazárás

Alámenős részek blokkolása

Az apróbb zománc hibák javítása

Az esztétikus indirekt restaurációk apróbb hibáinak javítása

Ideiglenes C & B-anyagok javítása

Csonkfelépítés

Előnyei

- 4 mm restaurációs alapréteg egyetlen egyszerű lépésben
- Megbízható polimerizálódás mindössze 10 másodperc alatt (univerzális szín)
- Tökéletes felületi affinitás a kitűnő adaptációhoz
- Alacsony zsugorodási stressz
- Magas radiopacitás (350 %Al)
- Önterülő
- Kombinálható bármilyen metakrilát bázisú ragasztóval vagy kompozittal
- Az el nem cseppenő NDT®-fecskendő vagy a praktikus Flow-Caps, hajlítható fém kanüllel, biztosítja a megbízható, pontos, biztonságos alkalmazást

Applikáció



Az elkészült kavitás preparáció

A kavitás falak bevonása
Futurabond DC-velA kavitás legmélyebb pontjától kell
kezdeni ...... és feltölteni 4 mm-t
x-tra base-velVigyen fel 2 mm GrandioSO
okkluzális réteget

A kész helyreállítás



REF 1790	Fecskendő 2 x 2 g univerzális, tartozékok
REF 1791	Fecskendő 2 x 2 g A2, tartozékok
REF 1794	Caps 16 x 0,25 g univerzális
REF 1795	Caps 16 x 0,25 g A2
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Applikációs kanülök 46-os típus, 100 db

x-tra fil®

Fényre kötő tömőanyag rágófogakhoz

**Javallatok**

I. és II. osztályú fogak tömése
Csonkfelépítés

Előnyei

- 4 mm vastagság
- Megszilárdulás rétegenként csak 10 másodperc
- Univerzális szín
- Tartós és környezetbarát
- Csökkentett feldolgozási idő, különösen ha valamelyik Futurabond *SingleDose* ragasztóval együtt alkalmazza
- Egyszerű kezelhetőség
- Kiváló fizikális tulajdonságok

Klinikai eset

Kiindulási állapot



Végeredmény

Forrás: Dr. Tomislav Skrinjaric, Croatia



26. fog felújításra szoruló amalgám tömésel



A fénylő felületek a polimerizáció előtt a ragasztóanyag felhasználását mutatják



Az approximális szélek kialakítása matrica felhasználásával



A kavitás kitöltése 4 mm-es lépésekben



A palatális üreg kitöltése



A kész kezelés x-tra fillel

Forrás: Prof. Jürgen Manhart, Munich / Németország



REF 1739	Fecskendő 10 × 5 g
REF 1740	Fecskendő 5 g
REF 1741	Caps 20 × 0,25 g
REF 9301	Dispenser – Caps

„Az x-tra fil kiváló fizikai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy tartós poszterior restaurációknál felajánljam pácienseimnek. Különösen a gyors alkalmazás nyugtázott le. Kiváló kaméleon hatásának köszönhetően az x-tra fil hihetetlenül jól adaptálódik a foganyaghoz.”

Dr. Tomislav Skrinjaric, Horvátország

Polofil® Supra

Fényre kötő mikrohibrid kompozit tömőanyag

Javallatok

I - V. osztályú kavitásokhoz
Sérült frontfogak helyreállítása
Hájkészítés az elszíneződött frontfogakra
Mozgatható fogak rögzítése

Előnyei

- A mikro- és makroszemcsés kompozitok előnyeinek ötvözése
- Nem ragad, jól kezelhető
- Kopásálló és színtartó
- Kis mértékű zsugorodás
- Tartós és ellenálló
- Alacsony vízfelvétel képesség



REF 1360	Készlet fecskendő 7 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, incizális), Vococid gél fecskendő 5 ml, Solobond M flakon 4 ml, tartozékok
REF 1373	Készlet fecskendő 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), Vococid flakon 3 ml, Solobond M flakon 4 ml, tartozékok

Színek	Fecskendő 4 g	Színek	Fecskendő 4 g
A1	REF 1361	B2	REF 1365
A2	REF 1362	B3	REF 1366
A3	REF 1363	Incizális	REF 1368
A3.5	REF 1364		

Twinky Star® · Twinky Star® Flow

Csillogó hatást keltő, színes, fényre kötő kompomer



Javallatok

Tejfogak tömésére

Előnyei

- Nyolc tetszetős szín, csillogó hatással
- Kapszulából könnyű és gyors alkalmazás
- Kiváló polírozhatóság
- Bevált VOCO kompomer technológián alapszik
- Színminta eredeti anyagból
- Szülők könnyebben motiválhatják a gyerekeket fogorvos látogatására
- Feloldja a gyerekek szorongását a színválasztás lehetőségével
- A célcsoport megnyerését támogató eszközök rendelkeznek



Színes Twinky Star tömések
tejfogakban



REF 1680	Készlet Caps 40 x 0,25 g (5 db minden színből), fogszínkulcs
REF 1689	Fogszínkulcs
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db

Színek	Caps 25 x 0,25 g
Arany	REF 1681
Ezüst	REF 1682
Kék	REF 1683
Rózsaszín	REF 1684
Zöld	REF 1685
Narancs	REF 1686
Citromzöld	REF 1687
Lila	REF 1688

Twinky Star® Flow

Színek	Fecskendő 2 g
Kék	REF 1693
Rózsaszín	REF 1694

Tömőanyagok (Üveg ionomer anyag)

Oldal			I. osztály	II. osztály	III. osztály	V. osztály / nyaki defektusok	alábélelés / csonkfelépi- tés	kiterjesztett barázdazárás	tejfog restauráció	ideiglenes tömés	feldolgozási idő [perc]	kötési idő [perc]
Üveg ionomer tömőanyagok												
47	IonoStar Plus capsule	gyorsan kötő üveg ionomer tömőanyag	• ^{1,2}	• ²	•	•	•	•	•	•	1	2
48	IonoStar Molar capsule	üveg ionomer tömőanyag	• ^{1,2}	• ²	•	•	•		•	•	1,5	3 - 4
49	VOCO Ionofil Molar AC Quick capsule	gyorsan kötő üveg ionomer tömőanyag	• ²	• ^{1,2}		•	•	•	•	•	1,5	2,5
49	VOCO Ionofil Molar handmix	üveg ionomer tömőanyag	• ²	• ^{1,2}		•	•		•	•	2 - 3	4 - 5
50	Aqua Ionofil Plus handmix	Vízzel keverendő üveg ionomer tömőanyag	• ²		•	•	•	•	•		2,5 - 3,5	5 - 6
Fényre kötő üveg ionomer restaurációs anyagok												
19	Ionoseal fecskendő, tubus	üveg ionomer – kompozit cement					•	•				fényre kötés: 20 s / 1 mm
46	Ionolux capsule	üveg ionomer tömőanyag	• ³		•	•	•		•	•	> 2,5	fényre kötés: 20 s / 2 mm
46	Ionolux handmix	üveg ionomer tömőanyag	• ³		•	•	•		•	•	> 3	fényre kötés: 20 s / 2 mm

¹ okklúziós terheléstől mentes

² hosszan tartó ideiglenes

³ kis kiterjedésű

Áttekintés a kompozit anyagainkról a 25. oldalon található.

Ionolux®

Fényre kötő üvegionomer tömőanyag



Javallatok

III. és V. osztályú, különösen nyaki töméseknél és gyökér kariesznél

Tejfogak tömésére

I. osztályú kis kavitásokba

Ideiglenes tömésekhez

Csonkfelépítésre

Alábélelésre

Előnyei

- Fotopolimerizációval egyénileg, kiválóan beállítható munkaidő – kötési idő
- Nem szükséges a fog kemény szövetének kondicionálása
- Az üregbe helyezés után azonnal tömöríthető
- Nem ragad a műszerhez, könnyen modellezhető
- Applikálni, polimerizálni és befejezni – nincs szükség védőlakkozásra
- Fluoridot ad le
- Radiopak
- A CBF technika (folyékony kompozit szendvicstechnika) lehetséges alternatívája mély üregek esetén



REF 2115	Készlet applikációs kapszulák 50 db (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2117	Applikációs kapszulák 20 db A1
REF 2118	Applikációs kapszulák 20 db A2
REF 2119	Applikációs kapszulák 20 db A3
REF 2120	Applikációs kapszulák 20 db A3.5
REF 2121	Applikációs kapszulák 20 db B1
REF 2122	Applikációs kapszulák 150 db A2
REF 2123	Applikációs kapszulák 150 db A3
REF 1990	Por / folyadék (12 g / 5 ml) A1, fogszínkulcs
REF 1991	Por / folyadék (12 g / 5 ml) A2, fogszínkulcs
REF 1992	Por / folyadék (12 g / 5 ml) A3, fogszínkulcs
REF 2331	Applicator – AC típus 1
REF 2303	Keverő blokk 70 × 80 mm, tapadós hátlap, 4 db

Klinikai esetek

Első eset



Nyaki defektus a 35-ös fogon



A 35-ös fog közvetlenül a kezelést követően

Forrás: Dr. Isma Goltz, Bréma / Németország

Második eset



A 16-os, 15-ös fog excavatio után



Utólkezelés Ionoluxszal

Forrás: Prof. Hervé Tassery, PU-PH, Marszely / Franciaország

IonoStar® Plus

Gyorsan kötő üveg ionomer tömőanyag



Javallatok

Okklúziós terheléstől mentes I. osztályú kavitások tömése
 I. és II. osztályú kavitások hosszan tartó ideiglenes tömése
 Nyaki kopások, gyökér kariesz, V. osztályú üregek ellátása
 III. osztályú tömések
 Tejfog restaurációk
 Alaptömésre / alábélelésre
 Csonkfelépítés
 Ideiglenes tömésre
 Kiterjesztett barázdazárás


Előnyei

- Tökéletes széli záródás és tömöríthetőség egy terméken belül az alkalmazás alatti viszkozitás változásnak köszönhetően
- Rövid kötési idő, mindössze 2 perc a tömés behelyezésétől számítva
- Az első üveg ionomer anyag a foggal megegyező fluoresszenciával
- Magas szintű fluorid leadás
- Az új kialakítású kapszulával elérhetőek a kisebb üregek és a nehezen hozzáférhető helyek a szájbán
- Magas nyomószilárdság és kopásállóság ellenállás

Klinikai eset



Defektus a 24-es és 25-ös fogakon

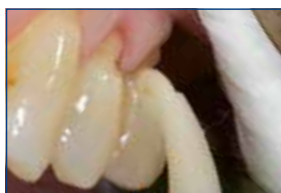

Az IonoStar Plus applikálása



Tömöríthető állapot



Finírozás



Polírozás



Végeredmény

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország



REF 2540	Készlet applikációs kapszulák 50 db (10 x A2, 30 x A3, 10 x A3.5)
REF 2548	Applikációs kapszulák 20 db A1
REF 2543	Applikációs kapszulák 20 db A2
REF 2544	Applikációs kapszulák 20 db A3
REF 2545	Applikációs kapszulák 20 db A3.5
REF 2546	Applikációs kapszulák 150 db A2
REF 2547	Applikációs kapszulák 150 db A3
REF 2331	Applicator – AC típus 1

IonoStar® Molar

Üveg ionomer tömőanyag



Javallatok

Okklúziós terheléstől mentes I. osztályú kavitások tömése

I. és II. osztályú kavitások hosszan tartó ideiglenes tömése

Nyaki kopások, gyökér kariesz, V. osztályú üregek ellátása

III. osztályú tömések

Tejfog restaurációk

Alaptömésre / alábélelésre

Csonkfelépítés

Ideiglenes tömésre

Előnyei

- A keverési idő módosításával variálható konzisztencia
- Egyszerű applikálhatóság és tökéletes széli záródás
- A behelyezést követően azonnal modellezhető és nem ragad a műszerhez
- Az új VOCO applikációs kapszula, egyszerűen, aktivátor nélkül aktiválható
- Az új kialakítású kapszulával elérhetőek a kisebb üregek és a nehezen hozzáférhető helyek a szájbán
- Magas nyomószilárdság és kopásállóság

REF 2520	Készlet applikációs kapszulák 50 db (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2524	Applikációs kapszulák 20 db A1
REF 2525	Applikációs kapszulák 20 db A2
REF 2526	Applikációs kapszulák 20 db A3
REF 2527	Applikációs kapszulák 20 db A3.5
REF 2532	Applikációs kapszulák 150 db A2
REF 2533	Applikációs kapszulák 150 db A3
REF 2534	Applikációs kapszulák 150 db A3.5
REF 2331	Applicator – AC típus 1

Klinikai eset



Kiindulási helyzet 26-os fog: marginális szekunder kariesz az okklúzális restauráció alatt



Mély szuvasodást mutató üreg; előkészítés meziális felszín alagút technikával



Az IonoStar Molar (A3) applikálása



Finírozás finom gyémántfúróval



Az üvegionomer felszínének védelme



Kész tömés a kofferdám eltávolítása után

Forrás: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brazília

VOCO Ionofil® Molar AC Quick

Gyorsan kötő üveg ionomer tömőanyag

Javallatok

- II. osztályú üregek tömése ("csatorna preparáció")
- Hosszantartó ideiglenes tömés I. és II. osztályú üregek esetén
- Alábélelő és felépítő tömések
- Csonkfelépítés
- Tejfogak helyreállítása
- V. osztályú üregek fognyaki kopások

Előnyei

- Nagyon jól kezelhető
- Nem ragadós konzisztencia
- Nagyon magas kopásállóság, nyomó- és hajlítószilárdság
- Stabil tömések marginális rések nélkül
- Folyamatosan magas fluorid leadás
- Biokompatibilis
- Fogszerű, esztétikus áttetszőség
- Kötési ideje mindössze 2,5 perc, ezért tökéletes anyag a VOCO Ionofil Molar AC Quick gyermekek és türelmetlen páciensek kezelésére
- Kiváló esztétika

VOCO Ionofil® Molar

Üveg ionomer tömőanyag

Javallatok

- II. osztályú üregek tömése ("csatorna preparáció")
- Hosszantartó ideiglenes tömés I. és II. osztályú üregek esetén
- Alábélelő és felépítő tömések
- Csonkfelépítés
- Tejfogak helyreállítása
- V. osztályú üregek fognyaki kopások

Előnyei

- Nagyon jól kezelhető
- Nem ragadós konzisztencia
- Nagyon magas kopásállóság, nyomó- és hajlítószilárdság
- Biztos kötés a dentinhez és a zománchoz
- Nagyon stabil tömés
- Folyamatosan magas fluorid leadás
- Röntgenárnyékot ad
- Biokompatibilis
- Esztétikus, fogszerű áttetszőség



REF 1634	Applikációs kapszulák 48 db A2
REF 1632	Applikációs kapszulák 48 db A3
REF 1241	Final Varnish LC flakon 2 x 3 ml
REF 2331	Applicator – AC típus 1
REF 9300	Activator – AC



REF 1442	Por 15 g A2
REF 1443	Por 15 g A3
REF 1448	Folyadék 10 ml

Aqua Ionofil Plus

Vízzel keverendő üveg ionomer tömőanyag



REF 1511 Por 15 g A3

Javallatok

Tejfogak helyreállítása

V. osztályú üregek fognyaki kopások

Szuvas léziók ellátása

III. osztályú tömések, I. osztályú kis tömések

Kiterjesztett barázdazárás

Alábélelő és felépítő tömések

Előnyei

- Új üveg ionomer technika
- Kiváló esztétika
- Egyszerű vízzel keverhetőség
- Túlsavazás veszélye nem áll fent
- Kenhető konzisztencia
- Jó széli záródás

Easy Glaze®

Nanoszemcsékkel megerősített, fényre kötő, fogfelszínvédő lakk



REF 1016 Flakon 5 ml, tartozékok
REF 2245 Easy Brush, applikációs nyél, 50 db
REF 2315 Keverőpaleta, 20 db

Javallatok

Ideiglenes koronák és hidak, üvegionomer tömések és végleges kompozit helyreállítások felszíni fedésére

Üvegionomer tömés felszínének védelme a nedvességtől és a dehidratációtól a töméskészítés után közvetlenül

Üvegionomer alábélelés / csonkfelépítés védelme lenyomatvétel előtt

A fogállomány és a tömőanyag közötti kapcsolat védelmére és zárására

Előnyei

- Fényes és esztétikus felszínek
- Könnyű használni
- Véd az elszíneződéstől

A VOCO Ionofil® Molar / IonoStar® tömőanyagával kombinálva

- Védi a tömőanyagot rögtön a tömés elkészítése után a nedvességtől és a kiszáradástól
- A foghoz hasonló fluoreszcencia
- Természetes fényesség



Indirekt restaurációk anyagai

Megbízhatóság. Gyakorlatiasság. Módszer.

A portfóliónk természetesen az indirekt helyreállítási anyagok teljes spektrumát kínálja az Ön részére: gyantaerősítésű üvegionomer cementek, kompozit alapú rendszerek, rendkívül esztétikus anyagok az ideiglenes koronák és hidak készítéséhez, üvegszálerősítésű kompozit csapok és kerámia restaurációk javításához szükséges anyagok.

Azok a CAD / CAM-felhasználók, akik a rendelőben szeretnének koronákat és hidakat készíteni, szintén megtalálják az ideális alapanyagokat a VOCO kompozit blokkjaiban és korongjaiban.

A 3D nyomtatási munkákhoz, az additív nyomtatáshoz, egymással tökéletesen összehangolt anyagokat kínálunk.



V-Print® splint

Fényre kötő rezin fogászati terápiás sínek generatív előállításához

Javallatok

Terápiás sínek

Kiegészítő és funkcionális diagnosztikai alkatrészek

Fogfehérítő sínek (otthoni fogfehérítéshez)

Előnyei

- **MD II.a besorolású orvostechnikai eszköz** – biztonság és hosszú távú terápiás használat
- **Biokompatibilitás és semleges íz** – a páciensek jól tolerálják
- **Átlátszó** – alig észrevehető sín
- **Nagy hajlítószilárdság** – tartós tárgyak
- **Nagyfokú pontosság** – jó illeszkedés, nagyon kényelmes viselet



REF 6044 Flakon 1000 g clear

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® splint comfort

Fényre kötő rezin fogászati hőre lágyuló terápiás sínek generatív előállításához

Retainerekhez
is alkalmas!

Javallatok

Terápiás sínek

Kiegészítő és funkcionális diagnosztikai alkatrészek

Fogfehérítő sínek (otthoni fogfehérítéshez)

Palatális lemezek

Előnyei

- **Rendkívül rugalmas és kopásálló** – rendkívül törésálló és tartós
- **Hőre lágyuló és semleges ízű** – kényelmes viselet
- **Átlátszó** – alig látható sínekhez
- **Alig van szaga és könnyen csiszolható** kellemes feldolgozás
- **Biokompatibilis és íztelen**
- **MD II.a besorolású orvostechnikai eszköz**



REF 6126 Flakon 1000 g clear

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® SG

Fényre kötő rezin fogászati sebészeti
fűrősablonok generatív előállításához

II. a besorolású
orvostechnikai eszköz –
sebbel kontaktusba
kerülhet



Javallatok

Fogászati sebészeti fűrősablonok

Előnyei

- **MD II.a besorolású orvostechnikai eszköz** – megfelelő biztonság
- **Magas felhasználói elégedettség** – íztelen és szagtalan
- **Optimális megbízhatóság** – használat előtt autoklávozható 134 ° C -on 5 percig
- **Mérettartó** – gőzsterilizálás után is tökéletes illeszkedés
- **Biokompatibilis** – anélkül is, hogy mondanánk



REF 6043 Flakon 1000 g clear

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt talál-
ható www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® IBT

Fényre kötő rezin fogászati transzfer sínek generatív előállításához



Javallatok

Ortodonciai transzfer sín a bracket felhe-
lyezéséhez

Előnyei

- **Nem kell felrázni** – a V-Print IBT azonnali használatra kész
- **Hatékony** – a virtuálisan megtervezett bracketek pontosan, biztonságosan és gyorsabban ragaszthatók
- **A beteg végzett kezelés lényegesen ergonomikusabb az indirekt bondozással**
- **Rugalmas sín** – fokozott kényelem felhelyezéskor és eltávolításkor, erős dysgnathiánál is
- **Nagy rugalmasság** – precíz bracket pozicionálás még eltérő beillesztési irányoknál is



REF 6127 Flakon 1000 g clear

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® model 2.0

Fényre kötő rezin fogászati modellek generatív előállításához



Javallatok

Fogászati munka és prezentációs modellek

Előnyei

- **Gyors és precíz** – megfelelő illeszkedés 100 µm rétegvastagság
- **Pontosan csiszolható** – a munkadarabok pontosan, nem kívánatos (pl. hőáramlás okozta) változások nélkül csiszolhatók
- **Karcálló felület** – A nagy keménység lehetővé teszi a deformáció nélküli bepróbálást
- **Alkalmas hőformázási technikához** – precíz megmunkálás, aligner vagy retainer modellek egy anyagból, vat csere nélkül



REF 6128 Flakon 1000 g beige
REF 6129 Tartály 5 kg beige

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® cast

Fényre kötő gyanta fogászati öntéshez és préseléshez használt kiégethető tárgyak generatív előállításához

Gyors öntés,
hagyományos
fűtés



Javallatok

Maradvány nélkül kiégethető öntéshez és préseléshez használt tárgyak előállítása

Előnyei

- **Reprodukálható** – egyszerű másolat készítés
- **Gyors finírozás** – a precíz nyomtatás kiváló minőségű reprodukciót biztosít
- **Nagy mérettartás és él szilárdság** – megbízhatóan ellenőrizhető az okklúzió és az oldalirányú mozgások
- **Finírozás korai szakaszban** – tárgyak műszert kímélő finírozása még a zöld állapotban is
- **Kiváló kompatibilitás** – használható kereskedelmi forgalomban kapható foszfát cementekkel
- **Szennyeződésektől mentes restaurációk** – a V-Print cast maradvék nélkül kiég



REF 6045 Flakon 1000 g blue

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® Try-In

Fényre kötő rezin kivehető fogpótlások fogpróbájának generatív előállításához

Javallatok

Teljes- és részleges kivehető fogpótlások fogpróbájához

Transzfer- és fűrősablonok

Korrektív és okkluzális lenyomatok

Előnyei

- **Előzetes ellenőrzések** – értékelhető és ha szükséges, kiigazítható az illeszkedés, az elzáródás, valamint a funkció, a fonetika és az esztétika a végső protézis elkészítése előtt



REF 6049 Flakon 1000 g beige

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

CAD / CAM anyag

Ragasztó anyagok

Csonkfelepítők

Ideiglenes anyagok

Fogor alábélelők

Lenyomat anyagok

Protetikai javításra

V-Print® tray

Fényre kötő rezin egyéni kanalak, alaplemezek és harapásrögzítők generatív gyártására

Javallatok

Egyéni lenyomat és funkciós kanalak

Alaplemezek és viaszminták alapjai a teljes protetikában

Harapásrögzítők

Előnyei

- **Időtakarékos** – nagy rétegvastagságban (200 µm-ig) nyomtatható
- **Torzításmentes lenyomatok** – a nagyon erős anyagnak köszönhetően
- **Univerzális** – minden típusú lenyomatanyaggal használható
- **Gyors és hatékony** – objektumnyomtatás beleértve a szélek alakítását, retenciós elemeket és mélyedéseket az implantációs lenyomatokhoz



REF 6047 Flakon 1000 g blue

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® c&b temp

Fényre keményedő rezin rendkívül esztétikus ideiglenes / hosszú távú ideiglenes restaurációk generatív előállításához



Javallatok

Hosszú távú ideiglenesek, mint a koronák, hidak és mock-up-ok

Előnyei

- **Magas töltöttségű nyomtatóanyag** – különösen hosszú távú alkalmazásra
- **Kiváló fizikai tulajdonságok:**
 - nagy hajlítószilárdság és rugalmassági együttható a stabil provizóriumokért
 - magas kopásállóság, hosszú ideig viselhető

- alacsony vízfelvétel és oldékonyság a mechanikai stabilitás érdekében
- ellenáll az elszíneződésnek – nem színeződik el a hosszú viselési idő alatt

- **Természetes fluoreszcencia** – kielégíti a magas esztétikai igényeket
- **Könnyen megmunkálható és polírozható**
- **Kompozit nyomtatóanyag** – gyorsan karakterizálható és adaptálható



REF 6897	Flakon 500 g A1
REF 6898	Flakon 500 g A2
REF 6899	Flakon 500 g A3
REF 6900	Flakon 500 g A3.5
REF 6901	Flakon 500 g B1
REF 6902	Flakon 500 g BL

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

V-Print® dentbase

Fényre kötő rezin protézis alaplemezek generatív előállításához



Javallatok

Kivehető fogpótlások alaplemezeihez

Előnyei

- **MD II.a besorolású** – biztonság és hosszú távú használat
- **Rendkívül esztétikus** – természetes gingiva szín

- **Nagy viselési komfort** – a precíz, egyedi gyártásnak köszönhetően
- **Kompatibilis** – a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre álló alábélelő anyagokkal
- **Biztonságos eltávolítás az építési platformról** – nagy zöld szilárdságnak köszönhetően
- **Felhasználóbarát** – íztelen és szagtalan
- **Biokompatibilis** – anélkül is, hogy mondanánk



REF 6048	Flakon 1000 g pink
----------	--------------------

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az összes nyomtatási partner itt található
www.voco.dental/3dprintingpartners

Structur CAD

CAD / CAM kompozit ideiglenes helyreállításokhoz


Javallatok

Legfeljebb két pillérű ideiglenes hidakhoz
Ideiglenes felépítményű koronákhoz
Ideiglenes koronákhoz

Előnyei

- Gyors és hatékony, precíziós illesztésű CAD / CAM termék ideiglenes restaurációkhoz
- Kiváló minőségű, esztétikus, a hosszan tartó, biztonságos viselés érdekében - különösen alkalmas hosszú távú ideiglenes és félig állandó helyreállításokhoz
- Kiváló élstabilitás
- Könnyű intraorális és extraorális polírozás és individualizálás
- Nincs szükség MMA alapozó használatára

Méretek korong

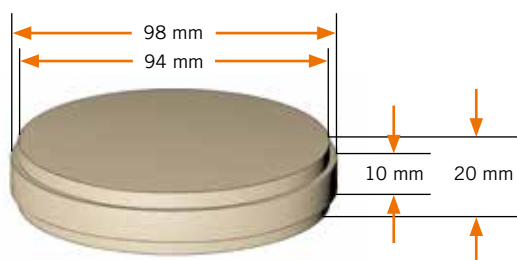

Méretek blokk



Klinikai eset



Nem kielégítő kiindulási állapot



Kiindulási állapot – közelkép



CAD / CAM híd a modellen



Structur CAD behelyezés után

Forrás: Dr. Felipe Araujo, Brazília



Blokk	
REF 6076	Blokk 5 x No. 40L A1
REF 6077	Blokk 5 x No. 40L A2
REF 6078	Blokk 5 x No. 40L A3
Korong ø 98 mm	
REF 6071	Korong A1 20 mm
REF 6072	Korong A2 20 mm
REF 6073	Korong A3 20 mm

VOCO TRUSTED PARTNER

Az eszközök folyamatosan bővülő listája megtalálható:
www.voco.dental/devicesstructurcad

Grandio® blocs

Nano-kerámia hibrid CAD/CAM blokk végleges restaurációkhoz

Elérhető PlanMill®-
hez is



Javallatok


Koronák, inlay-k, onlay-k, héjak
Implantátum koronák

Előnyei


- **Nagy teljesítmény:** nagyon magas töltőanyag-tartalom (86 tömeg %) a hosszú élettartamú, tartós restaurációk érdekében
- **Természetes megjelenés:** fogszerű fizikai értékek
- **Rendkívül pontos illeszkedés:** a vékony peremek is jól csiszolhatók
- **Antagonistabarát:** megőrzi az antagonisták vitalitását és alakját
- **Kezelhetőség:** kiváló tulajdonságok az intraorális polírozáshoz és javításhoz
- **Időmegtakarítás:** nincs szükség színterezésre vagy égetésre
- **Megbízható partnerek:** neves partnerek berendezéseinek beállítási adatai a VOCO-anyagokhoz a precízen elkészített restaurációkért

Méretek blokk

No. 14L

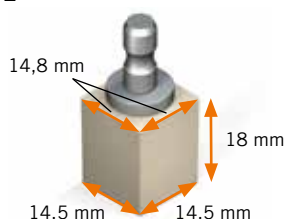

No. 12

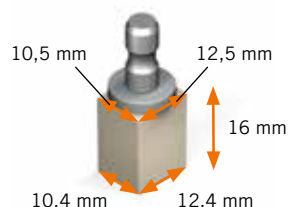

Klinikai eset



Kiindulási helyzet



Előkészített csomók



Hat hónap elteltével

Forrás: Prof. Breno de Mont'Alverne, Brazília



Univerzális

Alacsony transzlucencia (LT)

	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 LT	REF 6003	REF 6018
A2 LT	REF 6004	REF 6019
A3 LT	REF 6005	REF 6020
A3.5 LT	REF 6006	REF 6021
B1 LT	REF 6007	REF 6022
C2 LT	REF 6008	REF 6023
BL LT	REF 6009	REF 6024

Magas transzlucencia (HT)

	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 HT	REF 6012	REF 6027
A2 HT	REF 6013	REF 6028
A3 HT	REF 6014	REF 6029
A3.5 HT	REF 6015	REF 6030

PlanMill®

Alacsony transzlucencia (LT)

	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 LT	REF 6153	REF 6168
A2 LT	REF 6154	REF 6169
A3 LT	REF 6155	REF 6170
A3.5 LT	REF 6156	REF 6171
B1 LT	REF 6157	REF 6172
C2 LT	REF 6158	REF 6173
BL LT	REF 6159	REF 6174

Magas transzlucencia (HT)

	5 x No. 12	5 x No. 14L
A1 HT	REF 6162	REF 6177
A2 HT	REF 6163	REF 6178
A3 HT	REF 6164	REF 6179
A3.5 HT	REF 6165	REF 6180

VOCO



TRUSTED
PARTNER

Az eszközök folyamatosan bővülő
listája megtalálható:

www.voco.dental/devicesgrandio

Grandio® disc

Nano-kerámia hibrid CAD/CAM korong végleges restaurációkhoz

Multikolorként
is kapható

Javallatok


Koronák, inlay-k, onlay-k, héjak

Implantátum koronák

Előnyei


- **Nagy teljesítmény:** nagyon magas töltőanyag-tartalom (86 tömeg %) a hosszú élettartamú, tartós restaurációk érdekében
- **Természetes megjelenés:** fogszerű fizikai értékek
- **Antagonistabarát:** megőrzi az antagonisták vitalitását és alakját
- **Kiváló esztétika:** az Invisible Layer Technology sima színátmenetet hoz létre multikolor helyreállításoknál
- **Kezelhetőség:** kiváló tulajdonságok az intraorális polírozáshoz és javításhoz
- **Nincs szükség égetésre:** időmegtakarítás
- **Megbízható partnerek:** neves partnerek berendezéseinek beállítási adatai a VOCO-anyagokhoz a precízen elkészített restaurációkért

Méretek korong

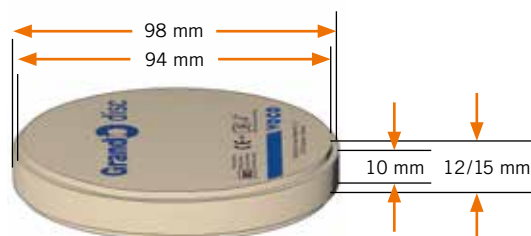

Láthatatlan Réteg Technológia – a természetes fog gradiens mindössze három réteggel a multikolor Grandio korongokban

A restaurációs anyag három rétegre oszlik: egy az incizális területre, egy az alap fogszínre (dentinréteg) és egy a nyaki területre. A Grandio multicolor korong színezése nagyon élethűvé teszi a helyreállítást, ami az anyagtulajdonságoknak köszönhetően mindössze ezzel a három réteggel megvalósítható.

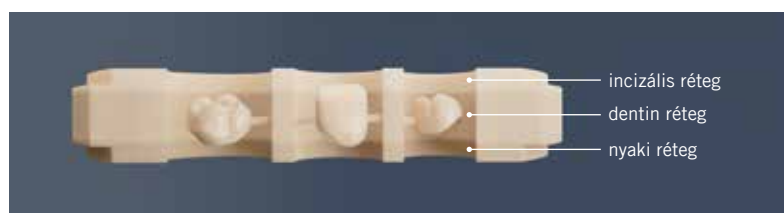

Grandio® disc

Alacsony transzlucencia

(LT) 1 x 15 mm, ø 98 mm

A1 LT REF 6050

A2 LT REF 6051

A3 LT REF 6052

A3.5 LT REF 6053

B1 LT REF 6054

C2 LT REF 6055

BL LT REF 6056

Magas transzlucencia

(HT) 1 x 15 mm, ø 98 mm

A1 HT REF 6057

A2 HT REF 6058

A3 HT REF 6059

A3.5 HT REF 6060

Grandio® disc multicolor

Fog alapszíne 1 x 12 mm, ø 98 mm 1 x 15 mm, ø 98 mm

A1 REF 6248 REF 6216

A2 REF 6249 REF 6217

A3 REF 6250 REF 6218

A3.5 REF 6251 REF 6219

B1 REF 6252 REF 6220

C2 REF 6253 REF 6221

VOCO

TRUSTED
PARTNER

Az eszközök folyamatosan bővülő
listája megtalálható:

www.voco.dental/devicesgrandio

CediTEC® DT

CAD/CAM kompozit kivehető fogsorok protézis fogainak készítéséhez



Javallatok

Önálló fogpótlások és hidak, valamint komplett, kivehető fogsorok készítéséhez

Előnyei

- Polimerizált kompozit a kiváló minőségű és tartós fogpótlás érdekében
- Áttetsző árnyalat és természetes fluoreszcencia a magas fokú esztétika érdekében
- Egyedi és pontosan illeszkedő, bármikor reprodukálható fogsorok készítése
- Könnyen természetes fényűre polírozható
- Egyszerűen testreszabható MMA alapozó használata nélkül
- Esztétikus, precíz, egyedi – ez a CediTEC / V-Print dentbase rendszerrel készült fogor



REF 6085	Disc A1 20 mm, ø 98 mm
REF 6086	Disc A2 20 mm, ø 98 mm
REF 6087	Disc A3 20 mm, ø 98 mm
REF 6088	Disc BL 20 mm, ø 98 mm



Az eszközök folyamatosan bővülő listája megtalálható:

www.voco.dental/devicesceditecdt

CediTEC®

Ragasztó rendszer a műfogak protézis alaplemezbe rögzítéséhez



Javallatok

Hagyományos protézisfogak és CAD/CAM rendszerrel készült egyedi fogak és hidak CAD/CAM rendszerrel készült protézisalapra rögzítéséhez

Protézisfogak rögzítése javítás vagy pótlás során

Előnyei

- Hiba nélküli, buborék mentes keverés
- Csak a ténylegesen szükséges anyagmennyiség keveredik össze
- Könnyű és közvetlen applikálás
- Utólagos kiegészítés lehetséges
- Használható más rendszerekkel és hagyományos PMMA-val is
- Esztétikus, precíz, egyedi – ez a CediTEC / V-Print dentbase rendszerrel készült fogor

auto
mix

REF 6082	Készlet patron 80 g CediTEC Adhezív, flakon 4 ml CediTEC Primer, tartozékok
REF 2202	20-as mintakészítő szilikonhoz, 50 db
REF 2245	Easy Brush, applikációs nyél, 50 db

CediTEC® DB

Nagyon ellenálló PMMA, kivehető műfogsor
protézisalapjainak gyártásához

Javallatok

Protézisalapok gyártása kivehető műfogsorokhoz

Előnyei

- PMMA nagy ütésállósággal és szilárdsággal a hosszú viselési időtartam eléréséért
- Kiváló minőségű fogpótlások, bármikor reprodukálhatók
- Nagyon jó polírozhatóság - az individualizáció bármikor lehetséges
- Esztétikus, pontos, egyedi fogpótlás a CediTEC rendszerrel

Alternatíva:

V-Print dentbase protézis
alaplemezek generatív
előállításához
(lásd 56. oldal)




REF 6195	Korong pink 30 mm, ø 98 mm
REF 6197	Korong orange-pink 30 mm, ø 98 mm

CAD / CAM rendszer egyedi fogpótlásokhoz



CediTEC DT korongból kimart
fogívek

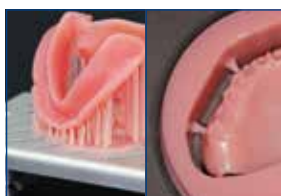

A fogsoralap V-Print dentbase
3D-nyomtatással készülhet, vagy
marással a CediTEC DB anyagból



Fogsor alaplemezek és fogak
közvetlenül gyártás után,
ragasztáshoz előkészítve



A CediTEC adhezív felvitele köz-
vetlenül a fogmederbe egyenként
és/vagy szegmensenként



Elkészült és személyre szabott
teljes műfogsor



Előlnézet

Ragasztó anyagok

Oldal		típus	kiszerezés	inlay-k / onlay-k			Felépítmények										Maryland hidak	héjak	csapok					attachments ⁴	orthodontic bands	steel crowns						
							koronák, hidak			Támasztó koronák / egyéb (szintén extraorálisan)				Felépítmények, hibríd felépítmények, más mezosztruktúrák (extraorálisan)																		
				kerámia ²	kompozit	fém	kerámia ²	kompozit	fém	PMMA	kerámia ²	kompozit	fém	PMMA	kerámia ²	kompozit	fém	PMMA	kerámia ²	kompozit	fém	kerámia ²	kerámia ²	fém	szénszálas	üvegszálas	kvarc szálas					
Ragasztó anyagok																																
63	Bifix Veneer LC	kompozit	NDT [®] -fecskendő	•	•																	•										
64	Bifix SE	kompozit	QuickMix fecskendő	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•				•	
65	Bifix QM	kompozit	QuickMix fecskendő	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	•				•	
65	Bifix Hybrid Abutment	kompozit	QuickMix fecskendő				• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	•	•	•													•	
66	Meron Plus QM	rezinmel meg-erősített üveg ionomer ¹	QuickMix fecskendő	•		•	•		•													•	•	•	•	•					•	
67	Meron	üveg ionomer ¹	kapszula	•		• ³	•		• ³														•	•							•	
67	Meron	üveg ionomer ¹	kézi keverés	•		• ³	•		• ³														•	•							•	
67	Aqua Meron	üveg ionomer ¹	kézi keverés	•		•	•		•														•	•							•	
68	Quick Up	kompozit	QuickMix fecskendő																												•	
71	Rebilda DC	kompozit	QuickMix fecskendő / kartus																					•	•	•	•					
72	Grandio Core Dual Cure	kompozit	QuickMix fecskendő																						•	•	•					

¹ üveg ionomer ragasztócement² szilikát / cirkónium-dioxid / alumínium-oxid kerámia³ implantátum felépítményekhez is⁴ gömb- Locator[®]- és teleszkóphorgonyzási-elemek és más retenciók beragasztásáraA Locator[®] nem a VOCO GmbH bejegyzett védjegye.

Bifix® Veneer LC · Bifix® Veneer Try-In

Fényre keményedő nano-hibrid kompozit ragasztócement



Javallatok

Kerámia és kompozit héjak, inlay-k és onlay-k végleges rögzítése 2 mm-nél nem vastagabb rétegben, a pótlás megfelelő transzlucenciája mellett

Előnyei

- Intuitív és hatékony árnyalatrendszer:
a három árnyalat (bright, clear, warm) megkönnyíti az árnyalatok kiválasztását és lehetővé teszi az esztétikai eredmény megfelelő irányba módosítását
- Bepróbáló paszták:
a végeredmény előre ellenőrizhető és a pontos árnyalat kiválasztható
- Megfelelő applikációs kanül:
a műanyag kanülnek köszönhetően megakadályozza a héj elszíneződését vagy károsodását
- Optimális konzisztencia:
az anyag elég stabil ahhoz, hogy a héjra felhordva ne folyjon meg, ugyanakkor kellően folyékony ahhoz, hogy lehetővé tegye a könnyű és határozott pozicionálást a fogon
- A felesleges anyag könnyen eltávolítható:
rövid részleges polimerizáció után
- A héj biztonságos felszedése és pozicionálása:
a rugalmas felhordási segédeszköznek, a tapadós hegyű Sticky Timnek köszönhetően
- System set:
Tartalmazza a teljes héjragasztási munkafolyamathoz az összes szükséges elemet



Bifix Veneer LC

REF 1428	Készlet Bifix Veneer LC fecskendő 3 × 2 g (bright, clear, warm), Bifix Veneer Try-In fecskendő 3 × 2,5 g (bright, clear, warm), tartozékok
REF 1429	System készlet Bifix Veneer LC fecskendő 3 × 2 g (bright, clear, warm), Bifix Veneer Try-In fecskendő 3 × 2,5 g (bright, clear, warm), Vocoid fecskendő 2 ml, Ceramic Bond <i>SingleDose</i> 20 db, Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db, Sticky Tim 10 db, tartozékok
REF 1423	Fecskendő 2 g bright, tartozékok
REF 1424	Fecskendő 2 g clear, tartozékok
REF 1425	Fecskendő 2 g warm, tartozékok

Bifix Veneer Try-In

REF 1430	Fecskendő 2,5 g bright, tartozékok
REF 1431	Fecskendő 2,5 g clear, tartozékok
REF 1432	Fecskendő 2,5 g warm, tartozékok
REF 2135	Applikációs kanülök 50-es típus, 30 db
REF 2248	Sticky Tim, 70 db

Klinikai eset



Kiinduló helyzet



Előkészítés



Szilanizálás



Futurabond U applikálása



Bifix Veneer LC (clear) applikálása



Végeredmény

Forrás: Prof. Carlos Torres, Brazília

Bifix® SE

Kettős kötésű kompozit-bázisú ragasztórendszer bondozás nélkül alkalmazható



Javallatok

Kerámiából, cirkónium-dioxidból, kompozitból és fémből készült inlay-k, onlay-k, koronák, hidak (kivéve Maryland híd) végleges ragasztása

Fém, kerámia, cirkónium-dioxid és üvegszál erősítésű csapok beragasztása



Előnyei

- Biztonságosan tapad a foghoz és a restaurációhoz
- Gyors alkalmazás: nem kell savazni, nem kell bondozni
- Szagtalan
- Könnyen kezelhető
- Hosszú távú tartósság
- Könnyű a felesleg eltávolítása
- Minimális rétegvastagság 10 nm, pontosan illeszkedő ragasztás anélkül, hogy megemelné a harapást
- Alkalmazható cirkónium-dioxidhoz is
- Endo-keverő kanülök minden csomagban – a legpontosabb applikálás a gyökércsatornába

REF 1784	Készlet QuickMix fecskendő 3 x 5 g (univerzális, transzparens, fehér opák), tartozékok
REF 1785	QuickMix fecskendő 5 g univerzális, tartozékok
REF 1786	QuickMix fecskendő 5 g transzparens, tartozékok
REF 1787	QuickMix fecskendő 5 g fehér opák, tartozékok
REF 2194	Keverő kanülök 14-es típus, 50 db
REF 2195	Keverő kanülök 15-ös típus (1-es típusú intraorális véggel), 50 db

Applikáció



1 - 2 sec.



180 - 240 sec.



A felesleg egyszerű eltávolítása a zselé-fázisban.

A felület méretétől függően 1 - 2 mp.-es megvilágítás polimerizációs lámpával. Ezt követően a zselészerű felesleg scalerrel vagy hasonló eszközzel egyszerűen eltávolítható.

Bifix® QM

Univerzális, kompozit alapú, kettős kötési rögzítőrendszer

Cirkónium-dioxid
ragasztásához is

Javallatok

Adhezív ragasztásra inlayk, onlayk, fazetták, héjak, koronák, részleges koronák, hidak, csapok, adhezív hidak (Maryland-híd) esetén

Előnyei

- Minden anyaghoz (kerámia, cirkónium-dioxid, fém, kompozit-inlay)
- Buborék mentes, hibátlan keverés
- Közvetlen applikáció
- Kiváló kötés dentinhez, zománchoz és fémhez
- Speciális egy lépéses kerámiaragasztó a kerámiához történő optimális kötés kialakításához
- Röntgenárnyékot ad
- Három színben
- Rendelkezésre áll minden az egyben készletben is

20 sec
light-curingDC
dual-curingauto
mix3
shades

REF 1217	Készlet QuickMix fecskendő 10 g U (univerzális), Futurabond DC flakon 4 ml folyadék az 1-es és 2-esből egyaránt, Ceramic Bond flakon 5 ml, tartozékok
REF 1218	QuickMix fecskendő 10 g univerzális, tartozékok
REF 1219	QuickMix fecskendő 10 g transzparens, tartozékok
REF 1759	QuickMix fecskendő 10 g fehér opák, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix

A további tartozékokat lásd 95/96 o.

Bifix® Hybrid Abutment

Univerzális, kettős kötési kompozit intraorális és extraorális alkalmazásra

Erősen opák
árnyalatokkal

PLAY VIDEO



Javallatok

Fémről, kerámiáról, cirkónium-dioxidból és polimerből (kompozit, hibrid kerámia vagy PMMA) készült szuprakonstrukciók tartós extra és intraorális rögzítése

- (beleértve a mezostruktúrákat) hagyományos ragasztó vagy titánbázisokon
- (extraorális alkalmazás), egyedi titánból vagy cirkónium-dioxidból készült
- felépítményekre (extra- és intraorális), valamint kemény foganyagra

Előnyei

- All-in-one – az összes ismert fogászati anyag végleges ragasztása
- Kiemelkedő rugalmasság – intraorális alkalmazás a praxisban, extraorális a laboratóriumban
- Magas esztétika – a sötét anyagok tökéletes maszkolása erősen opák árnyalatokkal
- Try-In pasztákkal – pontos árnyaltszimuláció hibrid felépítményeken, felépítmény koronákon és fogcsonkokon

DC
dual-curingauto
mix3
shades

REF 2410	Implant készlet – QuickMix fecskendő 10 g (univerzális HO), Try-In fecskendő 2,5 g, Ceramic Bond flakon 5 ml, Futurabond U SingleDose 5 db, tartozékok
REF 2411	QuickMix fecskendő 10 g (univerzális HO), Try-In fecskendő 2,5 g, tartozékok
REF 2412	QuickMix fecskendő 10 g (fehér HO), Try-In fecskendő 2,5 g, tartozékok
REF 2413	QuickMix fecskendő 10 g (áttetsző), Try-In fecskendő 2,5 g, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix

A további tartozékokat lásd 95/96 o.

Ceramic Bond

Szilánizációs ágens porcelán és kompozitok között (beleértve a cirkónium-dioxidot is)

Cirkónium-dioxid
ragasztásához is

Javallatok

A Ceramic Bond az optimális kémiai kötőerő elérése érdekében használható közvetett restaurációknál, úgymint szilikát kerámiák, alumínium-oxid, cirkónium-dioxid, fém vagy kompozit, valamint alkalmas üvegszál erősítésű kompozit csapok, fémek és metakrilát alapú ragasztó kompozitok közti alkalmazásra.

Előnyei

- Ideális feltételeket teremt a tartós kötés kialakulására az indirekt restaurációk és a beragasztó kompozitok között
- Nem szükséges összekeverni

A SingleDose kiszerelés előnyei

- Egyszerű, gyors és higiénikus
- Más eszközt nem igényel
- Semmilyen pozícióban nem ömlik ki



REF 1106 Flakon 5 ml
REF 1107 SingleDose 50 db, tartozékok

Meron Plus QM

Rezinnel megerősített, üveg ionomer ragasztócement




Javallatok

Ragasztáshoz

- fém inlay-k, onlay-k, koronák és hidak
- nagy szilárdságú (például cirkónium-oxid-alapú vagy lítium-diszilikát stb.) teljes kerámia inlay-k, onlay-k, koronák és hidak
- fém, kerámia és üvegszálerősítésű csapok
- fogszabályozó készülékek ragasztására

Előnyei

- Kiváló tapadás a foghoz
- Precíz széli záródás
- Nedvesség és saválló
- Önsavazó: biztonságos és gyors kötés primer vagy kondicionáló nélkül
- A felesleges anyag rövid fotopolimerizálást követően azonnal és egyszerűen eltávolítható
- A QuickMix fecskendő biztosítja a könnyű applikálhatóságot és a megbízható keverési arányt

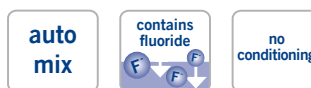

REF 1727 QuickMix fecskendő 8,5 g, tartozékok
REF 1728 QuickMix fecskendő 3 x 8,5 g, tartozékok
REF 2261 Dispenser – QuickMix
REF 2189 Keverő kanülök 10-es típus, 50 db

Meron (Applikációs kapszula)

Röntgenárnyékot adó üveg ionomer ragasztócement

Javallatok

Ragsztásra

- Fémalapú koronák, hidak, inlay-k és onlay-k
- Nagyszilárdságú teljes kerámia koronák és hidak
- Fémalapú és nagy szilárdságú teljes kerámia koronák és hidak implantátum felépítményekhez
- Fém gyökércsapok vagy indirekt fém csapos csomkfelépítések
- Előre gyártott acél koronák ragasztása
- Fogszabályozó szalagok

Előnyei

- Jókorai anyagmennyiség áll rendelkezésre egy kapszulában – alkalmas nagy restaurációkhoz
- Nagyon jó nedvesítő képesség
- Stabil
- Vékony ragasztási filmréteg
- Erősen áttetsző a magas szintű esztétikáért
- Az anyagfelesleg egyszerűen eltávolítható
- Folyamatos fluorid kibocsátás
- Nem ismert az anyaggal kapcsolatos posztoperatív érzékenység



REF 1242	Applikációs kapszulák 50 db
REF 1243	Applikációs kapszulák 150 db
REF 2331	Applicator – AC típus 1

Meron

Üveg ionomer ragasztócement

Javallatok

Korona, híd, inlay, onlay, csap és fogszabályozó szalagok ragasztása

Előnyei

- Kis mértékű oldékonyság a szájbán
- Alacsony savtartalom
- Biokompatibilis
- Könnyen applikálható



REF 1086	Készlet por / folyadék (35 g / 15 ml)
REF 1090	Mini készlet por / folyadék (15 g / 7 ml)

Aqua Meron

Vízzel keverendő üveg ionomer ragasztócement

Javallatok

Korona, híd, inlay, onlay, csap és fogszabályozó szalagok ragasztása

Előnyei

- Különösen jó folyóképeség
- Kis mértékű oldékonyság a szájbán
- Alacsony savterhelés
- Biokompatibilis



REF 1172	Por 35 g a csepegtető flakonnal
----------	---------------------------------

Quick Up®

Önkötő ragasztóanyag finommechanikai rögzítőkhöz és a fogsor szekunder részeihez



Javallatok

Íny színű kompozit finommechanikai rögzítők, mint pl. gömb-, Locator®- és teleszkópelhorgonyzású-elemek, illetve más akril alapú protézisen belüli retenciós beragasztására

Szekunderrészek újra rögzítésére (pl. stégek) akril alapú protézisen belül

Előnyei

- Szék mellett gyorsan és egyszerűen használható
- Nagy kötési szilárdságú
- Az azonnali használatra kész készlet tartalmazza a pontosság ellenőrzéséhez és a primér struktúrák (mint például az implantátumok) védelméhez szükséges kiblokkoló anyagot
- Az önkötő ragasztó és a fényre kötő korrekciós anyag ideális kombinációja

A Locator® nem a VOCO GmbH bejegyzett védjegye.



REF 1625	Készlet QuickMix fecskendő 7,5 g, Quick Up LC fecskendő 2 g, adhezív flakon 4 ml, Fit Test C & B QuickMix fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 1626	QuickMix fecskendő 7,5 g, tartozékok
REF 1627	Quick Up LC fecskendő 2 g, tartozékok
REF 1628	Adhezív flakon 4 ml, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus, 50 db
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db
REF 2247	Single Tim, applikációs ecset, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db

BrackFix®

Fényre kötő bracket ragasztó rendszer



Javallatok

Ortodonciás fém és a kerámia bracketek direkt ragasztása

Előnyei

- A ragasztó optimális konzisztenciája: a bracket stabil elhelyezése a fog felszínén
- Biztos adhézio fém és kerámia bracketekhez
- Fotopolimerizáció: elegendően hosszú munkaidő
- A polimerizáció után azonnal terhelhető
- Fluoreszcens: lehetővé teszi a ragasztóanyag maradványok gyors és kíméletes eltávolítását a bracket eltávolítása után



REF 1205	Készlet adhezív fecskendő 2 x 4 g, Primer flakon 6 ml, tartozékok
REF 1206	Készlet SE adhezív fecskendő 2 x 4 g, Primer SE <i>SingleDose</i> 40 db, tartozékok
REF 1207	Adhezív fecskendő 2 x 4 g
REF 1208	Primer flakon 6 ml
REF 1209	Primer SE <i>SingleDose</i> 50 db, tartozékok
REF 2247	Single Tim, applikációs ecset, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db

Rebilda® Post

Üvegszállal erősített kompozit csap




Javallatok


Intrapulpalis csap felépítésre, a koronai restauráció megtámasztására és elhorgonyzására, azokban az esetekben, amikor elégtelen foganyag áll csak rendelkezésre

Előnyei


- Dentinhez hasonló tulajdonságok, nagy hajlítószilárdság
- Nagy radiopacitás (350 %AI)
- Anatómiai forma
- Adhezív ragasztás
- Eltávolítható
- Minden anyag a szettben összeillik
- A csap behelyezése és a felépítés egy lépésben
- **Futurabond® DC · Futurabond® U**
 - biztonságos önsavazás
 - nagy tapadási erő kiegészítő savazás nélkül
- **Rebilda® DC**
 - alkalmas csapok beragasztására
 - alakítható, mint a dentin, nagyon jó fizikai tulajdonságok
 - alacsony kötési hőmérséklet

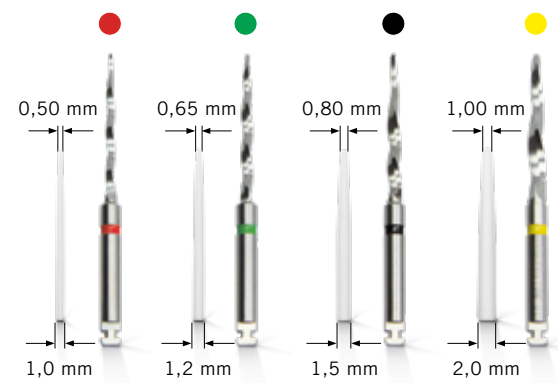

A csapok ábrázolása nem a tényleges méretben.

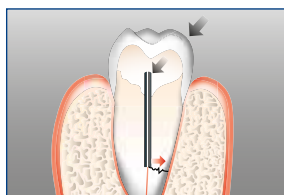

Fém csap – gyökérfractura

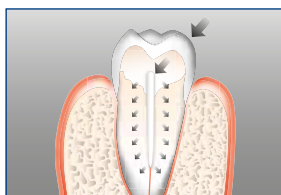

Rebilda Post – dentinhez hasonló E-modulus

REF 1770	Készlet 5 csap mindegyikből (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 fúró mindegyikből (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm)
REF 1771	Készlet 5 csap mindegyikből (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 fúró mindegyikből (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond flakon 5 ml, Futurabond DC SingleDose 15 db, Rebilda DC QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok
REF 1782	Készlet II 5 csap mindegyikből (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 fúró mindegyikből (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond flakon 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 db, Rebilda DC QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok
REF 1775	Csap 10 (ø 1,0 mm), 5 db
REF 1772	Csap 12 (ø 1,2 mm), 5 db
REF 1773	Csap 15 (ø 1,5 mm), 5 db
REF 1774	Csap 20 (ø 2,0 mm), 5 db
REF 1780	Fúró 10 (ø 1,0 mm), 1 db
REF 1777	Fúró 12 (ø 1,2 mm), 1 db
REF 1778	Fúró 15 (ø 1,5 mm), 1 db
REF 1779	Fúró 20 (ø 2,0 mm), 1 db

Rebilda® Post GT

Kötegelt üvegszállal erősített kompozit csap



Javallatok



Endodonciaiilag kezelt fogak gyökércsapos csomfelfépítése

Előnyei

- A mechanikusan előkészített gyökércsatornák optimális helyreállítása
- Egyszerű alkalmazás
- Időt takarít meg és csökkenti a foganyag eltávolításának mértékét, mivel nem szükséges a gyökércsatorna túltágítása a csap részére, ami a hagyományos gyökércsapoknál gyengíti a fogat
- Optimálisan illeszkedik az összes csatorna morfológiához és geometriához
- A készlet összes anyaga tökéletes rendszert alkot
- **Futurabond® U**
 - biztonságos önsavazás
 - nagy tapadási erő kiegészítő savazás nélkül
- **Rebilda® DC**
 - alkalmas csapok beragasztására
 - alakítható, mint a dentin, nagyon jó fizikai tulajdonságok
 - alacsony kötési hőmérséklet

REF 1972	Készlet 5 csap mindegyikből (~ Ø 0,8 mm, ~ Ø 1,0 mm, ~ Ø 1,2 mm, ~ Ø 1,4 mm), Ceramic Bond flakon 5 ml, Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db, Rebilda DC QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok
REF 1973	Csap 4 (~ Ø 0,8 mm), 5 db
REF 1974	Csap 6 (~ Ø 1,0 mm), 5 db
REF 1975	Csap 9 (~ Ø 1,2 mm), 5 db
REF 1976	Csap 12 (~ Ø 1,4 mm), 5 db

Applikáció

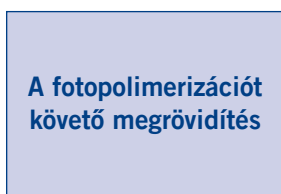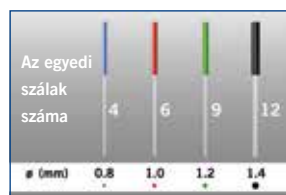

Rebilda® DC

Kettős kötésű, folyékony csontfelépítő és csap rögzítő rendszer



Javallatok

Élő és elhalt fogak adhezív csont-felépítése
Kompozit-gyökércsapok rögzítése

Előnyei

- **Dentinszerű tulajdonságok:** dentinszerűen vágható
- **Kettős kötés:**
 - Használható gyökércsatornában gyökércsapok ragasztására (pl. Rebilda Post)
 - Gyors polimerizáció fény és a megbízható kiegészítő kémiai kötés révén
- **Könnyű kezelhetőség:**
 - Folyékony konzisztencia – tökéletesen adaptálható
- **10 g-os QuickMix fecskendőben és 50 g-os patronban kapható**
 - Az optimalizált, anyagtakarékos, kis keverőcsúcsok
 - Könnyű hozzáférés a poszterior területekhez az intraorális végekkel

Rebilda DC fluorescent

Látható a fogorvos számára – esztétikus a páciens számára:

- UVA fényben fluoreszkál – jól látható az anyagfelesleg és a csontfelépítés határai egyértelműen felismerhetők, különösen a mély, subgingivális szinteken
- Kiváló esztétika – természetes fény mellett dentin színű, így ideális esztétikus pótlásokhoz


Klinikai eset



A terápiát igénylő 11-es fog



A megnyitott gyökércsatorna a gyökértöméssel

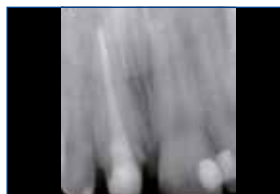

Gyökércsatorna csúcsig érő, falálló gyökértöméssel



A gyökércsatornába behelyezett Rebilda Post csap



A kész felépítés – készen áll a lenyomatvételre

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország



REF 1395	Készlet patron 50 g dentin, Futurabond DC flakon 4 ml folyadék az 1-es és 2-esből egyaránt, Dispenser típus 3, tartozékok
REF 1396	Patron 50 g dentin, tartozékok
REF 1397	Patron 50 g kék, tartozékok
REF 1398	Patron 50 g fehér, tartozékok
REF 1402	Készlet QuickMix fecskendő 10 g dentin, Futurabond DC flakon 4 ml folyadék az 1-es és 2-esből egyaránt, tartozékok
REF 1403	QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok
REF 1404	QuickMix fecskendő 10 g kék, tartozékok
REF 1405	QuickMix fecskendő 10 g fehér, tartozékok
REF 2259	Dispenser – típus 3
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Keverő kanülök 11-es típus QuickMix fecskendő, 50 db
REF 2139	Intraorális végek 1-es típus QuickMix fecskendő, 50 db, a gyökércsatornába applikáláshoz
REF 2142	Intraorális végek 4-es típus QuickMix fecskendő, 50 db
REF 2192	Keverő kanülök 12-es típus patronos, 50 db
REF 2141	Intraorális végek 3-as típus patronos, 50 db
REF 2199	Keverő kanülök 19-es típus patronos, hajlítható, 30 db
Rebilda DC fluorescent	
REF 1399	Patron 50 g fluoreszcens dentin, tartozékok
REF 1406	QuickMix fecskendő 10 g fluoreszcens dentin, tartozékok

Grandio® Core Dual Cure

Folyékony, kettős kötésű, nano-hibrid csomkfelépítő anyag

Javallatok

Vitális és nem vitális fogak csomkfelépítése
Gyökércsapok beragasztása

Előnyei

- Kiváló fizikai tulajdonságok, tartós csomkfelépítések
- 77 tömeg %-os töltöttség
- Nano-hibrid technológia
- Három színben: dentin, kék és fehér
- QuickMix fecskendő: optimális applikáció és tökéletes keverési arány
- Folyékony
- Kényelmes applikáció a 4-es típusú intraorális végződéssel



REF 1910	QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok
REF 1911	QuickMix fecskendő 10 g kék, tartozékok
REF 1912	QuickMix fecskendő 10 g fehér, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Keverő kanülök 11-es típus QuickMix fecskendő, 50 db
REF 2142	Intraorális végek 4-es típus QuickMix fecskendő, 50 db

Klinikai eset



Nagyarányú foganyag veszteség az anterior területen az exkaváció után



A Grandio Core Dual Cure-ral felépített csomk készen áll a lenyomatvétellel



A kész helyreállítás

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország

Structur 3

Önkötő kompozit ideiglenes koronák és hidak készítéséhez

POLÍROZÁS
NÉLKÜL
IS FÉNYES!

Javallatok

Ideiglenes koronák, hidak, inlay-k, onlay-k, részleges koronák, héjak és ideiglenes csapok készítéséhez

Hosszú távú ideiglenes restaurációk készítéséhez

Kompozitból, polikarbonátból vagy fémből készült előre gyártott ideiglenes koronák kiegészítésére

Előnyei

- **Alkalmazás**
 - gyors, egyszerű és megbízható, az 1:1 patronos rendszernek köszönhetően
 - rövid kötési idő
 - az elasztikus fázis lehetővé teszi a könnyű eltávolítást a preparált fogról
 - polírozás nélkül is fényes – csupán az inhibíciós réteget kell eltávolítani
- **Esztétika**
 - természetes fényesség és fluoreszcencia
 - 6 árnyalatban áll rendelkezésre
- **Tartósság**
 - nagy nyomószilárdság
 - kiváló törés szilárdság



REF 2500	Készlet patron 50 ml A2, Dispenser típus 2, tartozékok	
REF 2158	Dispenser – típus 2	
REF 2261	Dispenser – QuickMix	
REF 2185	Keverő kanülök 6-os típus patronos, 50 db	
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus QuickMix fecskendő, 50 db	

Színek	Patron 50 ml, keverő kanülök 6-os típus	Patron 5 × 50 ml, keverő kanülök 6-os típus
A1	REF 2503	–
A2	REF 2504	REF 2512
A3	REF 2505	REF 2513
A3.5	REF 2506	–
B1	REF 2507	–
BL	REF 2510	–
Színek	QuickMix fecskendő 5 ml, keverő kanülök 10-es típus	
A1	REF 2515	
A2	REF 2516	
A3	REF 2517	

Klinikai eset



Kiindulási helyzet



Preparált csontok



A kész ideiglenes híd



A megnyerő végeredmény

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország

CAD / CAM anyag

Ragasztó anyagok

Csonklepítők

Ideiglenes anyagok

Fogor alábélelők

Lenyomat anyagok

Protetikai javításra

Structur 2

Önkötő kompozit ideiglenes koronák és hidak készítéséhez



Javallatok

Esztétikus ideiglenes koronák, hidak, inlay-k és onlay-k készítése

Előnyei

- Egyszerű és gyors munkafolyamat
- Egy percnél rövidebb kötési idő a szájban
- Könnyen alakítható és polírozható
- A természetes esztétika érdekében 7 árnyalatban kapható
- Tartós ideiglenes pótlás
- Magas forma- és színtartósság
- A csekély mértékű anyagvesztés miatt rendkívül gazdaságos
- Természetes fluoreszcencia



SC
self-curing

auto
mix

temporary

7
shades

REF 1478	Készlet patron 75 g A3, Dispenser típus 2, tartozékok
REF 1499	Készlet patron 75 g A2, Dispenser típus 2, tartozékok
REF 2158	Dispenser – típus 2
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185	Keverő kanülök 6-os típus patronos, 50 db
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus QuickMix fecskendő, 50 db

Színek	Patron 75 g, keverő kanülök 6-os típus	Patron 5 x 75 g, keverő kanülök 6-os típus
A1	REF 1479	–
A2	REF 1480	REF 1492
A3	REF 1481	REF 1491
A3.5	REF 1490	–
B1	REF 1482	–
C2	REF 1486	–
BL	REF 1485	–

Színek	QuickMix fecskendő 8 g, keverő kanülök 10-es típus
A1	REF 1309
A2	REF 1310
A3	REF 1311
B1	REF 1312

Klinikai eset



Közelkép



A wax-up részletes képe



Közelkép a Structur 2-vel a elkészített provizóriumról

Forrás: Irfêo Saraiva de Camargo, Santo Agostinho / Brazília



Nem kielégítő esztétikai helyzet a hiányzó metszőfogak miatt, meziális elfordulás és fekete háromszög a középső metszőfogak között



A preparációval tengelyirányban korrigált fogak



Structur 2 SC -ből készült provizórium. Az esztétikai előnye már láthatóan biztosított az ideiglenes pótlás révén

Forrás: Dr. Wentaschek, Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Németország

Structur Premium

Rendkívül esztétikus kompozit ideiglenes koronák és hidak készítéséhez
pisztolyos kiszerezésben



Javallatok

Rendkívül esztétikus koronák, hidak, inlay-k és onlay-k elkészítéséhez

Előnyei

- Esztétikus, mint a kerámia
- Magas forma- és színstabilitás
- Természetes fluoreszcencia
- Magas fényű
- Kemény, mint a porcelán
- Magas törés-ellenállóság
- Könnyen kezelhető
- Könnyen csiszolható és polírozható
- Tartós ideiglenes pótlás
- A csekély mértékű anyagveszteség miatt rendkívül gazdaságos



REF 1719	Patron 5 x 75 g A3, tartozékok
REF 2158	Dispenser – típus 2
REF 2185	Keverő kanülök 6-os típus patronos, 50 db
Patron 75 g, keverő kanülök 6-os típus	
Színek	
A1	REF 1712
A2	REF 1713
A3	REF 1714
A3.5	REF 1717
B1	REF 1718
BL	REF 1716

Ideiglenes készlet

Provizóriumok készítéséhez szükséges anyag, ideiglenes tömőanyag és ideiglenes ragasztócement

Javallatok

A javallatokkal kapcsolatos további információk a Structur 3, a Provicol QM és a Clip Flow termékoldalain található

Előnyei

- Ideiglenes fogpótlások polírozás nélkül is fényes felülettel
- Fényre keményedő ideiglenes helyreállító anyag inlay-khez és onlay-khez, tartós és ellenáll a nyálnak
- Ideiglenes, eugenol mentes ragasztóanyag
- Kalcium-hidroxiddal és bakteriosztatikus hatással



REF 2502	Structur 3 patron 50 ml A3, Provicol QM QuickMix fecskendő 5 ml, Clip Flow fecskendő 2 x 1,8 g
----------	--

Provicol® QM Aesthetic

Transzlucens, eugenol mentes ideiglenes cement kalcium-hidroxiddal



Javallatok

A koronák, hidak, inlay-k és onlay-k ideiglenes restaurálásainak ideiglenes rögzítéséhez

Kis, egyfelszínű üregek ideiglenes lezárása

Előnyei

- Rendkívül esztétikus, áttetsző megjelenés
- Pontos illeszkedés a nagyon alacsony filmvastagság miatt
- Optimálisan folyékony a könnyű cementálás érdekében
- További előnyöket lásd a Provicol QM Plus oldalon

SC
self-curing

auto
mix

temporary

contains
Ca(OH)₂

REF 1108	QuickMix fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 1109	Készlet II QuickMix fecskendő 3 x 5 ml (1 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus, 1 x Provicol QM Aesthetic), tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus QuickMix fecskendő, 50 db

Klinikai eset



A felesleges anyag egyszerű eltávolítása



Vonzó eredmény cirkónium-dioxid koronákkal

Forrás: Hamilton Renato
Pereira Lima, Santos,
São Paulo / Brazília

Provicol® QM Plus

Eugenol mentes ideiglenes cement kalcium-hidroxiddal



Javallatok

Inlay, onlay, korona, részleges korona, híd, csapok ideiglenes beragasztása

Kis, egyfelszínű üregek ideiglenes lezárása

Előnyei

- Megnövelt erő, jobb retenció és biztos tapadás
- Magas szintű radiopacitás

- Fél-elasztikus tulajdonságok az ideiglenes biztonságos ragasztására
- Kalcium-hidroxidot tartalmaz, amelyről ismert, hogy támogatja a terciér dentin képződést és antimikrobiális hatást fejt ki
- Eugenol-mentes, ezért kicsi az allergia lehetősége
- Ideális kompozit cementtel való ragasztás előtt, mivel a műgyanta alapú tömő- és ragasztóanyagok polimerizációját nem gátolja

SC
self-curing

auto
mix

temporary

contains
Ca(OH)₂

REF 1098	QuickMix fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 1099	Készlet QuickMix fecskendő 3 x 5 ml (2 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus), tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus, 50 db

Provicol® · Provicol® QM

Eugenol mentes ideiglenes cement kalcium-hidroxiddal

Javallatok

Inlay, onlay, korona, részleges korona, híd, csapok ideiglenes beragasztása
Kis, egyfelszínű üregek ideiglenes lezárása

Előnyei

- Fél-elasztikus tulajdonságok az ideiglenes biztonságos ragasztására
- Kalcium-hidroxidot tartalmaz, amelyről ismert, hogy támogatja a tercier dentin képződést és antimikrobiális hatást fejt ki
- Ideális kompozit cementtel való ragasztás előtt, mivel a műgyanta alapú tömő- és ragasztóanyagok polimerizációját nem gátolja



REF 1075	Tubus 2 × 25 g (bázis / katalizátor)
REF 1078	Tubus 10 × 25 g (bázis / katalizátor)
REF 1074	QuickMix fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Keverő kanülök 10-es típus, 50 db

Provicol® C

Provicol biztonsági patronokban

Javallatok

Inlay, onlay, korona, részleges korona, híd, csapok ideiglenes beragasztása
Kis, egyfelszínű üregek ideiglenes lezárása

Előnyei

- Fél-elasztikus tulajdonságok az ideiglenes biztonságos ragasztására
- Kalcium-hidroxidot tartalmaz, amelyről ismert, hogy támogatja a tercier dentin képződést és antimikrobiális hatást fejt ki
- Eugenol-mentes, ezért kicsi az allergia lehetősége
- Ideális kompozit cementtel való ragasztás előtt, mivel a műgyanta alapú tömő- és ragasztóanyagok polimerizációját nem gátolja



REF 1076	Patron 2 × 65 g, tartozékok
REF 2158	Dispenser – típus 2
REF 2185	Keverő kanülök 6-os típus, 50 db

Bifix® Temp

Kettős kötésű, kompozit-bázisú, ideiglenes ragasztóanyag

ÚJ:
Bifix Temp
fluorescent

Javallatok

Nem hosszan tartóan ideiglenes, ragasztásos technikával készült restaurációkhoz



Előnyei

- **Kiváló esztétika:** transzlucens, fogszerű árnyalat
- **Kezelhetőség:** kevesebb, mint 5 µm filmvastagság a tökéletes illeszkedés érdekében
- **Kettős kötés:** a felesleges anyag könnyen eltávolítható: rövid részleges polimerizáció után
- **UVA fényben fluoreszkál:** a legkisebb anyagmaradványok könnyebb észlelése és eltávolítása érdekében



REF 1055	QuickMix fecskendő 5 ml univerzális, tartozékok
REF 1056	QuickMix fecskendő 5 ml fluoreszcens, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Keverő kanülök 9-es típus, 50 db

ÚJ

Clip · Clip F

Fényre kötő tömőanyag ideiglenes helyreállításokhoz



Javallatok

Ideiglenes tömőanyag a kavitás ideiglenes zárására

Ideiglenes lezárás inlay és onlay technikáknál

Előnyei

- **Egyszerű kezelhetőség:** könnyen eltávolítható a preparációs határok károsítása nélkül, kiválóan tömöríthető és formázható
- **UVA fényben fluoreszkál:** a legkisebb anyagmaradványok könnyebb észlelése és eltávolítása érdekében
- **Hatékony:** fecskendővel egyszerű, gazdaságos applikálás
- **Azonnal terhelhető:** fotopolimerizáció révén



Klinikai eset



Felépítmény nyitott nyílással



A nyílás lezárása Clip Flow-val



Az elkészült lezárás fotopolimerizálás után

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazília

Clip

REF 1284	Fecskendő 2 × 4 g
REF 1285	Fecskendő 3 × 4 g
REF 1287	Caps 25 × 0,2 g
REF 9301	Dispenser – Caps

Clip F (fluoriddal)

REF 1289	Fecskendő 2 × 4 g
REF 1283	Fecskendő 3 × 4 g

Clip F fluorescent

REF 1288	Fecskendő 2 × 4 g fluoreszcens
----------	--------------------------------

Clip Flow

Folyékony, fényre kötő ideiglenes tömőanyag

Javallatok

Ideiglenes lezárás inlay és onlay technikáknál

Implantátum csavarok nyílásainak tömítése

Koronák és hidak ideiglenes alábélelő anyagaként

Blokkoló anyagként a fogsor retenció területén, pl.: lenyomatvétel előtt

Ínyzáró fedése

Rezin mátrix rögzítése tömés behelyezése során

Ideiglenes tömőanyag a kavitás ideiglenes zárására gyökérkezelések során

Előnyei

- Egyszerűen applikálható – könnyen, egy darabban eltávolítható
- Perem kialakításánál nincs sérülés
- Tartós és ellenálló a nyállal szemben
- Elasztikus, folyékony és nem ragadós
- Időtakarékos a fotopolimerizálás révén



REF 1282	Fecskendő 2 × 1,8 g, tartozékok
REF 2148	Applikációs kanülök 46-os típus, 100 db

Ufi Gel® hard C · Ufi Gel® hard

Keményen maradó direkt fogsoralábélelő



Javallatok

Funkcióját veszített teljes vagy részleges protézisek kemény, tartós, teljes vagy részleges alábélelése

Protézisszélek meghosszabbítása

Előnyei

- Komplett, egy ülésben kivitelezhető kemény alábélelő
- Metil-metakrilát-mentes
- Semleges íz és illat
- A szájban nincs hőfejlődés kötés közben
- Színstabil
- Egyszerűen kivitelezhető
- Esztétikus, kényelmes a páciensek számára
- Sima felület
- Réteges kiegészítése több éven keresztül lehetséges

Klinikai eset



A FELESLEG
ELTÁVOLÍTÁSA



SC
self-curing

auto
mix

Ufi Gel® hard C

- | | |
|----------|---|
| REF 2215 | Készlet patron 80 g, adhezív flakon 10 ml, tartozékok |
| REF 2218 | Készlet + dispenser patron 80 g, adhezív flakon 10 ml, tartozékok |
| REF 2216 | Patron 80 g, tartozékok |
| REF 2217 | Adhezív flakon 10 ml |
| REF 2158 | Dispenser – típus 2 |
| REF 2187 | Keverő kanülök 8-as típus, 50 db |

Ufi Gel® hard

- | | |
|----------|--|
| REF 2210 | Készlet por 60 g, folyadék flakon 40 ml, kondicionáló flakon 20 ml, tartozékok |
|----------|--|

CAD / CAM anyag

Ragasztó anyagok

Csontleépítők

Ideiglenes anyagok

Fogsor alábélelők

Lenyomat anyagok

Protetikai javításra

Ufi Gel® SC · Ufi Gel® P

Puhán maradó, hidegen kötő, szilikon bázisú fogsor alábélelő



Javallatok

Teljes és részleges fogsorok tartósan puhán maradó alábélelése

- a nyomáspontokra eső terhelés enyhítésére
- a palatális vibrációs vonal elzárására
- sorvadtt gerincek és / vagy elégtelen tapadás esetén
- éles szélű alveoláris nyúlványok tompítására
- implantológiában a gyógyulás támogatására

Előnyei

- Csúcsminőségű alábélelő szilikon
- Teljes alábélelés egyetlen ülésben
- Tartósan puhán maradó
- Speciális ragasztóanyag a protézis és a szilikon közti extrém erősségű kötéshez
- Biokompatibilis (metakrilát-mentes)
- Szagtalan és íztelen
- Stabil, esztétikus szín, kaméleon effektussal
- Laboratóriumi használat: kevesebb lépésben elkészíthető, mint más hidegen kötő anyag
- Minden PMMA-bázisú protézishez
- Egyszerű és gyors applikáció közvetlen és közvetett alábélelésre
- Kiválóan adaptálódik a finom részletekhez a protézis pontos illeszkedésének érdekében
- Ellenáll a szokásos protézis tisztító szerekkel szemben



SC
self-curing

auto
mix

Ufi Gel® SC

- REF 2041 Készlet patron 50 ml, adhezív flakon 10 ml, máz-bázis 10 ml, máz-katalizátor 10 ml, tartozékok
- REF 2040 Patron 50 ml, tartozékok
- REF 2029 Adhezív flakon 10 ml
- REF 2047 Máz flakon 2 x 10 ml (bázis / katalizátor)
- REF 2049 Polírozó tárcsa 10 db
- REF 2158 Dispenser – típus 2
- REF 2187 Keverő kanülök 8-as típus, 50 db

Ufi Gel® P

- REF 2070 Készlet tubus bázis 50 ml, katalizátor 50 ml, máz-bázis 10 ml, máz-katalizátor 10 ml, adhezív flakon 10 ml, tartozékok
- REF 2071 Tubus 2 x 50 ml (bázis / katalizátor)
- REF 2076 Adhezív flakon 10 ml
- REF 2309 Egyszer használatos ecset, 100 db
- REF 2315 Keverőpaletta, 20 db
- REF 2338 Ecsettartó egyszer használatos ecsetek és Micro Tim részére, 5 db

Klinikai eset



A PROTÉZIS
ILLESZTÉSE ÉS
A MANDIBULA
MOZGATÁSA



V-Posil® Putty Fast · Putty Soft Fast · Heavy Soft Fast · Mono Fast

Precíziós lenyomatanyag, VPS

Javallatok

A V-Posil Putty Fast / Soft Fast alaplenyomat anyagként használható

- kétfázisú kétidejű lenyomattechnika
- egyidejű kétfázisú lenyomattechnika
- kétfázisú kétidejű technika fóliával (műanyag helyfenntartó fóliával)
- egyfázisú lenyomattechnika funkciós szélek kialakításához

A V-Posil Heavy Soft Fast sűrű konzisztenciájú anyag, használható

- egyfázisú technika (egyidejű technika) két különböző viszkozitással
- kétfázisú lenyomattvételi technika két különböző viszkozitással
- funkciós lenyomatok

A V-Posil Mono Fast-ot használhatjuk kanálban alaplenyomatként, vagy korrekciós fázisként is

- szituációs lenyomatként használhatjuk rögzített / kivehető vagy implantációs fogpótlásokhoz
- funkciós lenyomatok
- korona, híd vagy inlay készítése
- teljes vagy részleges fogsorok készítése
- fogsoralábélelés lenyomatai
- gyökércsapos fogművek indirekt készítéséhez szükséges lenyomathoz
- korrekciós lenyomattvételi eljáráshoz
- szendvics technikához

Előnyei

- Nagy pontosság – az erősen hidroaktív A-szilikon jól hozzásimul a szájüregi struktúrákhoz
- Kezelési kényelem - hosszú munkaidő rövid intraorális kötési idővel kombinálva*
- Biztonságos eltávolítás - a nagy teherbírás lehetővé teszi az eltávolítást a filigrán szerkezetek károsodása nélkül
- Tökéletes protézis - jó hidroaktivitás és a kész lenyomatot érő deformitás utáni kiváló alakvisszanyerés támogatja a tökéletes helyreállítások készítését

* V-Posil Putty Fast 380 ml: Extraorális feldolgozási idő ≤ 01:30 perc, intraorális kötési idő ≥ 02:30 perc

Egyfázisú lenyomat



Kétfázisú kétidejű lenyomat



Korrekciós lenyomat



V-Posil Putty Fast

- REF 2561 Tégely 2 × 450 ml, tartozékok
REF 2562 Tégely 8 × 450 ml, tartozékok
REF 2564 Patron 2 × 380 ml
REF 2204 Keverő kanülök 31-as típus, 50 db

V-Posil Putty Soft Fast

- REF 2579 Tégely 2 × 450 ml, tartozékok

V-Posil Heavy Soft Fast

- REF 2565 Patron 380 ml, tartozékok
REF 2566 Patron 2 × 380 ml
REF 2567 Patron 2 × 50 ml, tartozékok
REF 2568 Patron 10 × 50 ml
REF 2196 Keverő kanülök 16-os típus, 50 db
REF 2204 Keverő kanülök 31-as típus, 50 db

V-Posil Mono Fast

- REF 2569 Patron 380 ml, tartozékok
REF 2570 Patron 2 × 380 ml
REF 2571 Patron 2 × 50 ml, tartozékok
REF 2572 Patron 10 × 50 ml
REF 2196 Keverő kanülök 16-os típus, 50 db
REF 2204 Keverő kanülök 31-as típus, 50 db
REF 2133 Intraorális végek 6-os típus, 50 db

V-Posil® Light Fast · V-Posil® X-Light Fast

Precíziós lenyomatanyag, VPS

Javallatok

A V-Posil Light Fast és V-Posil X-Light Fast fecskendezhető lenyomat anyagként használható

- kétfázisú kétidejű lenyomat technika
- egyidejű kétfázisú lenyomat technika
- kétfázisú lenyomat technika fóliával (műanyag helyfenntartó fóliával)
- egyfázisú lenyomat technika (egyidejű technika) két különböző viszkozitással
- fogsoralábélelés lenyomatai
- teljes vagy részleges fogsorok készítése

Előnyei

- Nagy pontosság – az erősen hidroaktív A-szilikon jól hozzásimul a szájüregi struktúrákhoz
- Kezelési kényelem - hosszú munkaidő rövid intraorális kötési idővel kombinálva
- Biztonságos eltávolítás - a nagy teherbírás lehetővé teszi az eltávolítást a filigrán szerkezetek károsodása nélkül
- Tökéletes protézis - jó hidroaktivitás és a kész lenyomatot érő deformitás utáni kiváló alakvisszanyerés támogatja a tökéletes helyreállítások készítését


Klinikai eset



Preparált fog a retrakciós fonállal



A fogak beborítása
V-Posil Light Fast-tal

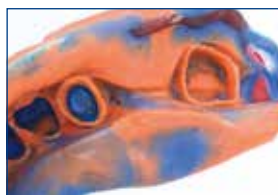

Precíziós lenyomattétel
V-Posil Putty Fast és
V-Posil Light Fast használatával



A kész fogsor a modellen



Az esztétikus és természetes
végeredmény

Forrás: Dr. Walter Denner, Fulda / Németország



V-Posil Light Fast

REF 2573	Patron 2 × 50 ml, tartozékok
REF 2574	Patron 10 × 50 ml
REF 2186	Keverő kanülök 7-es típus, 50 db
REF 2141	Intraorális végek 3-as típus, 50 db

V-Posil X-Light Fast

REF 2575	Patron 2 × 50 ml, tartozékok
REF 2186	Keverő kanülök 7-es típus, 50 db
REF 2141	Intraorális végek 3-as típus, 50 db

Registrado® X-tra

Addíciós kötész szilikon harapás regisztrálására, nagyon kemény, gyors kötész



Javallatok

Harapásvételre
Arcíves harapás meghatározására
Támasztócsapos regisztrálásra

Előnyei

- Optimális keménység
- Elegendő idő az alkalmazásához
- Nagyon pontos lenyomat
- Kifejezetten jó tixotropikus tulajdonság
- Jól csiszolható
- Nagyon magas alkalmazási pontosság



SC
self-curing

auto
mix

Shore-A
90

REF 2035	Patron 2 × 50 ml, tartozékok
REF 2036	Patron 8 × 50 ml, tartozékok
REF 2158	Dispenser – típus 2
REF 2196	Keverő kanülök 16-os típus, 50 db
REF 2140	Intraorális végek 2-es típus, 50 db

Applikáció



Kiváló felületi affinitás



Nem áll ellen az okklúzióknak



A harapásrögzítő könnyen vágható szikével

Fit Test® C & B

Addíciós kötész szilikon protetikai helyreállítások ellenőrzéséhez

Javallatok

Az illeszkedés pontosságának, a széli zárás illetve a résképződés vizsgálatára a következő pótlásoknál:

- koronák
- hidak
- inlayk / onlayk
- öntött csapok, koronák
- fém alaplemezek
- finommechanikai rögzítők és a kivehető fogsorok más járulékos elemei

Előnyei

- Gyors diagnosztikai segítség minden helyreállításhoz
- QuickMix fecskendővel egyszerű kezelhetőség – automatikus, buborékmentes keverés
- Közvetlen alkalmazás
- Optimális szín, fém és kerámia restaurációkhoz
- Gyors eredmény a rövid feldolgozási és kötési időnek köszönhetően



auto
mix

REF 2095	QuickMix fecskendő 5 ml, tartozékok
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Keverő kanülök 9-es típus, 50 db
REF 2191	Keverő kanülök 11-es típus, csak 1-es típusú intraorális véggel, 50 db
REF 2139	Intraorális végek 1-es típus, 50 db

VOCO Retraction Paste

Asztringens paszta hatékony ideiglenes szulkusz
tágításra, a száraz ínybarázda biztosítására



Javallatok

Ideiglenes szulkusz tágításra, a száraz ínybarázda biztosítására, amikor a
periodontium egészséges, pl.

- analóg vagy digitális lenyomatok
- ideiglenes és végleges helyreállítások cementálása
- II. és V. osztályú tömések előkészítése

Előnyei

- **Vékony kanül hajlékony hegygel** – könnyű és hajszálpontos belvitel a szulkuszba
- **Viszkozitás változás** – a paszta konzisztenciája változik az applikálás és a szulkusz
tágulása közben
- **Jó láthatóság** – kontrasztos az ínnel
- **Tiszta termék** – gyorsan és egyszerűen eltávolítható

REF 1012	Caps 25 x 0,3 g
REF 1013	Caps 100 x 0,3 g
REF 9301	Dispenser – Caps



A paszta könnyen applikálható és megbízhatóan működik, jól szárítja és tágítja a szulkuszt. Még vérzés esetén is nagyszerű lenyomatot készíthetsz. A VOCO retrakciós pasztája lehetővé teszi a lehetetlent.

Dr. Bogdan Bratu, Románia

Applikálás




Előtte



A felvitt VOCO Retraction Paste



Utána

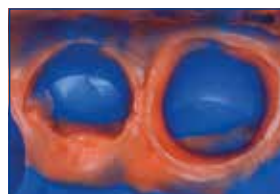

A V-Posil-lal elkészített pontos lenyomat

Forrás: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Németország

Individo® Lux

Előre formázott, fényre kötő egyéni lenyomatkanál anyag



Javallatok

Egyéni lenyomatkanalak megformálására a koronák, hidak és teljes protézisek elkészítéséhez, harapási sablonok alaplemezének elkészítéséhez, valamint harapásregisztráláshoz.

Előnyei

- Áttetsző kék vagy kék opák színekben
- Pontos és gazdaságos eljárás
- Stabil és törésmentes kanálanyag
- Kellemes borsmenta íz
- Nem ragad
- Hagyományos halogén vagy UVA lámpával használandó

3-5 min
light-curing

REF 2402	Maxilla 50 db kék opál
REF 2403	Mandibula 50 db kék opál
REF 2408	Maxilla 50 db kék átlátszó
REF 2409	Mandibula 50 db kék átlátszó

Profibase

Előre formázott, fényre kötő, rózsaszín-transzparens lenyomatkanál / bázislemez



Javallatok

Alkalmas egyéni lenyomatvételi és funkciós kanálhoz a korona-, hídtechnikánál és a totál protetika területén; harapási sablonok bázisához és formastabil műanyagbázis fogfelállításhoz a totál protetikánál.

Előnyei

- Íny színű
- Kézzel egyszerűen és gyorsan alakítható
- Tartós, szilárd, és nyomásálló
- Kellemes borsmenta íz
- Nem ragad
- Hagyományos halogén vagy UVA lámpával használandó

3-5 min
light-curing

REF 2111	Maxilla / mandibula 2 × 25 db
REF 2112	Maxilla 50 db
REF 2113	Mandibula 50 db

LC Dam

Fenyre kötő inyvedő



Javallatok

Lefedi és védi a fogínyt és a szomszédos fogakat a rendelőben végzett fogfehérítő kezelés ideje alatt (rendelői fogfehérítés)

Előnyei

- Kompozit alapú, kék színű inyvedő
- Lefedi a fogínyt, az interdentalis papillákat anélkül, hogy elfolya
- Fotopolimerizálása során nem keletkezik fájdalmat okozó hőhatás
- Nem mozdul el a kezelés alatt, utána könnyen, egy darabban eltávolítható



REF 1655 Fecskendő 2 g, tartozékok

Cimara®

Kerámia javító anyag fényre kötő kompozittal

SAVMENTES
INTRAORÁLIS
KERÁMIA JAVÍTÁS



Javallatok

Porcelán vagy kompozit héjak, rögzített fogpótlások, fémvázra égetett fogpótlások intraorális javítására

Előnyei

- Savmentes kerámia javítás egy munkamenetben
- Nem szükséges eltávolítani a fogpótlásokat
- Egyszerű munkalépések
- Nincs szükség más eszközre
- Tartós kötés kompozit és porcelán között
- Nagy tapadóerő



REF 1196	Készlet szilán 8 × 0,3 ml, adhezív flakon 4 ml, Opaker LC fecskendő 1,2 g, GrandioSO Caps 8 × 0,25 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, GA3.25), tartozékok
REF 1197	Szilán 4 × 0,3 ml, tartozékok
REF 1198	Adhezív flakon 4 ml
REF 1575	Opaker LC fecskendő 1,2 g, tartozékok
REF 2147	Applikációs kanülök 45-ös típus, 100 db
REF 2309	Egyszer használatos ecset, 100 db
REF 2315	Keverőpaletta, 20 db
REF 2338	Ecsettartó egyszer használatos ecsetek és Micro Tim részére, 5 db



Készülékek · Egyéb termékek

Fejlődés. Hatékonyság. Gyakorlat-orientáltság.

Azonban semmi sem működik ténylegesen a gyakorlatban anélkül, hogy ezek a praktikus kis segítőink ne lennének – legyen szó különféle méretű applikációs kanülökről, nagy vagy kis méretű eszközökről a termékek applikálásához vagy azok későbbi felhasználásához, úgy mint a preparációk tisztítása vagy blokkoló anyagok.

VisCalor® Dispenser

Előmelegítő és adagoló kapszulás kompozitához

A VisCalor bulk
anyaghoz ideális
(p. 37)



Javallatok

Magas töltöttségű kompozitok melegítésére és applikálására

Előnyei

- Kiváló kezelhetőség – gyors felfűtés és azonnali alkalmazás egyetlen készülékben
- Homogén felmelegítés a közeli infravörös technológiának köszönhetően
- Két program (egy a VisCalor bulk és további a VOCO kompozitok számára)
- Kényelmes kialakítás és ideális forma a moláris üregek eléréséhez
- A selymesebb konzisztencia miatt a kompozit jobban adaptálódik a kavitás falához

REF 9143	VisCalor Dispenser – Előmelegítő eszköz
REF 9144	Cserélhető felsőrészek 2 db
REF 9145	Védőfóliák 100 db

Caps Warmer

Előmelegítő eszköz kapszulás kompozitához



Javallatok

Előmelegítő készülék kapszulás kompozitok felmelegítésére

Előnyei

- Lehetővé teszi a kapszulás kompozitok felmelegedését
- A speciálisan tervezett tálca optimálisan zárja a VOCO kapszulás kompozitjait, amely biztosítja, hogy egyenletesen melegedjenek fel
- A folyóképesség növelése és a kompozit kezelési tulajdonságainak beállítása
- Egy kapszula kinyomót és négy egyedi kapszulát képes egyidejűleg felmelegíteni – ideális több színárnyalat kezeléséhez
- 3 hőmérséklet állítható be – a klinikai helyzet és a szükséges konzisztencia függvényében

REF 9001	Előmelegítő készülék
----------	----------------------

Celalux® 3


Nagy teljesítményű LED polimerizációs lámpa

Javallatok

Minden fényre kötő fogászati anyagot polimerizál, amely a 450 - 480 nm hullámhossz-tartományban aktiválódik

Előnyei

- State-of-the-art LED technológia nagy fényerővel (kb. 1.300 mW / cm²)
- Hullámhossz tartomány 450 - 480 nm
- Kecses és elegáns dizájn (toll alakú), a kézidarab súlya akkumulátorral és fényvezetővel mindössze 70 g
- Vibrálással jelzi, hogy mennyi idő telt el az induláskor, és újra 10 és 20 s után
- Könnyen kezelhető, kábel nélküli
- Autoklávizható 8 mm-es fényvezető
- A készülékhez mellékelt tartalék akkumulátornak köszönhetően folyamatosan használatra kész
- Az akkumulátor könnyen cserélhető

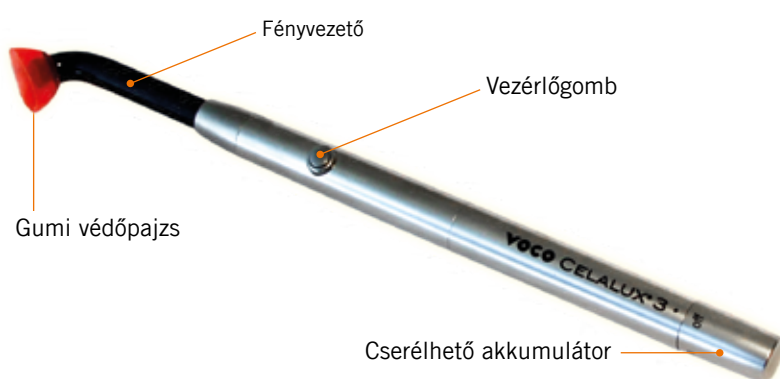

Alkalmazás



REF 9090 Celalux 3 (kézidarab, akkumulátor töltő, tápkábel cserélhető hálózati adapterrel, 2 db lítium-polimer akkumulátor, 8 mm-es fényvezető, tűkröződésmentes eszköz, használati utasítások)

Tartozékok

REF 9091 Fényvezető 8 mm-es, autoklávizható
REF 9092 Készülék tartó állvány
REF 9093 Védősapka, 5 db.

Technikai adatok

Hullámhossz tartomány	450 - 480 nm
Fényerő	1.300 mW / cm ²
Kezelés	Szakaszos használat, minden 20 s időtartamú 10 ciklus után 3 perc szünet
Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral	> 45 ciklus, mindegyik 20 s időtartammal
Fényvezető	ø 8 mm
Készülékalap	lítium polimer, 270 mAh

Kézidarab

Méret	ø 12,6 mm, hossz 210 mm
Súly	70 g (beleértve a készülék alját és fényvezetőt)

Akkumulátortöltő

Méret	H 160 mm x Sz 90 mm x M 35 mm
Súly	170 g
Radiométer	beépített, Zöld fény: elegendő fénykibocsátás Piros fény: elégtelen fénykibocsátás
Hálózati feszültség	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tápellátás	6 V DC / 1 A
Osztályozás	típusa BF
Elektromos szigetelés	II. osztály
Csatlakozó	cserélhető adapter DE, UK, USA számára (mellékelve)

VOCO GIC Mixer®

Kapszulakeverő készülék kifejezetten üvegeionomer cementekhez

Javallatok

Készülék applikációs kapszulában lévő por és folyadék összekeverésére

Előnyei

- Magas rezgésszám: 4600 fordulat / perc, ami különösen homogén por és folyadék keveréket eredményez
- Modern design
- A kapszulatartó lehetővé teszi a kapszulák egyszerű behelyezését és eltávolítását
- Felhasználóbarát
- Csendes és gyakorlatilag vibráció mentes
- A keverési idő szabadon választható 1 és 99 másodperc között



REF 9050 Kapszula keverő készülék

VOCO Dynamic Dispenser

Dinamikus keverő berendezés

Javallatok

VOCO 5:1 kartusos lenyomatanyagok automatikus keveréséhez és adagolásához használható készülék

Előnyei

- Következtesen kiváló minőségű homogén, dinamikus keverés
- Buborékmentes adagolás
- Töltöttségi szint kijelzés
- 2 előtolási sebesség
- Elektronikus maradék érzékelés



REF 9140 Keverő berendezés 230 V

Caries Marker

Színindikátor a karieszes dentin megfestéséhez

Javallatok

Szuvas dentin megfestése az üreg előkészítése során vagy demonstrációs céllal

Előnyei

- Szuvas és egészséges dentin pontos megkülönböztetése
- Segíti a minimális foganyag eltávolítását
- Alkalmas gyakorlásra, oktatási célokra kihúzott fogakon



REF 1005	Flakon 2 × 3 ml, tartozékok
REF 2252	Pele Tím, No. 1, 3.000 × ø 4 mm

Eszközök

Tisztító anyagok

Block Out Gel LC

Fényre kötő helyfenntartó anyag

Javallatok

Helyfenntartó készítése gipszmodellen

Előnyei

- A kék szín megkönnyíti az applikáció-ellenőrzést
- Könnyű használat közvetlenül a fecskendőből



10-30
sec
light-curing

REF 1661	Fecskendő 4 × 1,2 ml, tartozékok
REF 2144	Applikációs kanülök 44-es típus, 100 db

Egyéb

Kisméretű eszközök

Egyszer használatos eszközök

Pele Tím

Habszivacs labdacok folyadék és paszta készítmények nyomás nélküli applikálására

Javallatok

Fertőzött alveolusok ecsetelésére

Endodrain

Vitalításvizsgálat

Az anyagfelesleg eltávolítása ragasztásnál vagy sealer használata esetén

Különböző készítmények pl. fluorid egyszerű felvitele

Előnyei

- 5 különböző méret
- Fájdalommentes, nyomás nélküli applikáció
- Gazdaságosabb a vattánál, nyomásra az összes felszívott anyagot kiadja
- Higiénikus, nem bolyhosodik



REF 2250	No. 0	3.000 × ø 3 mm
REF 2252	No. 1	3.000 × ø 4 mm
REF 2253	No. 2	1.000 × ø 5 mm
REF 2254	No. 3	500 × ø 8 mm
REF 2255	No. 4	500 × 6 × 8 mm

Traypurol®

Tisztítószer koncentrátum lenyomatkanalakhoz és műszerekhez



Javallatok

Lenyomatkanalak és műszerek könnyű tisztítása

Előnyei

- Egyszerűen, vízzel hígítható
- Alginátok, üveg ionomer-, karboxilát-, foszfát-, cinkoxid-eugenol cementek maradékainak oldására
- Kanalakat és műszereket megbízhatóan tisztítja
- Ultrahangos készülékekben is használható
- Nem oxidálódó fémekhez és műanyagokhoz is használható
- Biológiailag lebomló és anyagkímélő

REF 2289	Flakon 1 l
REF 2290	Kanna 5 l
REF 2304	Adagoló pumpa – kanna 5 l

Traypurol® tabs

Műszer és lenyomatkanál tisztítószer tableta formában



Javallatok

Lenyomatkanalak és műszerek könnyű tisztítása

Előnyei

- Igen rövid idő alatt oldja az alginátokat és cementet
- Különösen könnyen adagolható
- A tabletták önállóan feloldódnak a vízben, nem szükséges kavarni
- Anyagkímélő, minden nem rozsdásodó fémre és műanyagra alkalmas
- Semleges pH értékű, biológiailag lebomló
- Ultrahangos készülékekben is alkalmazható

REF 2355	50 db
----------	-------

Caps Dispenser

Keverőpisztoly a kapszulákban lévő töltőanyag közvetlen applikációhoz



REF 9301 Dispenser – Caps

Dispenser típus 2

Keverőpisztoly a fogászati anyag patronból kinyomásához



1:1 vagy 1:2 patronok-hoz (50 ml)

REF 2158 Dispenser – típus 2

Dispenser típus 3

Keverőpisztoly a fogászati anyag patronból kinyomásához



25 ml-es patronokhoz 1:1 illetve 1:2

REF 2259 Dispenser – típus 3

QuickMix Dispenser

Keverőpisztoly QuickMix fecskendők kinyomásához



1:1-es QuickMix fecskendőkhöz

REF 2261 Dispenser – QuickMix

AC Applicator típus 1

Applikátor az applikátorkapszulás (AC) üveg ionomer cementek helyreállító és ragasztóanyagok közvetlen alkalmazásához



REF 2331 Applicator – AC típus 1

AC Applicator típus 2

Applikátor az applikátorkapszulás (AC) üveg ionomer cementek helyreállító és ragasztóanyagok közvetlen alkalmazásához



REF 2334 Applicator – AC típus 2

AC Activator

Fogó az applikációs kapszulák (AC) aktiválásához



REF 9300 Activator – AC

Dispenser adagoló

Applikátor kefék higiénikus adagolására szolgál – többször is kétféle applikátorral feltöltve



REF 2244 Dispenser – applicator kefék

Jegyzetek

Keverő kanülök					
REF 2185	6-os patronos Provicol C, Structur Premium-hoz, patronos Structur 2, patronos Structur 3, 50 db		REF 2194	14-es Bifix SE-hez, Perfect Bleach Office+, 50 db	
REF 2186	7-es V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 db		REF 2195	15-ös (1-es típusú intraorális véggel) Bifix SE-hez, Perfect Bleach Office+, 50 db	
REF 2187	8-as Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC, 50 db		REF 2196	16-os (intraorálisan 2-es típus) Registrado X-tra, patronos V-Posil Heavy Soft Fast, patronos V-Posil Mono Fast, 50 db	
REF 2188	9-es Bifix Hybrid Abutment, Bifix Temp, Fit Test C & B, 50 db		REF 2199	19-es patronos Rebilda DC-hez, hajlítható, 30 db	
REF 2189	10-es Meron Plus QM, Provicol QM, Provicol QM Aesthetic Provicol QM Plus, Quick Up, Rebilda DC, Structur 2 QuickMix fecskendőhöz, Structur 3 QuickMix fecskendőhöz, 50 db		REF 2202	20-as mintakészítő szilikonhoz, CediTEC, 50 db	
REF 2191	11-es Bifix Hybrid Abutment, Bifix QM, Fit Test C & B csak 1-es típusú intraorális kanülökhöz, Grandio Core Dual Cure QuickMix fecskendőhöz, Rebilda DC QuickMix fecskendőhöz, 50 db		REF 2204	31-es nagy patronos V-Posil Heavy Soft Fast, nagy patronos V-Posil Mono Fast, nagy patronos V-Posil Putty Fast, 50 db, bajonett gyűrű 1 db	
REF 2192	12-es patronos Rebilda DC-hez, 50 db				

Applikációs kiegészítők					
REF 2249	Micro Tim, applikációs pamacs, 100 db		REF 2247	Single Tim, applikációs pamacs, 100 db	
REF 2309	Egyszer használatos ecset, 100 db		REF 2246	Endo Tim, applikációs ecset a foggyökéren belül használható, 50 db	
REF 2338	Ecsettartó egyszer használatos ecsetek és Micro Tim részére, 5 db		REF 2245	Easy Brush, applikációs nyél, 50 db	
			REF 2248	Sticky Tim, Applikálási segédeszköz öntapadó hegygel, 70 db.	

Eszközök

Tisztító anyagok

Egyéb

Kisméretű eszközök

Egyszer használatos
eszközök


Applikációs kanülök

REF 2145	40-es Fissurit F / FX-hez, 100 db		REF 2147	45-ös Amaris Gingiva, Cimara Opaker LC, FinalTouch, GrandioSO Light Flow, Grandio Seal, 100 db	
REF 2146	41-es Admira Fusion Flow, Bifix Hybrid Abutment, Calcimol LC, Grandio / SO Flow, Ionoseal, LC Dam, 100 db		REF 2148	46-os Admira Fusion x-base, AlignerFlow LC, Clip Flow, GrandioSO Heavy Flow, x-tra base, 100 db	
REF 2310	42-es Vococid, 30 db		REF 2131	47-es Calcicur, 30 db	
REF 2167	43-as VOCO Profluorid Varnish patronhoz, 100 db		REF 2132	48-as Vococid, 50 db	
REF 2144	44-es Admira Flow, Amaris Flow, AlignerFlow LC, Arabesk Flow, Block Out Gel LC, GrandioSO Light Flow, Quick Up LC, Twinky Star Flow, 100 db		REF 2135	50-es Bifix Veneer LC, Bifix Veneer Try-In, 30 db	


Intraorális végek

REF 2133	6-os intraorális vég V-Posil Mono Fast, 50 db		REF 2141	3-as patronos Rebuilda DC, V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 db	
REF 2139	1-es intraorális vég Bifix Hybrid Abutment, Bifix QM, Bifix SE, Perfect Bleach Office+, gyökércsatornába alkalmazáshoz a QuickMix fecskendőhöz Rebuilda DC, 50 db		REF 2142	4-es Bifix QM, Bifix Hybrid Abutment, Grandio Core Dual Cure QuickMix fecskendőhöz, Rebuilda DC QuickMix fecskendőhöz, 50 db	
REF 2140	2-es Registrado Clear, Registrado X-tra, 50 db				

Keverő spatulák · Keverő blokk · Keverőpaletta

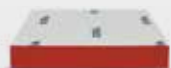REF 2303	Keverő blokk 70 × 80 mm, tapadós hátlap, 4 db		REF 2315	Keverőpaletta, 20 db	
----------	---	---	----------	----------------------	---

A	AC Activator93	F	Futurabond M+22	R	Rebilda DC71
	AC Applicator93		Futurabond U21		Rebilda Post69
	Admira Bond24				Rebilda Post GT70
	Admira Fusion 527		GIC Mixer90		Registrado X-tra83
	Admira Fusion28		Grandio38		Remin Pro11
	Admira Fusion Flow29		Grandio blocs58		Retraction Paste84
	Admira Fusion x-base31		Grandio Core Dual Cure72		
	Admira Fusion x-tra30		Grandio disc59		Solobond M24
	Admira Protect11	G	Grandio disc multicolor59	S	Structur 274
	Alfacomp LC26		Grandio Flow39		Structur 373
	AlignerFlow LC26		Grandio Seal8		Structur CAD57
	Amaris40		GrandioSO33		Structur Premium75
	Amaris Flow40		GrandioSO Flow34		
	Amaris Gingiva41		GrandioSO Heavy Flow35		Traypurol92
	Application brush dispenser 93		GrandioSO Light Flow34	T	Traypurol tabs92
	Aqua Ionofil Plus50		GrandioSO Unlimited32		Twinky Star44
	Aqua Meron67		GrandioSO x-tra36		Twinky Star Flow44
			GrandTEC36		
B	Bifix Hybrid Abutment65				Ufi Gel hard79
	Bifix QM65		Ideiglenes készlet75	U	Ufi Gel hard C79
	Bifix SE64		Individo Lux85		Ufi Gel P80
	Bifix Temp77		Ionofil Molar49		Ufi Gel SC80
	Bifix Veneer LC63	I	Ionofil Molar AC Quick49		
	Bifix Veneer Try-In63		Ionolux46		VisCalor bulk37
	Bifluorid 1010		Ionoseal19		VisCalor Dispenser88
	Block Out Gel LC91		IonoStar Molar48		V-Posil Heavy Soft Fast81
	BrackFix68		IonoStar Plus47		V-Posil Light Fast82
		L			V-Posil Mono Fast81
			LC Dam86		V-Posil Putty Fast81
C	Calcicur18				V-Posil Putty Soft Fast81
	Calcimol LC18		Meron67		V-Posil X-Light Fast82
	Caps Dispenser93	M	Meron (Application capsule) .67		V-Print cast54
	Caps Warmer88		Meron Plus QM66		V-Print c&b temp56
	Caries Marker91		MTA vpt17		V-Print dentbase56
	CediTEC60				V-Print IBT53
	CediTEC DB61		Pele Tim91	V	V-Print model 2.054
	CediTEC DT60		Perfect Bleach15		V-Print SG53
	Celalux 389		Perfect Bleach Office+15		V-Print splint52
	Ceramic Bond66		Perfect Protect14		V-Print splint comfort52
	Cimara86		Polofil Supra44		V-Print tray55
	CleanJoy7		Profibase85		V-Print Try-In55
	Clip78	P	Profilaxis készlet14		Vococid23
	Clip F78		Profluorid Varnish13		VOCO Dynamic Dispenser . .90
	Clip Flow78		Profluorid Varnish + BioMin .12		VOCO GIC Mixer90
D	Dispenser93		Provicol77		VOCO Ionofil Molar49
	Dynamic Dispenser90		Provicol C77		VOCO Ionofil Molar AC
E	Easy Glaze50		Provicol QM77		Quick49
	Egyszer használatos eszközök 95		Provicol QM Aesthetic76		VOCO Perfect Protect14
			Provicol QM Plus76		VOCO Profluorid Varnish . . .13
F	FinalTouch41	Q			VOCO Profluorid Varnish +
	Fissurit F9		Quick Up68		BioMin12
	Fissurit FX9		QuickMix Dispenser93		VOCO Retraction Paste84
	Fit Test C & B83			X	x-tra base42
	Futurabond DC23				x-tra fil43

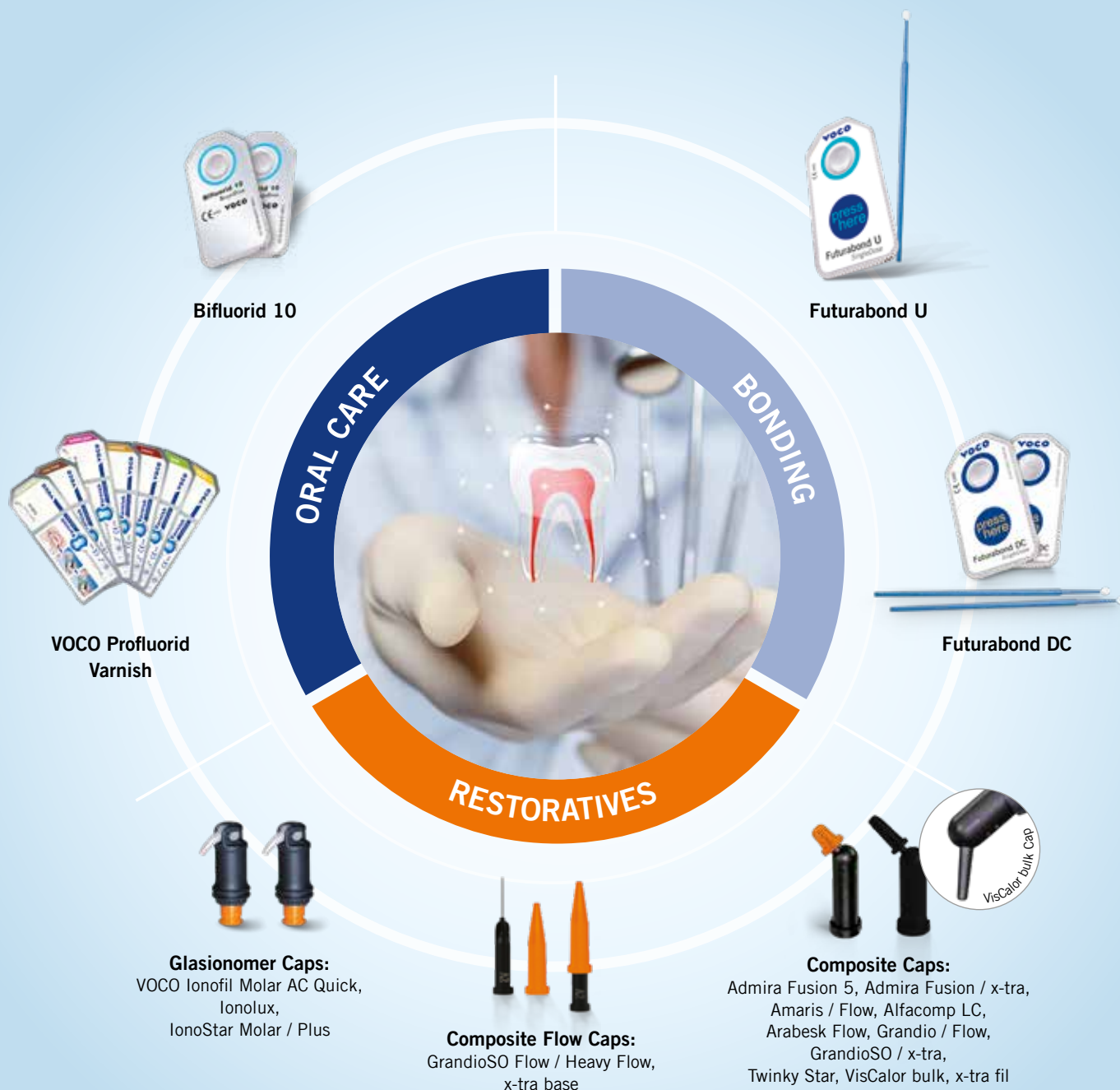

VOCO SINGLE DOSE EGYSZERŰ. GYORS. HIGIÉNIKUS.

- Higiénikus – megfelelő védelem a személyzet és páciensek számára
- Egyszerű és gyors applikálás
- Egyszeri kezeléshez megfelelő mennyiség – nem növekszik meg az anyagfelhasználás



SingleDose





VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Németország

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental