

Admira

Használati utasítás

EN 24049/ISO 4049 megfelelően

Az **Admira** ormocer alapú fényrekötő tömőanyag, amely hordozza a már jól bevált kompozit technológiát. Az **Admira** összetevői a háromdimenziós kötési szervesetlen-szerves kopolimer komplexek (ormocerek), alifás és aromás dimetakrilátok. Az ormocer tartalmú tömőanyagok szabadalma védett. A tömőanyag halogén (kék fény) lámpával polimerizálható.

Az **Admira** 78 %-ban tartalmaz szervesetlen töltőanyagot (56 t% mikrofiller, 0.7 µm).

Az **Admira** tömőanyagot az **Admira Bond** zománc- dentin ragasztóval - az ormocer tömőanyagokhoz kifejlesztett ragasztórendszerrel - együtt ajánlatos használni.

Az **Admira** tömőanyag fecskendő és kapszulás kiszerelésben is kapható.

Az **Admira** 10 színárnyalatban kapható:

vöröses-barna színek:	A1, A2, A3, A3.5, A4
sárgás színek:	B2, B3
szürke színek:	C2
metszőél szín:	I
univerzális opak:	UO

Indikációk:

- I - V. osztályú tömések
- Sérült metszőfogak helyreállítása
- Héjkészítés elszíneződött frontfogakra
- Mozgatható frontfogak sínézése
- Sérült fazetták javítása
- Csonkfelépítés
- Kompozit betétkészítés

Felhasználás:

Előkészítés/színválasztás:

Tisztítsa meg a fogat fluorid mentes tisztító pasztával (**Klint**). Az approximális térköz minimális szeparációja megkönnyíti a matrica behelyezését. Nedvesítse meg az **Admira** fogszínkulcsot és válassza ki a nedves és letisztított foghoz legjobban illő színt, lehetőség szerint természetes fénynél.

Üregalakítás:

Az adhezív tömés technikának megfelelő üregalakítás lehetőség szerint minimális ép fogállomány eltávolításával.

Tisztítás/száritás:

Az üreg tisztítása és száritása speciálisan erre a célra készült anyagokkal (**Sikko Tim**) vagy hidrogén peroxiddal történjen. Kerülje az üreg nyálal vagy vérrel való érintkezését.

Alábélelés készítése:

Pulpa közeli, nagyon mély üregek esetén alábélelésként calcium hidroxid cement használata javasolt (**Calcicur**, **Calcimol**). Közepesen mély üregek esetén - folyamatos fluorid leadásuknak köszönhetően - üvegonomer cementek a legmegfelelőbbek (**Aqua Ionobond**, **Ionoseal**).

Savazás:

A zománcszélek ferdére csiszolása után savazza az egész üreget ("teljes savazásos technika"). A savazást a zománcot kezdje, majd folytassa az üreg további részein. A zománcot kb. 20 - 30 másodpercig, a dentint maximum 15 másodpercig savazza (**Vococid**). A kondicionálás után a savat vízzel alaposan öblítse le 20 másodpercig, majd a felesleges nedvességet levegővel szárítsa le. Ne szárítsa túl a dentint; a dentin felszíne lehetőleg maradjon nedves. A savazott zománc krétafehér legyen.

Ragasztás:

A ragasztóanyagot tartalmazó flakon megdöntésekor ügyeljen arra, hogy a szelelőnyílás felülre kerüljön. Helyezze a **Micro Tim** ecsetet az adagoló nyílásba és nedvesítse meg, majd a ragasztó anyagot applikálja az üreg zománc és dentin

borított valamennyi falára. Hagyja a ragasztót kb. 30 másodpercig a savazott felszínbe diffundálni, majd a felesleges ragasztóanyagot távolítsa el levegő ráfújásával, végül polimerizálja 20 másodpercig (**Polofil Lux**).

Az Admira tömőanyag alkalmazása:

Szobahőmérsékletű tömőanyagot használjon.

A kiválasztott színű **Admira** tömőanyagot a megfelelő műszerekkel applikálja. Transzparens matricák használata ajánlott.

Admira kapszulák alkalmazása esetén helyezze a kapszulát a kinyitott adagolóba, majd fordítsa a kapszulát a kívánt irányba. A kapszula kupakjának eltávolítása után a tömőanyag közvetlenül az üregbe adagolható.

Töméskészítés:

A tömőanyagot 2 mm-es rétegenként helyezze be az üregbe és polimerizálja halogén lámpával. Minden réteget 40 - 60 másodpercig világítsa meg, az UO színárnyalatot legalább 60 másodpercig.

A polimerizációs lámpát a lehető legközelebb helyezze a tömőanyaghoz. Ha ez a távolság több mint 5 mm, a tömőanyag nem köt meg teljesen.

Az inkomplett polimerizáció következményei a tömés elszíneződése, esetleg fogfájdalom.

Transzparens matricacsíkok és koronák használata a tömés készítése közben javasolt.

A tömés finírozása és polírozása a polimerizáció után azonnal megkezdhető. Finomszemcsés gyémántok és polírozó korongok használata vízhűtésben ajánlott.

A tömés készítés befejező lépéseként fluoriddal - **Bifluorid 12** - kezelje a tömés széleit, vagy az egész fogfelszínt.

Az **Admira** tömőanyag használható direkt és indirekt betétkészítéshez az ismert technikákat követve.

Információk és óvintézkedések:

- A tömőanyagoknak nincs ismert mellékhatása, de túlérzékenység az anyagok nem kizárható.
- Az **Admira BIS-GMA-t**, diuretán metakrilátot, BHT-t és TEGDMA-t tartalmaz, ezekre az anyagokra érzékeny, allergiás betegeknek nem használja.
- Az **Admira Bond** ormocereket, BIS-GMA-t, HEMA-t, BHT-t, acetont és szerves savakat tartalmaz, ezekre az anyagokra érzékeny, allergiás betegeknek nem használja. Kerülje az anyag szájnyalakárhártyával történő érintkezését. Ha az **Admira Bond** szembe kerül, bő vízzel öblítse ki, majd forduljon szakorvoshoz
- Eugenol és thymol tartalmú anyagok gátolják a kompozitok tökéletes polimerizációját. Kerülje cinkoxid-eugenol cement és egyéb eugenol tartalmú anyagok kompozíciós tömőanyagokkal való együttes alkalmazását.
- Szájvizet, plakkkfestőket és chlorhexidin öblítők a tömések elszíneződését okozhatják.
- Nagykiterjedésű, kopásnak kitett rágófelszíni tömések évenkénti ellenőrzése ajánlott.

Tárolás:

Az **Admira** szobahőmérsékleten (15 - 25 °C) legalább 2 évig eltartható. Tárolható hűtőszekrényben, de tömésre csak szobahőmérsékletű anyag használható. A tömőanyagot tartalmazó fecskendőt illetve kapszulát használat után azonnal zárja vissza.

Az **Admira Bond** ragasztót használat után szorosan zárja vissza. Tárolja 25 °C alatt (5 - 8 °C közötti tárolás meghosszabbítja a felhasználhatóság idejét).

Ne tegye ki az **Admira Bond**ot direkt napfénynek vagy a fogászati lámpa fényének.

Ne használja a szavatossági idő lejártá után.

Kiszerezés:

Admira:

Készlet: 7 x 4 g fecskendő A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, UO színekben, 5 ml **Vococid** savazó gél, 4 ml **Admira Bond** és kellékek Cikkszám: 2420

Kiskészlet 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), 5 ml **Vococid** savazó gél, 4 ml **Admira Bond**, kellékek Cikkszám: 2431

Utántöltők: 4 g fecskendőkből a következő színekben:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, I, UO Cikkszám: 2421 - 2430

Fogszínculcs: Cikkszám: 2439

Admira kapszulák:

Készlet: 40 x 0,25 g kapszula a következő színekben: 10 x A3, 10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2, 5 x B3, 5 x C2, 4 ml **Admira Bond**, kellékek Cikkszám: 2450

Utántöltők: 25 x 0,25 g kapszula a következő

színekben: A2, A3, A3.5, Cikkszám: 2452 - 2454

B2, B3, C2 Cikkszám: 2455 - 2457

Applikátor kapszulákhoz: Cikkszám: 1379

Admira Bond

8 ml ragasztóanyag Cikkszám: 2432

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.

VOCO

VC 60 001210 HU 042 / 042
© by VOCO

