

Megfelel a DIN EN ISO 9917-1
szabványnak

Használati utasítás

Az **Aqua Meron** vízzel keverhető üvegionomer-ragasztócement. Kiváló tulajdonságai közé tartozik kis mértékű oldékonysága a szájban valamint enyhén savas vegyhatása.

Javallatok:

Koronák, hidak, inlayk, onlayk, csapok és fogszabályozási gyűrűk ragasztása, teljes kerámia pótlások pl. üveg-, cirkonoxid- és alumíniumoxid kerámiák konvencionális rögzítése.

Felhasználás:

Óvatosan tisztítsa és szárítsa meg a zománc-, dentin- és fémfelszíneket.

Vigyázat! Az **Aqua Meron** csak vízzel szabad keverni! Használat előtt jól rázza fel a port!

Az **Aqua Meron** szobahőmérsékleten (15°C - 25°C) használja. Magasabb hőmérsékleten hűtött üveglap használata javasolt.

Tegye a port és a vizet üveg- vagy keverő lapra, majd keverje a port kis adagoként a vízhez. Használjon 2 csepp vizet 1 mérőkanál porhoz (keverési arány por : víz = 3.3 - 3.8 g : 1).

A víz adagolása során tartsa függőlegesen az üveget és ellenőrizze, hogy a fémkanál 2 - 3 mm-rel a vízszint alá érjen.

Keverési idő	Feldolgozási idő	Kötési idő
0 30 mp	3 perc	6 - 7 perc

A keverési idő kb. 30 másodperc. Az **Aqua Meron** a keverés után szobahőmérsékleten kb. 3 percig feldolgozható, kötési ideje a szájban 3 - 5 perc. Magasabb hőmérséklet csökkenti, alacsonyabb megnyújtja a feldolgozási időt.

Mivel az üvegionomer-cementek speciális folyási tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért túl pontosan illeszkedő koronák és hidak esetén fontos, hogy az **Aqua Meron** ne legyen túl sok és túl viszkozus a koronákban.

Az **Aqua Meron** konzisztenciája akkor megfelelő, ha a fogra és a koronák belsejébe kemény ecsettel applikálható. A cement applikációja és kötése során kerülje a preparátumok vízzel és nyálal történő érintkezését.

Egyéb javaslatok:

Használat után, a cement megkötése előtt a fém műszereket azonnal mossa el hideg vízben. A fogszabályozási gyűrűk eltávolítása után visszamaradt cement gyorsan és kíméletesen eltávolítható ultrahangos depurátorral.

Övintézkedések:

A fogból irritációjának megelőzésére ne használjon túl sok felesleges cementet.

Használat után zárja gondosan a port tartalmazó üveget, ezáltal megóvja a nedvesedéstől és az anyag megőrzi keménységét.

A nyálkahártyára és a szembe ne kerüljön!

Az **Aqua Meron** nátrium-kalcium-fluoroszilikátot és poliakrilsavat tartalmaz: bármely összetevőjére való allergia esetén, a szavatossági idő lejártá után, illetve a por összetapadása esetén ne használja.

Alkalmazása előtt ne használjon izoláló anyagot, hogy az **Aqua Meron** megőrizhesse a dentinhez való teljes tapadási kapacitását.

Tárolás:

Szorosan zárja le az **Aqua Meron** port tartalmazó üveget és tárolja száraz helyen, 4°C - 23°C hőmérsékleten. Védje a nedvességtől!

Kiszerelés:

Aqua Meron 35 g

Cikkszám: 1172

Készítményeinket fogászati felhasználásra fejlesztettük ki. Amennyiben az általunk szállított készítmények használatáról van szó, szóbeli és/ vagy írásbeli utasításaink illetve tanácsaink az Önök érdekeit szolgálják, ajánlott jellegűek. Javasataink és/ vagy tanácsaink nem mentesítik a felhasználót az általunk szállított készítményeket felhasználás előtti ellenőrzése alól. Mivel készítményeink használata a cég kontrollja nélkül történik, ezért kizárólag a felhasználó felelősségére kerülnek használatba. Készítményeink minőségéért a fennálló normák valamint általános szállítási és eladási feltételeinknek megfelelő standardok szerint természetesen kezességet vállalunk.