

Astra Tech Implant System® Guiding Cylinder/Fragment Fork/Screw Extractor/ Thread Cleaner



A használati utasítást és a
szimbólumok szövegét lásd
itt:
ifu.dentsplysirona.com

Az Astra Tech Implant System implantátumrendszer csak megfelelő
oktatásban és képzésben részesült fogorvos vagy orvos használhatja.

A rendszer leírása

A rendszer fogászati implantátumokból, zárócsavarokból, transzmukoális
felépítményekből, egyéb protetikai elemekből, valamint sebészeti és protetikai
műszerekből áll.

Az Astra Tech Implant System implantátumrendszer alkotóelemei csak az
eredeti termékekkel és eszközökkel együtt használhatók.

A termékek leírása

Az Astra Tech Implant System implantátumrendszer tartalmazza a kezeléssel
vagy elhasználódással kapcsolatos javításhoz vagy törött elemek
eltávolításához szükséges eszközöket/termékeket.

A Guiding Cylinder segítségével a fúró/eltávolítót az implantátum közepébe
vezetheti.

A Fragment Fork segítségével eltávolíthatja az egyes törött elemeket.

A Screw Extractor akkor hasznos, ha a töredékeltávolítóval nem sikerült a törött
elemet eltávolítani.

A Thread Cleaner segítségével megtisztíthatja az implantátum vagy a fejcsovar
belső meneteit, miután eltávolította a törött elemet.

A termékek/eszközök RA-csatlakozással rendelkeznek.

A termékek/eszközök kizárólag egyszeri használatra szolgálnak.

Rendelési információk és méretek

A különböző termékekre/eszközökre vonatkozó naprakész és részletes
rendelési információkat az aktuális Astra Tech Implant System javítási
útmutatóban tekintheti meg.

Anyag

Rozsdamentes acél

Volfrámkarbid – Fragment Fork

Felhasználási javallatok

A termékek a kezeléssel vagy elhasználódással kapcsolatos javításhoz, illetve
az implantátum és annak eltört elemei eltávolításához használatosak.

Ellenjavallatok

Nem alkalmazható.

Klinikai alkalmazás

Lásd fent – Felhasználási javallatok.

Figyelmeztetések

A szájüregben végzett műtétek és az orális rehabilitáció a komplikációkhoz
kötődő általános kockázatokkal járnak, amelyeket az orvosnak ismernie kell.
Többek között ilyenek lehetnek a következők:

- A véletlenül a szájába ejtett alkotóelemeket a beteg lenyelheti vagy
belélegezheti, amely fulladáshoz vagy fizikai sérüléshez vezethet. A
kisméretű eszközöket óvatosan kell kezelni.
- Allergia vagy túlérzékenység a felhasznált anyagok kémiai összetevőire. A
beteg kórtörténetét gondosan fel kell mérni.

Övintézkedések

MEGJEGYZÉS: A kézi használatra tervezett termékeket könyökdarabbal ne
használja.

MRI biztonsági információ

Nem alkalmazható a (Guiding Cylinder/Fragment Fork/Screw Extractor/Thread
Cleaner) termékekre.

Mellékhatások

Az implantációs kezelés alatt a lehetséges mellékhatások közé tartozhat többek
között:

- Allergia (pl. allergiás sokk)
- Belélegzett vagy lenyelt alkotóelemek

Utasítások lépésről lépésre

- Használat előtt tisztítsa meg és/vagy sterilizálja a termékeket/eszközöket
(lásd: Tisztítás és sterilizálás).

Guiding Cylinder

- Illessze a vezetőhengert a fúróvezető kézieszközhöz.
- Helyezze a vezetőhengert az implantátumba.
- A vezetőhengerek segítségével vezesse az eltört elemhez való fúró vagy -
eltávolítót az eltört rész implantátumból vagy felépítményből való
eltávolítása során.

Fragment Fork

- Illessze a töredékeltávolítót a behajtóhoz.
- Forgassa az eltávolítót kézzel az óramutató járásával ellentétesen,
miközben a törött elem felé nyomja a vezetőhengeren keresztül.

Screw Extractor

- Csatlakoztassa a csavarkiszedőt a Surgical Driver Handle sebészeti
behajtóhoz, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik-e a
csavarfejbe.
- Forgassa a csavarkiszedőt kézzel az óramutató járásával ellentétesen a
törött elembe (a vezetőhenger nélkül).
- Használja a Torque Wrench EV nyomatékkulcsot racsnis csavarkulcsként.

Thread Cleaner

- Illessze a megfelelő menettisztítót a behajtóhoz.
- Illessze be óvatosan a menettisztítót, és győződjön meg róla, hogy az
megfelelően illeszkedik a menetekbe.
- Időszakosan kezdjen el dolgozni a menettisztítóval (a vezetőhenger nélkül)
egyszerre egy fél fordulatot megtéve és két lépés között visszalépve az
esetleges töredékek kitisztítása érdekében.
- Használja a termékeket/eszközöket a javítási kézikönyv utasításainak
megfelelően.

Tisztítás és sterilizálás

A termékeket nem sterilén szállítjuk.

A nem steril termékeket a felhasználás előtt tisztítani és sterilizálni kell.

Kézi eljárás

Helyezze a termékeket legalább tíz percre egy tisztítószerez ultrasonikus
fürdőbe. Mossa át a termékeket folyóvízzel, amíg a tisztítószerez nyom nélkül
eltűnik. Öblítse ki a belső csatornákat/üregeket vízzel, egy fecskendőhöz
kapcsolt irrigációs tű segítségével.

Készítsen egy fertőtlenítőszeres – ID 212 eszközfertőtlenítő (DÜRR
SYSTEM-HYGIENE) vagy hasonló fertőtlenítővel készített – fürdőt a detergens
gyártója előírásainak megfelelően. Merítse a termékeket teljesen a folyadékba,
a gyártó előírásainak megfelelő időre. Öblítse ki a belső csatornákat/üregeket
legalább háromszor, egy fecskendőhöz kapcsolt irrigációs tű segítségével.
Mossa át a termékeket folyóvízzel, amíg a fertőtlenítőszer nyom nélkül eltűnik.
Öblítse ki a belső csatornákat/üregeket vízzel, egy fecskendőhöz kapcsolt
irrigációs tű segítségével.

Szárazítsa meg a termékeket orvosi sűrített levegővel és tiszta, szálfmentes,
egyszer használatos törülköendővel.

Automatizált eljárás

Helyezze az eszközöket mosógépbe-fertőtlenítőgépbe – Vario TD, vagy
hasonló gépbe –, a gyártó előírásainak megfelelően:

Példa a Vario TD mosóprogramjára:

- Előmosás, 20 °C
- Tisztítás detergensen, neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert, Hamburg)
vagy egyéb anyaggal 45-55 °C
- Semlegesítés
- Közbeeső öblítés
- Fertőtlenítés, > 90 °C (ajánlott a 93 °C), 5 perc
- Szárítás

Csomagolás sterilizálás előtt

A sterilizációs folyamat előtt szárítson meg mindent alaposan, hogy elkerülje a
korrózió kockázatát.

A változtatás joga előzetes értesítés nélkül is fennáll.

Nem minden termék kapható minden országban.

A szöveg felülvizsgálatának dátuma:
IFU 5931-HU Rev. 002 B 2018-04

Használati utasítás

Javasoljuk, hogy a sterilizációs csomagolás gyártójának utasításainak megfelelően csomagolja be az eszközöket. Javasoljuk, hogy további termékeket is helyezzen a sterilizációs tasakba.

Sterilizálás

Gőzsterilizálás elővákuumos ciklussal (134 °C 3 percen keresztül).

A sterilizált alkotóelemeket a steril tasak gyártójának előírásainak megfelelő ideig alkalmazza.

Csomagolás és tárolás

A termékeket csomagolásukban, száraz helyen, normál szobahőmérsékleten kell tárolni (18-25 °C között).

Dokumentáció

Nem alkalmazható.

Védjegyek

A védjegyek és a vállalatnevek azok tulajdonosainak tulajdonát képezik.

Az olvashatóság javítása érdekében a Dentsply Sirona Implants nem használja a ® vagy a ™ jelet a szövegtörzsben.

Ugyanakkor a Dentsply Sirona Implants nem mond le a védjegyére vonatkozó jogairól, és az itt foglaltak nem értelmezhetők ennek ellenkezőjeként.



Gyártó:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany
www.dentsplyimplants.com
www.dentsplysirona.com

A változtatás joga előzetes értesítés nélkül is fennáll.

Nem minden termék kapható minden országban.

A szöveg felülvizsgálatának dátuma:
IFU 5931-HU Rev. 002 B 2018-04

 **Dentsply
Sirona**
Implants