

FREEGENOL TEMPORARY PACK

EUGENOLMENTES IDEIGLENES RAGASZTÓCEMENT

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ideiglenes koronák és hidak rögzítése.

ELLENJAVALLATOK

A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Nyomjon ki a keverőtömbre két egyforma hosszúságú csíkot a Base és az Accelerator pasztákból.
2. 20-30 másodperc alatt alaposan keverje össze.
3. Vigye a megkevert anyagot a(z) (ideiglenes) koronába vagy hídba, majd helyezze a preparált fogra.
4. Hagyja megkötni az anyagot (a keverés kezdetétől számított 3 perc alatt), majd távolítsa el a felesleget.

MEGJEGYZÉS

1. A kötési időt több vagy kevesebb Base paszta adagolásával befolyásolhatja (több Base - gyorsabb kötés; kevesebb Base-lassabb kötés). Ne lépje túl a Base / Accelerator 3:2-2:3 keverési arány tartományát.
2. Amennyiben az anyag ragad a fémhez vagy a foghoz, a keverékhez vazelin adható, de mennyisége maximum a teljes keverék 25%-a lehet.

TÁROLÁS

4-25°C (39,2-77,0°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.
(Eltarthatóság: gyártástól számított 3 év)

KISZERELÉS

1-1 csomag: 55g Base, 20g Accelerator, tisztító folyadék, keverőtömb

FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben az anyag a szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.

Utoljára módosítva : 09/2008