

## GC Fuji I CAPSULE

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

### AJANLOTT ALKALMAZASI TERÜLET

1. Fém inlay-k és onlay-k, valamint fémvázás koronák, hidak és csapok rögzítése.
2. Magas erősségű (cirkoniumvázás) teljes kerámia koronák és hidak rögzítése.

### ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkázás.
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonló tapasztalat, függesse fel a termék használatát, és paciense forduljon szakorvoshoz. **HASZNALATI UTMUTATO**

*Por/folyadék arány*

*(g/g) 0,33/0,18*

*Keverési idő (mp) 10"*

*Munkaidő (perc, mp) (23°C-on) (a kever és kezdetétől számítva) 2'15"*

*Finírozás megkezdésének ideje (a helyreállítás behelyezése után)*

*4'30"*

#### 1. A FOG ELŐKESZITESE

- a) Preparálja a fogat a megszokott módon. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon kalcium- hidroxidot.
- b) Az előkészített fogat horzskővel és vízzel tisztítsa meg.
- c) Alaposan öblítse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe olajmentes légárammal szárítsa le a felületet. **NE SZARITSA TELJESEN SZARAZRA.** Legjobb, ha a preparált felület nedvesnek tűnik (csillog).

#### 2. A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKESZITESE

Győződjön meg róla, hogy a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelően kezeltek és készítették elő.

#### 3. A KAPSZULA AKTIVÁLÁSA ES KEVERESE

- a) Az aktiválás előtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az oldalát kemény felszínhez, ezzel fellazítva a port (1. ábra).
- b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (2. ábra).
- c) Azonnal helyezze a kapszulát a GC CAPSULE APPLIER adagolópisztolyba és húzza meg a kart egyszer (3. ábra). A kapszulát most már aktiválta.

Megjegyzés: A kapszulát csak közvetlenül az alkalmazása előtt szabad aktiválni és azonnal fel kell használni.

- d) A kapszulát azonnal vegye ki az adagolóból és helyezze a kapszularázó gépbe (vagy amalgamatorba) és rázza 10 másodpercig (+/- 4000 RPM) (4. ábra).

Megjegyzés:

Amennyiben rotációs kapszularázó gépet használ, ne használja a centrifuga opciót.

#### 4. KIADAGOLÁS

- a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a rázógépből és helyezze a GC CAPSULE APPLIER adagolópisztolyba.
- b) Az első két nyomással élesítse a kapszulát (5.abra). Az adagolócsőr irányba igazításához tartsa maga fele az adagolópisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet.
- c) Nyomja az anyagot közvetlenül a helyreállításba.
- d) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és eltekerve emelje ki a kapszulát.

#### 5. ROGZITESI TECHNIKA

- a) Megfelelő vastagságban vigye fel a cementet a helyreállítás belső felületére, és azonnal illessze a helyére. A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 2 perc 15 másodperc 23°C-os (73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.
- b) A beillesztésnél folyamatos enyhe nyomást gyakoroljon.
- c) A felesleges cement eltávolítását akkor kezdje meg, amikor az anyag gumyszerű állapotot ért el.
- d) A finirozást a helyreállítás beillesztése után 4 perc 30 másodperc elteltével kezdheti el.

### TAROLÁS

Eredeti alumíniumfóliás csomagolásában, sötét és hűvös (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen tarolja. (Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év.).

### SZINARNYALAT

Világossárga.

### KISZERELES

GC Fuji I kapszulás kiszerezés: 50 db / doboz

A kapszulák átlagos tartalma: 0,33g por, 0,18g (0,14mL) folyadék. A megkevert kapszula minimális töltőtér fogata: 0,19mL. Opcionális: GC CAPSULE APPLIER (1 db).

### FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő vízzel öblítse le. Az érintkezés elkerülése érdekében kofferdám vagy kakaóvaj használata ajánlott a beavatkozás területének a száynyálkahártyától vagy bőrtől történő izolálására.
2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
3. Az anyag töméskészítésre vagy csontfelépítésre nem alkalmazható. Utoljára módosítva : 04/2008

