

GC Fuji I

RADIOPAK, UVEGIONOMER RAGASZTOCEMENT

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERÜLET

1. Fém inlay-k és onlay-k, valamint femvazas koronák, hidak és csapok rögzítése.
2. Magas erősségű (cirkoniumvazas) teljes kerámia koronák és hidak rögzítése.

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkazas.
2. A termék ritkán erzekenysegi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és paciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNALATI UTMUTATO

Por/folyadék arany (g/g) 1,8/1,0

Keverési idő (mp) 20"

Munkaidő (perc, mp) (23°C-on) (a kever és kezdetétől számítva) 2'00"

Finirozas megkezdésének ideje (a helyreallítás beillesztése után) 4'30"

1. A FOG ELŐKESZITESE

- a) Preparálja a fogat a megszokott módon. Pulpasapkazashoz alkalmazzon kalcium-hidroxidot.
- b) Az előkészített fogat horzskővel és vízzel tisztítsa meg.
- c) Alaposan oblitse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe olajmentes légárammal szárítsa le a felületet. **NE SZARITSA TELJESEN SZARAZRA.** Legjobb, ha a preparált felület nedvesnek tűnik (csillog).

2. A HELYREALLITAS ELŐKESZITESE

Győződjön meg róla, hogy a helyreallítást a gyártó utasításainak megfelelően kezeltek és készítették elő.

3. A POR ES A FOLYADEK KIADAGOLASA

- a) Az irányadó por-folyadék arany: 1,8g/1,0g (1 adagolokanal por és 2 csepp folyadék keveréke).
- b) A por pontos adagolását elérheti, ha az uveget használat előtt a kezéhez utogeti. Ne rázza fel vagy keverje meg a port.
- c) Tartsa a folyadék uveget fuggőlegesen és gyengén nyomja össze.
- d) Az uvegeket használat után azonnal zárja vissza.

4. KEVERES

A szükséges mennyiségű port és folyadékot merje ki a papír keverőtombre. A műanyag spatula segítségével a teljes pormennyiséget adja a folyadékhoz, majd 20 másodperc alatt intenzíven keverje össze.

Megjegyzés: Amennyiben nagyobb mennyiségű keveréket kell készítenie, akkor a port felezze meg. Először a por egyik felet keverje el - 5 másodpercen keresztül – a teljes folyadékmennyiséggel. Ekkor a cementhez adja hozzá a por másik felet, majd az egészet keverje újabb 15 másodpercig. (A teljes keverési idő 20 másodperc).

5. ROGZITESI TECHNIKA

- a) Megfelelő vastagságban vigye fel a cementet a helyreallítás belső felületére, és azonnal illessze a helyére. A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 2 perc 23°C-os (73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.
- b) A beillesztésnél folyamatos enyhe nyomást gyakoroljon.
- c) A felesleges cement eltávolítást akkor kezdje meg, amikor az anyag gumyszerű állapotot ért el.
- d) A finirozást a helyreallítás beillesztése után 4 perc 30 másodperc elteltével kezdheti el.

TAROLAS

Sötét, hűvos (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen tarolja. (Eltarth atóság: gyartastol számított 3 ev.)

SZINARNYALAT

Világossárga

KISZERELES

1. 1+1 csomag: 35g por, 25g (20mL) folyadék, adagolokanal, keverőtomb (No.20).
2. 35g por, adagolokanal.
3. 25g (20mL) folyadék.

FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag nyalkahartyara vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott szivacs vagy vattadarabbal. Bő vízzel oblitse le. Az érintkezés elkerulese érdekében kofferdám vagy kakaóvaj használata ajánlott a beavatkozás területének a szajnyalkahartyatol vagy bőrtől történő izolalasara.
2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal oblitse ki és forduljon orvoshoz.
3. NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más uvegonomer cementtel.
4. Az anyag tomeskeszitesre vagy csonkfelepitesre nem alkalmazható.

Utoljára módosítva : 04/2008