

GC Fuji II LC CAPSULE

RADIOPAK, FÉNYRE KEMÉNYEDŐ, MEGERŐSÍTETT ÜVEGIONOMER
HELYREÁLLÍTÓ CEMENT KAPSZULÁBAN

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. III., V. és kisebb I. osztályú kavitások helyreállítása
2. Tejfogak tömése
3. Csonkfelépítés
4. Olyan esetekben, amikor röntgenárnyék szükséges
5. Időskori alkalmazás
6. Alábélelőként vagy linerként

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkázás.
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlót tapasztal, függesse fel a termék használatát, és
páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Por / folyadék arány (g/g) 0,33 / 0,10

Keverési idő (mp) 10"

Munkaidő (perc, mp) 3'15"

Fénypolimerizáció ideje (mp) 20"

Fénypolimerizáció mélysége (A2) (mm) 1,8

Kísérleti környezet: Hőmérséklet: (23°C ± 1°C),

relatív páratartalom: (50 ± 10%)

ISO 9917-2: 1998 (E) (Fényre keményedő cementek) (I. típus)

1. A KAVITÁS PREPARÁLÁSA

a) Preparálja a fogat hagyományos módon. Mechanikai retencióra nincsen szükség.
Pulpasapkázáshoz alkalmazzon kalcium-hidroxidot.

b) Öblítse le és szárítsa meg a felületet, de NE

SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA. GC CAVITY CONDITIONER vagy a GC DENTIN
CONDITIONER alkalmazása ajánlott a smear layer eltávolításához (1. ábra).

2. A KAPSZULA AKTIVÁLÁSA ÉS KEVERÉSE

a) Az aktiválás előtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az oldalát kemény
felszínhez, ezzel fellazítva a port (2. ábra).

b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (3. ábra).

c) Azonnal helyezze a kapszulát a fém GC Capsule Applier adagolópisztolyba és
húzza meg a kart egyszer (4. ábra). A kapszulát most már aktiválta.

Megjegyzés: A kapszulát csak közvetlenül az alkalmazása előtt szabad aktiválni és
azonnal fel kell használni.

d) A kapszulát azonnal vegye ki az adagolóból és helyezze a kapszularázó gépbe
(vagy amalgamatorba), és rázza 10 másodpercig (+/- 4000 rpm) (5. ábra).

3. A HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA

a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a keverőből és helyezze a GC Capsule
Applier adagolópisztolyba.

b) Az első két nyomással élesítse a kapszulát, ezután fecskendezheti az anyagot (6.
ábra). A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 3 perc 15 másodperc 23°C-os
(73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.

Megjegyzés:

- 1) Az adagolócsőr irányba igazításához tartsa maga felé az adagolópisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet.
- 2) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és eltekerve emelje ki a kapszulát.
- c) Távolítsa el a nedvességet, de NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRAZRA.
- d) Nyomja az anyagot közvetlenül a preparációba (7. ábra). Ügyeljen a légbuborékokra.
- e) Formázza meg az anyagot, helyezzen rá celluloidcsíkot, amennyiben szükséges.
- f) Fénypolimerizálja 20 másodpercig látható fényt kibocsátó fénypolimerizáló készülékkel (470nm fényhullámhossz) (8. ábra). A fényforrást helyezze a lehető legközelebb a tömés felszínéhez.

Megjegyzés: 1,8 mm-nél mélyebb kavítások esetén használjon rétegező technikát.

4. FINÍROZÁS

Vízszugár alatt finírozza a tömést gyémántfűrő, szilikoncsúcs és polírozócsíkok használatával (9. ábra).

Megjegyzés:

Vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg), GC Fuji COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig), vagy G-COAT PLUS (fénykezelje 20 másodpercig) védőlakkot (10. ábra).

TÁROLÁS

Sötét, hűvös (4-25°C / 39,2-77,0°F) helyen tárolandó

(Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év)

SZÍNÁRNYALAT

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

(11 Vita® szín)

A Vita® a németországi Bad Säckingen-beli Vita Zahnfabrik bejegyzett védjegye.

KISZERELÉS

1. Egyszínű: 50 kapszula / doboz

2. Vegyes: 50 kapszula / doboz (10db A4, B2, B3, C2; 5db B4, D2)

*A kapszulák átlagos tartalma: 0,33g por és 0,10g (0,085mL) folyadék.

*A megkevert kapszula minimális töltőtér fogata: 0,10mL.

Opcionális: GC CAPSULE APPLIER (1db)

FIGYELMEZTETÉS

1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő vízzel öblítse le.
2. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.

Utoljára módosítva : 05/2008

