

Meron Plus

műanyaggal megreősített, kémiai kötésű üvegionomer-cement

EN 29917/ISO 9917 szerint

Használati utasítás

A Meron Plus műanyaggal megreősített, kémiai kötésű üvegionomercement (glaspolyalkenoate cement) végleges ragasztásra.

Az anyag jellemzői: könnyű kezelhetőség, alacsony oldékonyság a szájbán és magas tapadási értékek.

Alkalmazási területek:

Ragasztásra:

- fémkerámia koronák és hidak ragsztása a fog kemény felszíneihez, beleértve az amalgámmal, kompozittal, üvegionomerrel felépített felszíneket is
- inlay-k, onlay-k, koronák és hidak
- gyökércsapok rögzítésére
- teljes kerámia koronák
- szilikát-, cirkon-oxid-, alumínium-oxid-kerámia koronák
- fogszabályozó készülékek ragasztására

Használat módja:

Alaposan tisztítsa és szárítsa a zománc és dentin felületeket és a kavitást. Ragasztás előtt tisztítsa meg a csonkot (pl. habkő, víz), majd alaposan öblítse le és szárítsa finom levegő fújással, vagy vattagombóccal (Ne szárítsa túl a felszínt!).

Keverés előtt alaposan rázza fel a port és a folyadékot legalább 3 másodpercig.

A feldolgozási hőmérséklet 15 ° C - 23 ° C között legyen!

Keverje össze egy csapott kanál por két csepp folyadékkal.

Adagolja a port és a folyadékot egy keverő lapra vagy megfelelő keverő blokkra. Tartsa az üveget függőlegesen, miközben a folyadékot adagolja. A port és a folyadékot rozsdamentes keverő spatula segítségével keverje össze homogén pasztává.

Keverési idő feldolgozási idő kötési idő / 37 °C-on/

30 másodperc 2 - 4 perc. 3 - 5 perc.

Alkalmazás:

Fogpótlások cementezése:

Tegyünk a megkevert anyagból kis mennyiséget megfelelő eszközzel (spatulával, ecsettel) a preparált csonkra és a fogpótlásba/restaurációra.

Ezután helyezzük a fogpótlást a helyére kis nyomást gyakorolva rá!

A Meron Plus feldolgozási ideje kb. 2 - 4 perc szobahőmérsékleten, kötési ideje a szájbán 3 - 5 perc. Magasabb hőmérsékleten rövidebb, az alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb munkaidővel kell számolni. Hozzávetőlegesen 4 perc elteltével az anyag gél halmazállapotúvá válik, így könnyen eltávolítható a felesleg egy szonda segítségével.

Gyökércsap beragasztása:

Vigyük fel a Meron Plus-t a csapra, majd helyezzük a helyére, a gyökércsatornába.

Mozgassuk meg a csapot, hogy a légbuborékok távozzanak.

Ne vigyük a cementet lentulóval a csatornába, mert ez felgyorsíthatja nagymértékben a kötését.

Javallatok és óvintézkedések:

Óvjuk a Meron Plus-t eugenol, és timol tartalmú, valamint olyan anyagoktól, amelyek a kötési időt befolyásolják, a kötését esetleg meggátolják.

Ha ideiglenes pótlásokat ragasztunk be, eugenol- mentes ideiglenes cementet használjunk. A végleges beragasztás előtt távolítsuk el gondosan az ideiglenes cement maradványokat, védőlakkokat, és más anyagokat (pl. izoláló ágenseket), hogy optimális tapadást érjünk el a ragasztás során! Ha szükséges használjunk pulpa védő anyagot, vagy készítsünk csomkfelépítést! Rögtön mossuk le a keverőműszert hideg vízzel, még mielőtt a cement maradványok megkötnének!

A fogszabályozó készülék eltávolítása után finoman eltávolítható a cement maradvány ultrahangos depurátorral. Kerüljük el a Meron Plus érintkezését a lágy szövetekkel, nyálkahártyával!

A Meron Plus tartalmaz: polyakrilát savat, peroxidot, aminosavakat, fluorszilikátot, HEMA-t, glicerimetakrilátot és diurethán-dimetilakrilátot.

Ne alkalmazzuk a Meron Plus-t bármelyik alkotórésszel szembeni túlérzékenység esetén! Ha szembe kerül alaposan öblítsük ki vízzel, és forduljon szemorvoshoz.

Tárolás:

Szorosan zárjuk le mind a port, mind a folyadékot tartalmazó üvegeket, rögtön a használat után. A páradús levegő hatására a por csomós lehet, ami a megszilárdulást csökkenti. Tároljuk száraz helyen 4 °C – 23 °C között. Ne használjuk a lejáratí idő után.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelő azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.