

HU

**Túlérzékeny fogak kezelésére szolgáló
fluorid-tartalmú fogászati lakk
Használati utasítás**

Termmекkleiras:

A VOCO Profluorid Varnish a fogzománc és a dentin felszínén alkalmazható fluorid-tartalmú fogászati lakk.

VOCO Profluorid Varnish kiválóan tapad a felszínéhez, a nedvességet és a nyálát is tolerálja.

VOCO Profluorid Varnish alkoholos természetes gyanta szuszpenzió mesterséges ízesítőkkal és xylitollal.

1 ml VOCO Profluorid Varnish 50 mg nátriumfluoridot tartalmaz, amely egyenértékű 22.6 mg fluoriddal.

Indikációk:

VOCO Profluorid Varnish felhasználási területe:

1. túlérzékeny fogak kezelésére
2. dentin tubulusok szigetelése például kavitás preparáció esetén, vagy érzékeny gyökérfelszíneken

A használat módszerei:

Ajánlott adagolás

- Tejfogak esetén használjuk a VOCO Profluorid Varnish 0.25 ml-es kiszerelését

- Kevert vagy maradandó fogazat esetén használjuk a VOCO Profluorid Varnish 0.40 ml-es kiszerelését

VOCO Profluorid Varnish-t vékony filmréteggént alkalmazzuk a kemény fogszöveteken. A vastag rétegek könnyebben leválnak és nem nyújtanak nagyobb védelmet sem. Tapasztalat szerint egy teljes fogazat kezelésére 0.25 ml és 0.40 ml közötti mennyiség elegendő.

Alkalmazás:

1. Alaposan tisztítsuk meg a kezelni kívánt felszíneket.
2. A jobb eredmény érdekében szárítsuk le a felszíneket a nedvességtől és a nyáltól.
3. Applikátor ecset vagy szivacs-gombócok segítségével vékony filmréteggént vigyük fel a VOCO Profluorid Varnish-t a kezelni kívánt összes felszínre.
4. Nedvesítsük meg a felületet akár nyál, vagy vízzel öblítés által, ez biztosítja a VOCO Profluorid Varnish megfelelő kötését.
5. Figyelmeztessük a páciens arra, hogy a kezelést követő 4 órán belül ne fogyasszon alkoholt, kerülje a kemény ételeket (magvakat pl.) Kerülje a fogmosást és a fogselyem használatát.

Információ/óvintézkedés:

VOCO Profluorid Varnish természetes gyantát tartalmaz, amely gátolja a kompozitok polimerizációját és tapadását.

Mivel a VOCO Profluorid Varnish ragacsos konzisztenciájú, a csavarmeneten maradó anyag maradványok a kupakot a csavarmenethez ragaszthatják. Ennek elkerülésére törölje le a szennyeződést egy etanol-tartalmú anyaggal.

Fekélyes fogíny-, és szájnyálkahártya-gyulladás vagy a gyantára, vagy más alkotórészekkel kapcsolatos ismert allergia esetén az alkalmazás nem javasolt.

VOCO Profluorid Varnish-t nem rendszeres használatra fejlesztették

ki. Ritkán előfordulhatnak ödémás duzzanatok a teljes fogsort érintő alkalmazás esetén. Rendkívül ritkán jelentkezhet túlérzékenységi nehéz légzés asztmás gyerekeknél. Az arra érzékeny páciensek a teljes fogazatot érintő alkalmazása után általában émelygést tapasztalhatnak.

Ellenreakció esetén a lakkot azonnal távolítsuk el egy puha sörtéjű fogkefével, majd öblítsünk meleg vízzel. Más fluoridot tartalmazó készítményt nem szabad a kezelés napján alkalmazni. A fluorid tartalmú tabletták szedését a VOCO Profluorid Varnish alkalmazását követő néhány napon keresztül szüneteltetni kell. A lakkot lenyelni tilos.

Tárolás:

4 C és 23 C fok közötti hőmérsékleten tároljuk. Lejáratí időn túl ne használjuk fel. Nyílt lángtól tartsuk távol.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.

Szerint a célra, VOCO Profluorid Lakk egy ragacsos összhang. Anyag maradé csavarmenet okozhat a kupakot ragaszkodni. Törölje le a szennyező hulladékok egy etanol-tartalmazó anyag.