

Rebilda DC

A DIN EN ISO 4049 szerint Használati utasítás

Termék leírás:

A **Rebilda DC** kettős kötészű, röntgenárnyékot adó, folyékony kompozit csomkfelépítő anyag, amely nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.

A **Rebilda DC** a széles körű alkalmazhatóság érdekében három különböző árnyalatban érhető el:

- A kék megmutatja a preparációs határokat az anyag és a fogszövet között különösen a moláris és a premoláris területeken.
- A dentin árnyalat a magas esztétikai igényű, például teljes kerámia restaurációkhoz, vagy az erősen transzlucens kompozit tömésekhez alkalmazható.
- A fehér pedig lehetőséget kínál a preparációs határok jelölésére az esztétikai követelmények megtartása mellett.

Javallatok:

- Vitális és nem vitális fogak csomkfelépítése
- Üvegszál erősítésű műgyanta gyökércsapok beragasztása.

A használat módja:

A) A pulpa közeli területen tegye meg a szükséges intézkedéseket.

B) A ragasztóanyag

A **Rebilda DC** adhezív technikával, fényrekötő, vagy kettős kötészű bondokkal használható, amelyeknek kompatibilisnek kell lenniük a kettős kötészű kompozitokkal.

Az adott termék használati utasításának megfelelően kell elvégezni a preparálást (savazásos technika) és az alkalmazást.

C1) Rebilda DC patronban

Helyezze a **Rebilda DC** patronat a VOCO adagolóba (3-as típus), vagy bármely más megfelelő dugattyúval rendelkező adagolópisztolyba. Technikai okok miatt előfordulhat, hogy a fecskendő két kamrájának töltöttségi szintje kissé eltérő az első használat előtt. Ezért távolítsa el a fecskendő kupakját és nyomja ki az anyagot, amíg az anyag egyformán nem áramlik mindkét kamrából. Ezután csatlakoztassa a 12-es típusú keverővéget, és 90 °-kal jobbra forgatással rögzítse.

Ha szükséges, további 3-as típusú intraorális csúcsot lehet elhelyezni a keverővég végén. A gyökércsatornába történő alkalmazáshoz használja a 19-es típusú keverővéget, amelynek a beépített fémkanülje kézzel óvatosan előre meghajlítható. A kar megnyomásával az anyag automatikusan és a helyes arányban összekeveredik.

C2) Rebilda DC QuickMix fecskendőben

Technikai okok miatt előfordulhat, hogy a fecskendő két kamrájának töltöttségi szintje kissé eltérő az első használat előtt. Ezért távolítsa el a fecskendő kupakját és nyomja ki az anyagot, amíg az anyag egyformán nem áramlik mindkét kamrában. Ezután csatlakoztassa a 11-es típusú keverővéget. A bevágásoknak a fecskendőn és a keverővégen egymáshoz kell esniük. A keverővéget 90 °-kal jobbra forgatással rögzítheti.

Ha szükséges, további 4-es típusú intraorális csúcsot lehet elhelyezni a keverővég végén. Az anyag automatikusan és a helyes arányban összekeveredik a keverőcsőben, amelyet azután azonnal applikálni kell. Minden QuickMix fecskendő kivehető dugattyúval van ellátva. A dugattyút könnyen ki lehet húzni a fecskendőből és újra visszahelyezni. A tömítések a fecskendőben nem változtatják a pozíciójukat, miközben ez történik, ez megakadályozza a fecskendőben az anyag kereszt-kontaminációját.

D) A csomkfelépítő anyag applikálása:

Helyezzen fel az előkészített fog köré matricát, vagy használjon az alakításhoz való segédeszközt és applikálja a **Rebilda DC**-t közvetlenül a patronból / QuickMix fecskendőből.

Fényre kötés:

Fényáteresztő matricák használata előnyös. Tartsa a polimerizációs lámpa fénykibocsátó csőrét a csomkfelépítés felszínéhez olyan közel, amennyire csak lehetséges, és polimerizálja 40 másodpercig. Ha a távolság több, mint 5 mm, a kötés mélysége csökkenhet. Nagyobb csomkok felépítésekor rétegezze az anyagot 2 mm-es rétegekben és a polimerizáljon minden réteget 40 másodpercig. A fotopolimerizáció után a restauráció azonnal finírozható.

Kémiai kötés:

Amennyiben a fényre kötés nem valósult meg, a csomkfelépítőt legkorábban a szájba helyezés után 5 perc elteltével lehet kidolgozni.

A **Rebilda DC** feldolgozhatósági ideje kb. 2 perc.

Abban az esetben, ha előre formázott koronát használ, applikálja a **Rebilda DC**-t közvetlenül az előre formázott koronába. Ezután helyezze a koronát az előkészített fogra, állítsa be a helyes pozíciót és polimerizálja koronaszélete 40 másodpercig ezzel fixálva a restaurációt.

Használat után hagyja a keverőcsőrt a patronon / QuickMix fecskendőn vagy helyezze vissza a kupakot.

Üvegszál erősítésű műgyanta gyökércsapok beragasztása (kettős kötésű ragasztóval):

1. Gyökércsapok ragasztására használjon kettős kötésű adhezívet az adott készítmény használati utasítását követve.

2. A patron használata:

Amikor a 19-es típusú keverővéget használja, applikálja a **Rebilda DC**-t közvetlenül a gyökércsatornába, a keverőcsőr hajlítható fém kanüljével.

Ha szükséges, a keverőcsőr fém kanülje kézzel előre meghajlítható. Ha nem használja a 19-es típusú keverővéget

az alábbiak szerint járjon el:

Miután a csapot a gyártó utasításai szerint előkészítette, nedvesítse be a csapot **Rebilda DC**-vel. Ne applikálja a

Rebilda DC-t közvetlenül a gyökércsatornába és ne használjon lentulót! Helyezze be a csapot ügyelve arra, hogy némi ragasztó felesleg kinyomódjon.

A QuickMix fecskendő használata:

Javasoljuk, hogy a **Rebilda DC**-t a gyökércsatornába közvetlen applikálásához használja a kisméretű 1-es típusú intraorális véget. Ne használjon lentulót! Vigyen fel a gyökércsap felületére **Rebilda DC**-t miután a gyökércsap gyártójának utasításait követve előkészítette a csapot. Helyezze be a csapot ügyelve arra, hogy egy kis cementfelesleg képződjön.

3. A gyökércsap rögzítéséhez és az okkluzálisan applikált bondanyag kötéséhez az anyagot legalább 40 másodpercig kell meglámpázni.

4. Csonkfelépítéshez kövesse a D) „A csonkfelépítő anyag applikálása” résznél leírtakat.

Figyelmeztetések / óvintézkedések :

- A tökéletes polimerizáció érdekében, kerülje el a ragasztó és **Rebilda DC** fenolos anyagokkal (pl. eugenollal) való érintkezését.

- Ne használjon olyan ragasztó anyagokat, amelyek nem kompatibilisek a kémiailag kötő, vagy kettős kötésű kompozitokkal.

- Izolálni kell a csonkfelépítést a lenyomatanyagoktól és az ideiglenes korona és hídanyagoktól (elegendő lehet, ha alaposan megnedvesíti), hogy megakadályozza az anyagok egymáshoz kötését.

- A **Rebilda DC** Bis-GMA-t, diuretán dimetakrilátot, BHT-t és benzoil-peroxidot tartalmaz. A **Rebilda DC** nem alkalmazható a bármely összetevővel szembeni ismert hiperszenzitivitás (allergia) esetén.

- Kerülje a száj nyálkahártyájával való érintkezését.

A **Rebilda DC** fizikai értékei megfelel a DIN EN ISO 4049 előírásainak.

Tárolási és felhasználási utasítás:

Használat után zárja vissza a **Rebilda DC** patron / QuickMix fecskendőt. Hűvös helyen tárolandó. Ne tegye ki a **Rebilda DC**-t közvetlen napfénynek vagy az OP lámpa fényének. Tárolja 4 °C - 23 °C közötti hőmérsékleten. Ne használja fel a lejáratí idő után. Ne sterilizálja a keverőcsőrt az ultrahangos kádban.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük

ki. Az általunk szállított termék információit legjobb

tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban

és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ

és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától,

hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az

Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk

alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó

felelős az alkalmazásért. Természetesen garatáljuk

készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint