

Rebilda LC

Használati utasítás



A **Rebilda LC** fényrekötő, röntgenárnyékot adó, csomkfelépítésre használatos, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kompozit. A világoskék **Rebilda LC** megkönnyíti a preparációs határok felismerését. A dentinszínű **Rebilda LC** használata fémmentes munkákhoz ajánlott. A **Solobond M** fényrekötő, egykomponensű zománc-dentin ragasztó segítségével kiválóan tapad a fogszövetekhez.

Indikációs terület:

Vitális és gyökérkezelt fogak csomkfelépítő anyaga.

Felhasználás:

A) Gondoskodjon a megfelelő pulpavédelemről (**Calcicur**, **Calcimol**).

B) **Solobond M** applikációja

A ragasztás során alkalmazza a "teljes savazásos" technikát a következők szerint:

1. Szárítás

A csomkfelépítő anyag alkalmazása tiszta, száraz fogfelszínt igényel. Kerülje a fogfelszín vérről és nyálról történő szennyeződését. Cofferdam nyálrekesz használata ajánlott.

2. Savazás

Savazó géllal (**Vococid**) savazza a teljes preparált fogfelszíneket, a zománcot 20 - 30 másodpercig, a dentint max. 15 másodpercig. A kondicionálás után a savat vízzel alaposan öblítse le, majd a felesleges nedvességet levegővel szárítsa le. Ne szárítsa túl a dentint; a dentin felszíne lehetőleg maradjon nedves. A savazott zománc krétafehér legyen, ha nem az, ismételje a savazást.

3. **Solobond M** adagolása

Az üvegcsé megdöntésekor ügyeljen arra, hogy a szelelő nyílás felfelé nézzen. A **Micro Tim** ecsetet az üvegcsé nyílásánál kifolyó vagy a keverőlapra csöppentett ragasztóval nedvesítse be.

4. **Solobond M** applikációja

Micro Tim vagy egyéb egyszer használatos ecsettel adagolja a **Solobond M** ragasztót a zománcra és dentinre és hagyja 30 másodpercig a kondicionált és előkezelt fogfelszíneken. Ezután levegő fúvásával egyenletesen terítse szét, majd halogén lámpával (**Polofil Lux**) polimerizálja 20 másodpercig a ragasztót.

C) A **Rebilda LC** applikációja

A **Rebilda LC** alkalmazásakor transzparens matricák és előre gyártott műanyag koronák alkalmazása ajánlott.

A polimerizációs lámpát illesse közvetlenül a csomkra és halogén lámpa segítségével legalább 40 másodpercig polimerizáljon. Ha a csomk és a polimerizációs lámpa távolsága több, mint 5 mm, az anyag megkötése nem lesz teljes. A csomk végső kidolgozása közvetlenül a kötés után megkezdhető (finomszemcsés gyémántok, polírozó korongok vízhiűtésben).

Indikációk és óvintézkedések:

Fenol tartalmú anyagok (eugenol tartalmú ideiglenes tömőanyag) gátolják a tökéletes polimerizációt, ezért kerülje ezeknek a **Solobond M** / **Rebilda LC**-vel való együttes alkalmazását. A **Rebilda LC** tökéletesen polimerizációja a fogból károsodását okozhatja.

Ha a csomk mérete megkívánja, a felépítést 2 - 4 mm-es rétegenként kell elvégezni.

A lenyomatvétel előtt vagy ideiglenes koronák, és hidak készítésekor izolálja a csomkot (elégséges a vízzel történő megnedvesítés), ezzel elkerülhető az anyagok egymáshoz kötődése.

A **Rebilda LC** metakrilátokat, kámfort, BHT-t, benzolszármazékokat és aminokat tartalmaz. A **Solobond M** metakrilátokat, acetont és szerves savakat tartalmaz. Ezekre az anyagokra érzékeny, allergiás betegeknél ne használja ezeket a szereket.

Kerülje az anyagok nyálkahártyával történő érintkezést. Amennyiben a **Solobond M** szembe kerül, bő vízzel öblítse ki majd forduljon szakorvoshoz.

A **Rebilda LC** fizikális értékei megfelelnek az EN 24049 / ISO 4049 szabványnak.

A szavatossági idő lejártá után ne használja a **Rebilda LC**-t és a **Solobond M**-t.

Tárolás:

A **Rebilda LC**-t és a **Solobond M**-t használat után szorosan zárja vissza. Az anyagokat ne tegye ki magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy a fogászati lámpa fényének. Tárolja 25 °C alatt.

Kiszerezés:

Rebilda LC

Készlet: 2 x 5 g **Rebilda LC** kék, 1x 5 g **Rebilda LC** fogszínű, 4 ml **Solobond M**, 5 ml **Vococid** savazó gél, kellékek

Cikkszám: 1504

Utántöltő: 2 x 5 g **Rebilda LC** kék

Cikkszám: 1505

2 x 5 g **Rebilda LC** fogszínű

Cikkszám: 1506

Rebilda

Készlet: 2 x 4 g bázis/katalizátor, 5 ml **Vococid** savazó gél, 2 x 4 ml primer/adhezív **Solobond Plus**, kellékek

Cikkszám: 1425

Utántöltő: 1 x 4 g bázis/katalizátor

Cikkszám: 1428

Rebilda D

Készlet: 2 x 4 g bázis/katalizátor, 5 ml **Vococid** savazó gél, 2 x 4 ml primer/adhezív **Solobond Plus**, kellékek

Cikkszám: 1500

Utántöltő: 1 x 4 g bázis/katalizátor

Cikkszám: 1503

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.