

Rebilda Post

Üvegszálakkal megerősített kompozit csap

Használati utasítás

A röntgenárnyékot adó, áttetsző, üvegrostos kompozit Rebilda Post csap a dentinhez hasonló elaszticitást mutat. Az adhezív technikát alkalmazva rugalmas, fémmentes, esztétikus helyreállítást érhetünk el vele.

A Rebilda Post 4 méretben kapható a méretben hozzá illeszkedő előfúrókkal.

Méret 10 (piros) 12 (zöld) 15 (fekete) 20 (sárga)

Hossz 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

Koronális átmérő 1,00 mm 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

Csúcs átmérő 0,50 mm 0,65 mm 0,80 mm 1,00 mm

Alkalmazás:

Endodonciai csap felépítésre, a korona restauráció megtámasztására és elhorgonyzására azokban az esetekben amikor nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű foganyag.

Ellenjavallatok:

- metakrillát allergia
- fogcsikorgató, zárt harapású páciensek
- kevesebb mint 1,5 mm koronális foganyag

Felhasználás:

A) A gyökércsatorna és a csap előkészítése

- endodonciás kezelés befejezése
- kofferdám használata ajánlott
- a megfelelő csap kiválasztása röntgenfelvétel alapján
- megfelelő mélység megállapítása (apikálisan 4 mm gyökértömőanyagának kell maradni, a csapnak $\frac{2}{3}$ részben a gyökércsatornában kell elhelyezkednie, $\frac{1}{3}$ részben pedig azon kívül.
- gyökértömés eltávolítása Peeso fúróval vagy más forró eszközzel a kívánt mélység eléréséig
- precíz fúrás a megfelelő eszközzel. kerüljük el a preparációt az apexen túl és/vagy a gyökér laterális perforációjánál.
- fúrás után azonnal öblítsük ki a csatornát és tisztítsuk ki
- próba előtt tisztítsuk meg a csapot alkohollal
- próbáljuk be a csapot melynek tökéletesen bele kell illeszkednie a csatornába
- vegyük ki és rövidítsük meg amennyire szükséges
- tisztítsuk alkohollal és szárítsuk meg
- szilanizáljuk a csapot (kerámia bond), 60 msp-ig hagyjuk rajta majd szárítsuk meg olajmentes levegővel
- öblítsük ki a csatornát 2,5 - 5%-os szodium-hypoklorittal (ne használjunk H₂O₂-t)
- vízzel öblítsük és papírpoénnaal szárítsuk

B) Adhezív ragasztás Rebilda DC-vel és Futurabond DC-vel

1. A Rebilda Post beragasztásához az összekevert Futurabond DC-t applikáljuk a gyökércsatornába és a csonkra 20 msp-re. 5 msp-ig levegővel fújjuk át. Ne lámpázzunk.

2. A Rebilda DC használata:

Amikor a 19-es keverő véget használja, applikálja a Rebilda DC-t közvetlenül a gyökércsatornába. Amennyiben szükséges, az applikációs tű kézzel a kívánt irányba hajlítható. Amikor nem a 19-es keverő véget használja, kövesse a következőket: a csapot kenjük be a Rebilda DC-vel. Ne applikáljuk az anyagot közvetlenül a csatornába, ne használjunk lentulo-t sem. Helyezzük be a csapot egy enyhe csavaró mozdulattal, kis fölösleget hagyva. Távolítsuk el a fölösleget ha nem a Rebilda DC-vel folytatjuk tovább a felépítést.

A Rebilda DC QuickMix fecskendő esetében az intraorális vég segítségével közvetlenül applikáljuk az anyagot és a folyamat úgy megy tovább mint az előzőeknél.

3. Legalább 40 msp-ig lámpázzunk, hogy a csap megfelelően rögzüljön és lámpázzuk a Futurabond DC-t mely az okkluzális felszínen van.

Ha más gyártó kompozitjával folytatjuk a felépítést akkor arra az anyagra vonatkozó használati utasítást kövessük.

Ne használjunk eugenol tartalmú anyagokat.

C) Csonkfelépítés

- kövessük az adott anyagra vonatkozó használati utasítást (pl. Rebilda DC)

A gyökércsap eltávolítása korrekció céljából:

- röntgen készítése a pontos méret meghatározásához
- távolítsuk el a restaurációt
- fúrjunk a csap közepébe egy lyukat
- röntgen készítése, hogy lássuk a fúró menetét
- fúrjuk ki a csapot a megfelelő eszközzel (figyelem! a fúró hasonlóan viselkedik a radikuláris dentinben és az üvegszálcsapokban. Ezért nagyon óvatosan kell eljárni, hogy elkerüljük a gyökérperforációt.)

Tisztítás, sterilizálás (a csapok és fúrók nem sterilek használat előtt):

- tisztítsuk és sterilizáljuk autoklávval a csapot (134fokon, 18percig) használat előtt. Minden eszköznek külön tartót használjunk autoklávozás közben.
- A fúrókhoz megfelelő tisztító műszert használjunk (az EN 1040 és EN 1275 szabályai szerint). Néhány aldehidmentes tisztító oldat okozhat elszíneződést a színekód gyűrűknél. Használjunk kefét vagy tegyük ultrahangos tisztító kádba. Öblítsük le majd szárítsuk meg jól. Szükség esetén a tisztítást meg kell ismételni.
- Pormentes, száraz tárolóban tartsuk a fúrókat. A sérülteket ne használjuk ismét.
- A csapokat orvosi alkohollal sterilizáljuk.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.