



SM 2 Universal faliadagoló

Folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához.

Amit nyújt

- Univerzális befogadó képesség: 450ml-es, 500ml-es, 1000ml-es flakon;
- Mind eurokonform, mind Schülke&Mayr flakonok befogadására alkalmas;
- Egyszerűen állítható adagolás (1-3ml-ig);
- Tartós és korróziómentes műanyag szerkezet, formatervezett kivitel;
- Könnyen kivehető pumpaszerkezet, amely a különböző konzisztenciájú, viszkozitású készítményeket is utáncsöpögés nélkül adagolja;
- A kiürült flakonok egy mozdulattal cserélhetők.

Termék adatok

Cikkszám	668500
Adagoló szerkezet színe	fehér
Adagoló szerkezet anyaga	ABS műanyag
Behelyezhető flakonok úrtartalma	450 ml, 500 ml, 1000 ml
Adagolási mennyiségek	1-3 ml

Tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
Adagoló pumpa	668540
Fali panel	668502

Alkalmazási terület


- Az SM 2 Universal faliadagoló alkalmas folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához.

Termékleírás

SM 2 Universal faliadagoló

Szerelési útmutató

A szereléshez szükséges mérési adatok az 1. ábrán láthatók. Használjuk magát az adagolót, mint mintát, a felszereléshez szükséges furatok helyének megjelöléséhez. A furatok megegyeznek a SM1 és a KH faliadagolók felszereléséhez szükséges furataival.

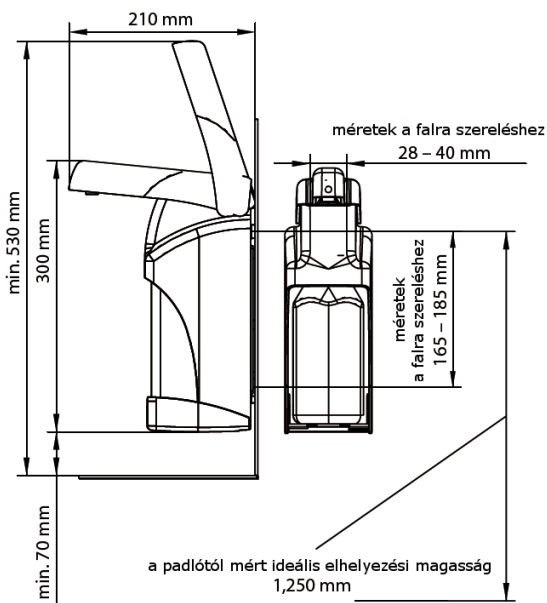


1. ábra – Műszaki adatok


Flakon méretek beállítása

SM 2 Universal faliadagoló alkalmas különböző űrtartalmú flakonok befogadására (450 ml-től 1000 ml-ig). Az eredeti gyári helyzet 1000 ml-es flakonokra van beállítva.

Ha 450 / 500 ml-es flakont kívánunk az adagolóba helyezni, először tekerjük ki teljesen a 2. és 3. ábrán jelzett nyakrészt (A).

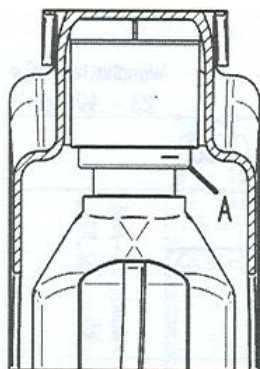

2. ábra – 1000 ml-es flakon

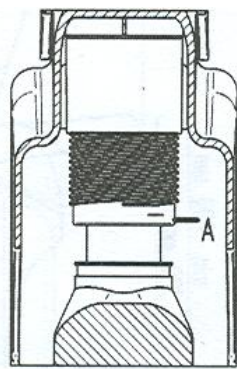

3. ábra – 450/500 ml-es flakon

Flakonok ki- és behelyezése


Mielőtt behelyeznénk a flakont az adagolóba, győződjünk meg a helyes beállításról (2. és 3. ábra). A flakon behelyezéséhez helyezük a szívó csövet a flakonba és annak megtörése nélkül helyezük a flakont a nyakrészbe (A). Finoman nyomjuk tovább, amíg a rúgó engedi, majd a flakont finoman nyomjuk a hátfalnak, hogy függőleges pozícióba kerüljön, és a helyére ugorjon.

A flakon kivételéhez először nyomjuk a flakont felfelé, majd húzzuk magunk felé, amíg a flakon ki nem ugrik a helyéről.

Adagolási mennyiség beállítása

Az adagolási mennyiség beállításánál három lehetőségünk van, 1 ml – 2 ml – 3 ml beállítása. Az eredeti gyári beállítás 3 ml (középső állás).

- emeljük fel az adagoló kart,
- állítsuk be a kívánt adagolási mennyiséget a 4. ábrán látható kar jobbra vagy balra tolasával,
- hajtsuk vissza az adagolókart a helyére.

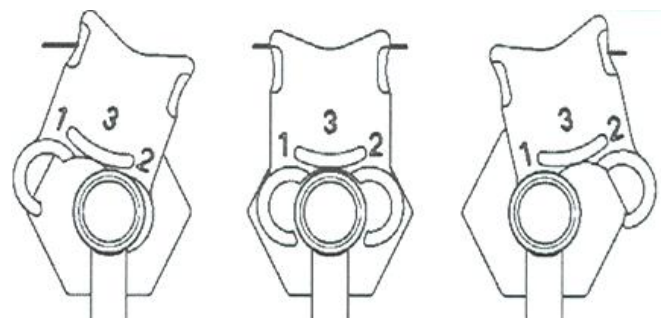

4. ábra – Adagolási mennyiség beállítása

Karbantartás és tisztítás

Az SM 2 Universal normál használat mellett nem igényel semmilyen karbantartást. Az adagoló pumpa eldugulása esetén (pl.: ha az adagolót hosszú ideig nem használjuk) tisztítsuk meg a pumpát meleg vízzel, így a dugulás megszűnik és az adagoló újra használható.

- Az adagoló gyors fertőtlenítését mikrocid® AF liquid készítménnyel végezhetjük.
- Alacsony hőfokon sterilizálható (maximum 60°C).