

Structur 2 SC/QM

Használati utasítás



A **Structur 2 SC/QM** fluoreszkáló, hideg polimerizátum, paszta-paszta típusú anyag, mely alkalmas ideiglenes koronák, hidak, betétek és onlay-k készítéséhez. A **Structur 2 SC/QM** bázis és katalizátor pasztából áll.

Hozzáférhető 8 színárnyalatban A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2 és BL.

Structur 2 QM kapható A1, A2, A3 és B1 színárnyalatban.

Felhasználás

Helyezzük a **Structur 2 SC** patronat a **VOCO** adagoló- és keverő pisztolyba (2-es típusú), vagy más kompatibilis eszközbe. Technikai okokból a töltési szint nem mindegyik patronban egyforma. Ebben az esetben eltávolítva a sapkákat a dugattyú segítségével addig préseljük az anyagot, míg mindkét tartályban egyformán megjelenik az anyag. Ezután helyezzük a keverőcsőrt /6-os típus/ a helyére és 90°-ot fordítva az óramutató járásával megegyezően rögzítjük. A keverő pisztolyt nyomva egyenletesen adagolható, és keveredik az anyag megfelelő arányban.

Használat után ne távolítsuk el a keverőcsőrt, csak a következő használat előtt kell az újat ráhelyezni! Amikor keverőcsőrt cserélünk mindig ellenőrizni, kell, hogy az anyag szabadon áramlik-e a patronokból.

Structur 2 QM QuickMix fecskendőben.

Vegyük le a védőkupakot az óramutató járásával ellenkezőleg elfordítva.

Helyezzük rá a végződésre a 10-es típusú keverő csőrt, rögzítsük 90°-ot fordítva, az óramutató járásának megfelelően. Az anyag automatikusan megkeveredik korrekt arányban, és direkt alkalmazható a kívánt területre.

Minden QuickMix fecskendő levehető dugattyúval van ellátva. A dugattyú egyszerűen kihúzható a QM fecskendőből és visszahelyezhető anélkül, hogy az anyag kiszivárogna. A dugó a fecskendő belsejében a helyére kerül, megakadályozva az anyag kereszt-kontaminációját.

Tanácsok az alkalmazáshoz

Minden alámenős részt a preparált felszínekről el kell távolítani. Nem lehet eugenol tartalmú cementet használni a fog töméseire. Ha nem áll rendelkezésre előre-gyártott korona, vagy csak hasonló tudunk használni lenyomattal, kell kezdeni a műveletet. A lenyomatban sem lehetnek alámenős részek, és elfolyó csatornákat kell készíteni. Ha az ideiglenes fogpótlás vékony falúnak tűnik a lenyomattól, ki kell vágni a megfelelő helyeken, különösen figyelni kell az interdentális septumokra. Majd jól mossuk és szárítsuk le a lenyomatot. Nyomjuk egyenesen a lenyomatba a **Structur 2 SC/QM** anyagot! Ne töltsük túl a lenyomatot!

A **Structur 2 SC/QM** elér egy elasztikus fázist 1 - 1,5 percen belül keveréstől számítva (hozzávetőlegesen 0,5 - 1 percig legyen szájban).

Az ideiglenes pótlást az elasztikus fázis alatt vegyük ki a szájból, 1,5 percen belül, /a keverési időtől számítva/. A kötési időt követhetjük a szájban a kifolyt felesleget vizsgálva. A kötési időt nem szabad összehasonlítani a fel nem használt anyag /a keverő csőben/ és a szájba helyezett anyag kötési idejével!

Szobahőmérsékleten /23°C-on, 50% páratartalom mellett/ a feldolgozási idő a következő:

perc	0:00	0:30	1:00	1.30	4:00
Behelyezése a szájba					
megkötés a szájba					
eltávolítás					
teljes megkötés					
befejezés					

Eltérő eredmény a különböző szobahőmérséklet függvénye lehet. Hozzávetőlegesen 2 - 3 perc elteltével az ideiglenes pótlást ki lehet venni a lenyomattól és töröljük szárazra. /ha szükséges használjunk oldószert, pl.: etil-alkoholt/. Ez oldja a restauráció felszínén keletkezett vékony oxidációs réteget, és könnyebb lesz a végső kidolgozás. A pótlás felszíne selymesen mattnak tűnik. Óvatosan vágjuk le az anyagfelesleget, különös tekintettel a gingivális szélekre. Ragasztásra használjunk eugenol-mentes ideiglenes cementet.

Indikációk/figyelmeztetések

- A **Structur 2 SC/QM** tartalmaz metilmetakrilátot, aminosavakat, terpentint, benzol-peroxidot, BHT-t, bármely ezen anyagokkal szembeni túlérzékenység vagy allergia esetén ne használjuk az anyagot.
- Az ideiglenes korona- és hídanyag alkalmazása előtt a dentin-túlérzékenység megakadályozására a preparált fogfelszíneken alkalmazzunk fluoridos ecsetelést, vagy egyszerű védőlakkokat.
- Az ideiglenes pótlást töréstől és sérüléstől óvni kell, ezért olyan helyeken lehet csak alkalmazni, ahol nincs kitéve extrém terhelésnek /pl.: a molárisok területén ne alkalmazzuk /.
- Ahol alábéleléseket, töméseket, vagy resin-bázisú anyagokból /kompozitból/ csontfelépítéseket készítettünk elegendő izolálni /pl.: glicerinnel/, hogy az ideiglenes pótlás kivételkor azok ne mozduljanak el.
- Nem megfelelő szájhigiéne vagy bizonyos szájvizek intenzív használata elszíneződéshez vezethet.
- A végső kidolgozása a teljes kötés után lehetséges /kb.4perc elteltével/.
- A sérült ideiglenes pótlás javítása:
Ha az ideiglenes pótlás eltörik a **Structur 2 SC/QM** extrém stabilitásának ellenére a következő eljárások javasoltak:
- Légbuborék esetén javítsuk **Structur 2 SC/QM** ideiglenes pótlás anyaggal
- Ha a kidolgozás során törik, rögtön fedjük frissen kevert **Structur 2 SC/QM** anyaggal.
- Ha bizonyos ideig szájban volt és így törik, csiszoljuk meg a törött felszíneket, a kiálló széleket távolítsuk el. Alkalmazzunk bondot, és kövessük a használati utasítást. Majd folyékony kompozittal fedjük a törött részeket, és illesszük össze.

Tárolás

Tárolási hőmérséklet 4°C - 23°C között. Fénytől óvjuk, tartsuk jól lezárt dobozban, fiókban, stb.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ, tanács nem mentesíti Önt annak megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásáért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét, megfelel a fennálló szabványoknak, és azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.

VOCO GmbH
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com



