

VOCO

Twinky Star

0482

Megfelel az EN 24049 / ISO 4049-nek

Használati utasítás

A **Twinky Star** színes, fényre kötő, röntgenárnyékot adó kompomer tömőanyag, mely a tejfogakba helyezve csillogó hatást kelt.

Használható halogén ill. LED lámpával dentin/zománc bonddal.

Alkalmazási terület:

- tejfogak tömésére

Felhasználás:

Szín kiválasztása:

A fogat fluorid mentes tisztító pasztával tisztítsuk meg majd válasszuk ki a megfelelő színt a 8 közül. Biztosítsunk száraz területet.

A kavitás preparációja:

Lényegében kevés előkészület szükséges ahhoz, hogy egészséges foganyagot nyerjünk. Kövessük a tejfogakhoz szükséges előkészületi feladatokat.

Tisztítás:

- a kavitás megtisztítása vízszaggal
- tisztítás után kerüljük a vérrel vagy nyállal való érintkezést
- szárítsuk a kavitást, de ügyeljünk arra, hogy ne szárítsuk teljesen ki (nedves bond technika)

Pulpa védelem:

A pulpához közeli területre alkalmazzunk kalcium-hidroxid alábélelőt

Bonding:

A megfelelő tapadás érdekében dentin/zománc bond használata javasolt

A Twinky Star felhasználása:

2 mm-es rétegeket alkalmazzunk és lámpázzuk rétegenként 40 mpig hagyományos lámpával. Halogén lámpa esetében a kibocsátás legyen minimum 500 mW/cm², LED lámpa esetében 300 mW/cm². Szoros széli zárást biztosítsunk. A lámpa vége legyen minél közelebb a töméshez. Ha ez a távolság 5 mm-nél nagyobb akkor a polimerizálás határfoka csökkenhet. A nem megfelelő lámpázás elszíneződéshez vagy pulpitiszhez vezethet.

Azonnal polírozhatunk a durvább rész megmunkálás után. Befejezésül fluoridizáljuk az egész fogfelszínt.

Biztonsági előírások

- A **Twinky Star** tartalmaz Bis-GMA-t, dimethakrilátot, TEGDMA-t, BHT-t
- ha a száraz munkaterületet nem sikerült biztosítani akkor ne alkalmazzuk az anyagot, valamint akkor sem ha a páciens allergiás valamely összetevőre

- A **Twinky Star** nem használható direkt vagy indirekt pulpasapkázásra, maradandó fogak tömésére

- Alkalmazáskor ne használjunk zinc-oxid eugenol cementet vagy más eugenol tartalmú anyagot.

- A **Twinky Star** kompomer bázisú tömőanyag. A csillogó hatását egy feloldhatatlan ásványi anyag okozza. A Twinky Star nem tartalmaz semmilyen fémet.

Bármelyik szín érintkezésbe léphet étellel vagy kozmetikummal, nem lép fel mérgezés.

A polimerizációt követően az anyag erősen illeszkedik a szintetikus mátrixba. Használata biztonságos.

Tárolás

4°C és 23°C fok között tárolandó. Használat előtt hagyjuk, hogy az anyag elérje a szobahőmérsékletet. Lejárat után semmiképpen ne használjuk.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.