

Ufi Gel SC

Használati utasítás

Az **Ufi Gel SC** A-szilikon alapú, tartósan puhán maradó alábélelő anyag. A hidegen kötő autopolimerizátum tulajdonságai biztosítják, hogy az **Ufi Gel SC** egyszerűen és gyorsan használható direkt, valamint indirekt alábélelésre. A készlet tartalmaz egy adhezív folyadékot a fogsor és az alábélelő anyag közti erős adhézió elérése, a tulajdonképpeni alábélelő anyagot, valamint a Glazing bázist és katalizátort a durva felületek simítására. Az **Ufi Gel SC** alkalmazható minden PMMA-alapú fogsorhoz. A friss alábélelés az **Ufi Gel SC**-vel javítható és korrigálható.

Indikációk:

Teljes és részleges fogsorok tartósan puhán maradó alábélelése

- a nyomáspontokra eső terhelés enyhítésére
- a palatális vibrációs vonal elzárására
- sorvadtt gerincek és / vagy elégtelen tapadás esetén
- éles szélű alveoláris nyúlványok tompítására
- implantológiában a gyógyulás támogatására

Felhasználás:

1.A fogsor előkészítése és a bevonat elkészítése

Tisztítsa meg alaposan a fogsort kefével és szárítsa meg. A meglévő korábbi alábélelést minden esetben el kell távolítani. Minden alábélelendő területről legalább 1 mm-t le kell csiszolni, hogy a későbbi alábélelés legalább 2 mm lehessen. A vesztibuláris, lingvális illetve dorzális peremeket élezze le. A protézis peremeket kerekítse le.

Távolítsa el a csiszolóport kefével, vagy száraz, olajmentes levegővel.

Ne használjon vizet vagy víz-spray-t. Ezután zsírtalanítsa a protézist.

Ehhez egy szőszmentes kendőt nedvesítsen be izopropanollal / tiszta alkohollal,

(ami legalább 90%-os), törölje le vele a felületet és hagyja 1 percig száradni

Nedvesség, adalékanyagok (például kavitás tisztító szerek), nyál,

monomer-tartalmú szintetikus folyadékok vagy az érintés

csökkenti az **Ufi Gel SC** tapadását a fogsorhoz.

Az első használat előtt cserélje ki az adhezív üvegének kupakját az ecsettel ellátott kupakra.

Ne használja az ecsettel ellátott kupakot az alkoholhoz!

Applikálja az adhezívet az előkészített felületekre, amely az **Ufi Gel SC**-t és a mázat is rögzíteni fogja majd. Az adhezívnek egyenletesen és teljesen be kell fednie a felületet.

Figyelem: használat után azonnal zárja vissza az üveget, és tárolja függőleges helyzetben.

Hagyja 1 percig száradni.

Helyezze az **Ufi Gel SC** patronát a **VOCO** (2. típusú) vagy hasonló

adagolópisztolyba. Enyhe eltérés előfordulhat a patron két

kamrájának töltési szintje között. Ebben az esetben távolítsa el a

patron kupakját és nyomja ki az anyagot, amíg mindkét nyílásban

egyformán megjelenik. Ezután helyezze fel a keverő hegyet és 90 °-os

forogatással rögzítse. Az anyag a kar megnyomásával automatikusan és

a megfelelő arányban megkeveredik. Használat után hagyja a keverő

hegyet a patronon, vagy tegye vissza a zárósapkát.

Applikálja a megkevert anyagot először linguálisan / dorzálisan, majd

vestibulárisan. Ezután fedje be az alapot. Győződjön meg róla, hogy

az adhezívet teljesen befedi a szilikon. Az **Ufi Gel SC** alábélelésnek

legalább 2 mm vastagnak kell lennie. Az **Ufi Gel SC** feldolgozási

ideje 1 perc 45 másodperc a keveréstől számítva.

2a. Közvetlen alábélelés a szájbán:

1 perccel az **Ufi Gel SC** a bevonat képzés után a fogsort vissza lehet helyezni a páciens szájába.

Majd a páciens normál okklúzióval zárja a száját (1 perc).

Utána rágó- és nyelőmozdulatokat kell végeztetni (5 percig).

Összesen kb. 6 perc elteltével a fogsort el lehet

távolítani a szájból.

Fontos: szigorúan tartsa be a fent megadott időközöket.

A finírozást a fogsor a szájból történő eltávolítása után

kell elvégezni.

Minden korábban elkezdett finírozást különleges körülményekkel kell kezelni.

2b. Közvetett alábélelés laboratóriumban:

Ha az alábélelést laborban készítik el, izolálják

a megnedvesített gipszmodellt formaldehid mentes

alginát-alapú szintetikus anyagokhoz alkalmazható

szeperáló ágenssel, (nem javasolt a szilikon-bázisú

ágens) annak használati utasítása szerint. Az **Ufi Gel SC**-vel

bevonat protézist helyezték a gipszmodellre és az alábélelő

készülékben vagy a küvétában rögzítsék őket. A funkció

peremeket alakítsák fém spatulával, vagy tiszta gipszkéssel.

Az **Ufi Gel SC** alakítása után 2 - 5 percig hagyják állni, helyezték

az alábélelő készüléket, benne a protézissel és a modellel a nyomó

egységbe 15 percre 40 - 45°C-on.

Ezt követően 20 percig hagyják az alábélelő készüléket hűlni.

Figyelem: a protézist, a gipszmodellt, vagy az alábélelő készüléket

egyik munkafázisban sem szabad gőzfúvóval kezelni.

3. Az alábélelés kidolgozása

Az anyagfelesleget finom, éles (bőrvágó) ollóval, vagy szikével

el lehet távolítani. Ajánlatos a mellékelt polírozó koronggal csiszolni.

4. Korrekciók:

Az alábélelés azonnal javítható. Ehhez az alábélelést vízzel

le kell öblíteni és megszáritani. Utána a friss anyagot fel lehet rá

venni, alakítani és 7 percig a szájban, vagy 5 percig a nyomótálcán

keményedni hagyni.

Az alábélelés későbbi javítására (két héten belül) az

Ufi Gel SC felületi rétegének eltávolítása után van lehetőség.

5. Kidolgozás:

Használja a kidolgozott felületek simává tételére és fényesítésére a

Glazing-ot a 3. lépésben leírt módon. A jobb adagolás érdekében tartsa a

palackot cseppentővel lefelé, és hagyja hogy a légbuborékok felemelkedjenek.

Cseppentsen a keverőlapra azonos számú Glazing Basis-t és katalizátort és

keverje homogénre az egyszerű használatos ecsettel. A keveréket ecsettel,

vékonyan vigye fel a megfelelő felületre, azaz a frissen szárított vágás,- és

csiszoló felületre. Az **Ufi Gel SC** Glazing feldolgozási ideje 1 perc 30 másodperc.

A kötési idő szobahőmérsékleten 10 perc. Alacsonyabb hőmérsékleten a

megmunkálási idő meghosszabbodik. A keményedési időt nyomótálcán

(40 - 45°C-on) kb. 3 percre lehet lerövidíteni.

Figyelmeztetések, elővigyázatossági intézkedések:

Az adhéziót javítja a protézis kiegészítő érdesítése homokfúvással.

Ezt követően törölje le tiszta alkohollal.

- A kidolgozást szobahőmérsékleten végezze.

- Az **Ufi Gel SC** hűtőszekrényben történő tárolása megnöveli a kidolgozás és a kötés idejét.

- Tartsa be a megadott keverési arányt. A munka- és kötési időket nem lehet módosítani azáltal, hogy kisebb vagy nagyobb mennyiségű a katalizátort alkalmaz.

- Az optimális adhézió eléréséhez mindig tartsa be a kötési időket, egészen a végső kötésig.

- Csak a durva kész felületeket (funkcionális peremeket) fedje le a glázzal az ételmaradékok vagy elszíneződés megelőzésének elkerülése érdekében.

- Kerülje a metakrilát szennyeződéseket (pl. nem tiszta nyomótálcák protéziskészítés után, metakrilát tartalmú oldószer alkalmazása a régi alábélelések eltávolításához). A szennyeződés az **Ufi Gel SC/ Glazing** közötti adhézió tökéletes kötéséhez, és a szájban érezhető irritáló ízhez vezethet.

-Használat után szorosan zárja vissza a Glazing palackot:

Glazing Basis = fehér kupak

Glazing Katalizátor = piros kupak

- A befejezéshez használja a mellékelt barna, durva polírozókorongot, rendelési száma: 2049, vagy más megfelelő rugalmas anyaghoz tervezett csiszolót vagy polírozó korongot. Ne lélegezze be a szilikon vagy szintetikus port a protézis, illetve az alábélelés polírozásakor! Védőmaszk viselése ajánlott.

- Az Ufi Gel SC módosított polidimetilsziloxánt és platina katalizátort tartalmaz.

Az adhezív butanont és metakrilátot tartalmaz. Ne alkalmazza az ezen összetevőkkel szembeni allergia esetén.

- Az alábélelt protézis tisztítását puha, speciális protézis-kefével, vagy fogkefével és koptató hatástól mentes tisztítóanyaggal lehet elvégezni (pl. semleges kémhatású szappan). Végül alaposan le kell öblíteni.

Tárolás:

4 ° C - 23 ° C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.