

Ufi Gel hard

Használati utasítás

Termék leírás:

Az **Ufi Gel hard** polimetakrilát alapú, hidegen kötő, tartósan kemény fogsoralábélelő anyag. Egyszerűen és gyorsan használható direkt és indirekt alábélelések készítésére.

Az **Ufi Gel hard** folyadék nem tartalmaz metilmetakrilátot, ezzel minimalizálva a nyálkahártya irritáció és az allergia kockázatát. A készlet kondicionálót is tartalmaz, amelynek segítségével az alábélelő anyag tökéletes és végleges tapadása érhető el.

Alkalmazási területek:

- Funkcióját veszített teljes vagy részleges protézisek kemény, tartós, teljes vagy részleges alábélelése
- Protézisszélek meghosszabbítása

Alkalmazás:

1. A protézis előkészítése

Ellenőrizze az okklúziót, és szükség esetén végezze el a korrekciót. Ezután alaposan tisztítsa meg a protézist kefével és szárítsa meg. A protézist a szükséges helyeken érdesítse fel egy alkalmas forgóeszközzel, beleértve a bukkális és labiális széleken. Tisztítsa és szárítsa meg a protézist. Izolálja (pl: vazelinrel) a protézis egyéb felszíneit (műfogak, a labiális és bukkális területek felérdesített felszíneit), hogy az **Ufi Gel hard**-dal nem kívánt kontaktust elkerülhesse.

A protézis kapcsait, csúsztatóit és finommechanikai rögzítőit ki kell blokkolni folyékony szilikonnal vagy alacsony olvadáspontú viasszal!

2. A kondicionáló applikálása

Applikálja az adhezívet a teljes alábélelendő felületre és hagyja megszáradni (30 másodperc). Először a labiális és bukkális felszínre vigye fel, ezután rétegezze az alaplemezre. A kondicionáló az applikálás után körülbelül 10 percig marad hatékony.

Figyelem: Az üveget használat után azonnal szorosan zárja vissza a magas illékonyság miatt. A kefe például alkohollal tisztítható.

3. Adagolás és keverés

Az első használat előtt, cserélje ki az (üveg) szállítási kupakját a cseppentőre.

Az **Ufi Gel hard** keverési aránya: 1 ml folyadék, 3 ml ($\approx 1,8$ g) por.

Ez megfelel 2 beosztás a cseppentőn és 1 beosztás az üveghengeren.

2 beosztás folyadék : 1 beosztás por

(figure)

Sűrűbb konzisztenciájú anyag pl. a protézisszélek meghosszabbításának készítésére, több por hozzáadásával érhető el. A cseppentővel szívja fel a *folyadékot* és adagolja a PP keverő pohárba. A *port* használat előtt rövid ideig rázza fel, majd adagolja az üveg hengerbe. Tegye a port a folyadékba, és műanyag spatulával óvatosan keverje össze, amíg homogén nem lesz. A légbuborékok keletkezése lassú, a keverőcsésze oldalfala melletti egyenletes keveréssel kerülhető el. A buborék képződés elkerülése érdekében a keverőcsészt folyamatosan rázogassuk vagy enyhén ütögessük a csésze oldala mentén. Ezután hagyja az anyagot állni a kívánt konzisztencia eléréséig (a keverés kezdete után kb. 1,5 perc).

4. Az Ufi Gel hard applikálása

Applikálja az **Ufi Gel hard**-ot egyenletesen az előkészített fogsor szélekre és / vagy alapra műanyag spatula segítségével. Kerülje el az anyagfelesleg képződését, vagy távolítsa el az anyagfelesleget a megfelelő eszközzel.

Helyezze vissza a fogsort, és okklúziós helyzetben a páciens gyakoroljon enyhe

nyomást a fogsorra 1 percig. Ezután végezzen funkcionális rágó és a nyelő mozgást 2 percig. Ügyeljen arra, hogy semmilyen anyag ne folyhasson be a torokba a felső fogsor alábélelésekor, különösen a kemény és a légyszájpad átmenetnél (A-vonal).

4.1 Részleges vagy teljes protézis alámenős részekkel

A keverés kezdete után 5 perc elteltével vegye ki a fogsort és azonnal távolítsa el ollóval vagy szikével a kifolyt felesleget. Helyezze vissza a szájba, ellenőrizze az okklúziót és hagyja kötni 2-3 percig. A végső kötési fázis kuktában kb. 40 ° C-os meleg vízben is elvégezhető, ha az alábélelt fogsort nem kell újra beilleszteni.

Ne engedje, hogy a kötés ideje alatt az anyag a levegővel érintkezzen, és így megkötetlen, oxigén-inhibíciós réteg alakuljon ki az anyag felszínén.

4.2 Teljes fogsor alámenős felszínek nélkül

Az anyagfelesleg a végső polimerizáció előtt intraorálisan vagy extraorálisan is eltávolítható.

Intraorálisan: távolítsa el a felesleges anyagot 5 perc után (a keverés megkezdésétől számítva) a megfelelő eszközzel. További 2-3 percig hagyja a szájban, amíg az **Ufi Gel hard** teljesen meg nem köt.

Extraorálisan: lásd a 4.1 pontban leírtakat.

5. Az alábélelés befejezése

Az egész alábélelt felületet finírozható és polírozható (vídia fúróval, gumi polírozóval, polírozó korong).

a keverés kezdete	2 perc	keverés és applikálás
fogsor visszahelyezése a szájba	1 perc	gyakoroljon nyomást
	2 perc	funkciós mozgás
a fogsor eltávolítása, ha szükséges	1.5 perc	anyagfölség eltávolítása
fogsor visszahelyezése a szájba	2 perc	kötés
a fogsor eltávolítása	1 perc	finírozás, polírozás
	9.5 perc	

☐ extraorális

☐ intraorális

☐ intraorális vagy extraorális

Jelzések , óvintézkedéseket:

- A folyadék palackját gondosan lezárva és függőleges helyzetben tárolja.
- Kerülje a folyadék bőrrel való érintkezését. Az érintkezésbe került bőrfelületet öblítsük le alaposan vízzel és szappannal.
- A szemmel való érintkezés esetén a szemet alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon szemorvoshoz.
- Az **Ufi Gel hard** hidroxietilmetakrilátot, benzolperoxidot és acetont tartalmaz. Ne használja az ezekkel az anyagokkal szembeni ismert túlérzékenység (allergia) esetén.
- A megadott időértékek, 25 °C-os szobahőmérsékletre és 35 °C-os szájhőmérsékletre vonatkoznak. A polimerizáció lassabb lesz alacsonyabb hőmérsékleten, míg a magasabb hőmérséklet gyorsítja a polimerizációt.
- A túl hosszú vagy erőszakos keverés légbuborékok keletkezéséhez, egyenetlen konzisztenciához vezethet, és durva felületet eredményez.

- A keverő pohár többször is használható.

Tárolás:

A tárolási hőmérséklet 4 ° C és 23 ° C-on Ne használja a lejáratí idő után.

Tisztítási javaslatok:

Az **Ufi Gel hard**-dal alábélelt fogsor a szokásos tisztító anyagokkal és eljárásokkal tisztítható.

Ez a háztartási, valamint a professzionális tisztításra is egyaránt vonatkozik.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk