

Ufi Gel P

Használati utasítás



Az **Ufi Gel P** A-szilikonbázisú, tartósan puhán maradó fogsoralábélelő anyag.

Az autopolimerizálódó, hidegen keményedő **Ufi Gel P** feldolgozhatósága egyszerű és gyors mind a direkt és mind az indirekt alábélelések esetében. A készlet tartalmaz egy adhezív folyadékot, amely a protézis és az alábélelőanyag közötti erős kötődés kialakításáért felelős, továbbá az alábélelőanyagot, valamint az érdes felszínnek elsimítására szolgáló Glazing bázist és katalizátort. Az **Ufi Gel P** minden PMMA-bázisú protézishez alkalmas. Az újonnan elkészített **Ufi Gel P** alábélelés javítható és korrigálható.

Felhasználási területe

Részleges és teljes protézisek tartósan puhán maradó alábélelése

- a nyomás elhárítására
- rosszul illeszkedő alaplemez vagy tapadási nehézségek esetén az A-vonal elhatárolása
- éles szélű alveolus nyúlványok távoltartása
- segítség a gyógyító eljárások során az implantológián

A használat módja

1.

A protézist kefe segítségével alaposan tisztítsa és szárítsa meg. A régi alábélelést mindig távolítsa el. Minden alábélelendő felületet legalább 1 mm-rel csiszolja le, hogy az alábélelés vastagsága később minimum 2 mm legyen. A vestibuláris és linguális széleket anatómikusan képezze ki. A protézis széleit kerekítse le. Tisztítsa és szárítsa meg a protézist. **Majd kizárólag tiszta Isopropanol / alkohollal (legalább 90 %-os) zsírtalanítsa** és hagyja 1 percig száradni. Kerülje a protézis nyállal, monomertartalmú szintetikus folyadékkal, vagy bőrrel való érintkezését, az **Ufi Gel P** és a protézis közti optimális kötés elérésének érdekében.

Az első használat előtt az adhezív üveg kupakját cserélje ki a kefével ellátott kupakra.

Az előkészített felületet, amelyre majd az **Ufi Gel P** kerül, kenje be vékonyan adhezívvel. A felületet teljesen és egyenletesen fedje az adhezív. Kb. 1 percig hagyja száradni. **(Figyelem: Az adhezívet tartalmazó üveget használat után azonnal zárja be és állítva tárolja.)**

Az **Ufi Gel P** bázist és katalizátort 1 : 1 arányban (ugyanolyan hosszúságú ill. ugyanolyan tömegű mennyiséget) keverjen 30 másodperc alatt buborékmentesre és homogénre.

Használat után a tubusokat rögtön zárja be, ne cserélje össze a tetejüket:

katalizátor = világoskék
bázis = piros

A kikevert anyagot először a linguális, majd a vestibuláris szélekre vigye fel, ezután rétegezze az alaplemezre.

Az **Ufi Gel P** minimum 2 mm vastag rétegben kerüljön az alábélelendő felületre. Az **Ufi Gel P** a keverés kezdetétől számítva 2 percig megmunkálható.

2a. Direkt alábélelés a szájbán

A protézis nyálkahártyával érintkező felszínét kenje be **Ufi Gel P**-vel, majd egy perc elteltével helyezze a páciens szájába.

A páciens csukja a száját normál okklúziós állapotba (1 percig). Végeztessen a pácienssel rágó- és nyelmozgásokat (5 perc). Összesen 6 perc elteltével vegye ki a protézist a páciens szájából.

Fontos az időt pontosan betartani.

A kivétel után következhet az óvatos kidolgozás kb. 10 percig.

2b. Indirekt alábélelés a laborban

Ha az alábélelés laborban történik, a protézis alábélelő anyaggal történő felrétegzése után a megnedvesített gipszmodellt szintetikus anyagokhoz való formaldehidmentes

választóeszközzel (a használati utasításának megfelelően) izolálja.

Az **Ufi Gel P**-vel felrétegzett protézist helyezze a gipszmodellre, és artikulátorban vagy küvettában rögzítse. A funkcionális széleket fém spatulával vagy tiszta gipszkéssel formázza meg. Ezután hagyja kötni 2 - 5 percig az

Ufi Gel P-t, majd az artikulátort (vagy a küvettát) a protézissel és a gipszmodellel helyezze 15 percre nagy nyomású edénybe (40 - 45 °C-on).

Végül kb. 20 percig hagyja kihűlni.

Fontos: a protézist, a gipszmodellt vagy az artikulátort egyik munkafázisban se kezelje gözzel.

3. Az alábélelés kidolgozása

A felesleget éles ollóval vagy szikével távolítsa el. Ajánlatos a mellékelt Lisko polírozókoronggal átcsiszolni. A hűtés (PI. **DentoCool** hűtősray, hűtőszekrény, stb.) megkönnyíti a kidolgozást.

4. Korrigálás

Lehetséges az alábélelés azonnali korrektúrája. Ebben az esetben mossa le vízzel az alábélelést és szárítsa meg, majd vigyen fel friss anyagot, modellálja és 7 percig a szájbán vagy 5 percig a nagy nyomású edényben hagyja megkeményedni.

Későbbi korrektúra (két héten belül) csak a felső **Ufi Gel P** réteg eltávolítása után lehetséges.

5. Befejezés

A kezelt felszínnek lezárására és lesimítására használjon Glazinget. A pontosabb adagolás érdekében tartsa az üveget függőlegesen, a cseppentővel lefelé, hogy a légbuborékok az üvegben felfele emelkedjenek. Egyszerhasználatos ecsettel keverjen homogénre ugyanannyi csepp Glazing bázist és katalizátort a keverőlapon. A keveréket vékonyan vigye fel egy ecsettel a megfelelő felületekre (az új, száraz vágott felszínre). Az **Ufi Gel P** Glazing 2 percig megmunkálható. A kötésidő szobahőmérsékleten 10 perc. Az alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja a megmunkálási időt. A megkeményedési idő nagy nyomású edényben (40 - 45 °C-on) 3 percre lerövidíthető.

Megjegyzés

- A protézis előkészítésére a műanyag rész homokfújással tovább érdesíthető. Ezt követően a munkadarabot tiszta alkohollal mossa le.
- Az **Ufi Gel P** hűtőszekrényben történő tárolása meghosszabbítja a feldolgozási és a kötési időt.
- Tartsa magát a megadott keverési arányhoz. A megmunkálási és kötési idő a katalizátorpaszta alul- vagy túlادagolásával nem befolyásolható.
- A tökéletes adhézió érdekében tartsa be a megkeményedési időt, hogy az anyag teljesen megköthessen.
- Glazinggel csak a nem teljesen sima felszíneket kell bekenni, az ételből származó apró részecskék megtapadása, illetve az elszíneződés elkerülése érdekében.
- A Glazing üvegét használat után rögtön zárja be.
Glazing bázis = fehér tető
Glazing katalizátor = piros tető
- A csiszoláshoz használja a mellékelt Lisko polírozókorongot, vagy más, rugalmas anyaghoz való frézert vagy polírozókorongot. A protézis, illetve az alábélelés megmunkálásakor ne lélegezze be a műanyag és/vagy szilikon port.

- Az **Ufi Gel P** modifikált poldimetilsziloxánt, platinkatalizátort, adhezív butanont és metakrilátot tartalmaz. Ezen alkotóelemekre vonatkozó allergia esetén ne használja a készítményt.



65 220 128 / 038

P.O. Box 767
D-27457 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (47 21) 719-0
Fax +49 (47 21) 719-140
e-mail: info@voco.de
<http://www.voco.de>

- Az alábélelt protézist egy puha protéziskefével, vagy fogkefével és dörzsmentes tisztítóval (pl. semleges szappan) kell tisztítani, végül alaposan leöblíteni.

Tárolás

Szorosan bezárva és 24 °C alatt tárolja.

Kiszerezés

50 ml bázis, 50 ml katalizátor, 10 ml adhezív, 10 ml Glanzing bázis/katalizátor, tartozékok	Cikkszám 2070
50 ml bázis/katalizátor-utántöltő	Cikkszám 2071
10 ml adhezív-utántöltő	Cikkszám 2076
20 ml Glanzing-utántöltő	Cikkszám 2077

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttük.