

1. White Dental Beauty Fogfehérítő rendszer

A White Dental Beauty egy fogorvosok által irányított, fogorvos által felügyelt, otthon is használható, fecskendőben előkészített fehérítő rendszer. Ez egy átlátszó, ízesített, magas viszkozitású ragadós hatású, 5%, 10% (3,6% HP) és 16% (5,8% HP) karbamid peroxid gél vagy 6% hidrogén-peroxid gél. A White Dental Beauty karbamid-peroxid gél kálium-nitrátot és 0,11% tömegarányos (1100 milligramm per liter) fluoridiont tartalmaz. A White Dental Beauty gél 20% vizet tartalmaz a fog dehidratációjának csökkentése érdekében, így csökkenti a fog visszaszíneződését. Minden White Dental Beauty termék egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, például hosszabb hatással, jobb tapadási tulajdonságokkal és egyedi tervezésű applikációs tálcával.

2. Összetevők:

White Dental Beauty 5% CP Novonnal

Összetevők: víz (aqua), glicerín, karbomer (nátriumsó), hidrogén-peroxid, nátrium-tripolifoszfát, karbamid, aroma, kálium nitrát, nátrium-fluorid.

White Dental Beauty 10% CP Novonnal

Összetevők: víz (aqua), glicerín, karbomer (nátriumsó), hidrogén-peroxid, nátrium-tripolifoszfát, karbamid, aroma, kálium nitrát, nátrium-fluorid.

White Dental Beauty 16% CP Novonnal

Összetevők: víz (aqua), glicerín, karbomer (nátriumsó), hidrogén-peroxid, nátrium-tripolifoszfát, karbamid, aroma, kálium nitrát, nátrium-fluorid.

White Dental Beauty 6% HP Novonnal

Összetevők: víz (aqua), glicerín, karbomer (nátriumsó), hidrogén-peroxid, nátrium-tripolifoszfát, karbamid, aroma, kálium nitrát, nátrium-fluorid.

3. Használati utasítás:

Kövesse fogorvosa utasításait arra vonatkozóan, hogyan viheti fel a gél a fogfehérítő sínre. Fogívenként a fecskendő részének maximum 1/3-1/2-ét használja fel.

Mosson fogat, majd helyezze be a fehérítősínt. Óvatosan igazítsa a sínt a fogai oldalához. Az ajánlott viselési időtartam lejárata követően távolítsa el a sínt.

Tiszta ujjal vagy egy puha fogkefével távolítsa el a felesleges gél.

Öblítse ki a száját kétszer; ne nyelje le az öblítő vizet.

Ha jelentős mértékű érzékenységet tapasztal, hagyja abba a kezelést és forduljon fogorvosához.

Tisztítsa ki a fehérítősínt puha fogkefével és hideg csapvízzel.

4. Ajánlott viselési időtartamok:

White Dental Beauty 5% CP,	2-4 órára
White Dental Beauty 10% CP,	2-4 órára (vagy éjszakára)
White Dental Beauty 16% CP,	1-2 órára
White Dental Beauty 6% HP,	30-90 percre

5. A fogfehérítésre vonatkozó óvintézkedések:

A fogak fehérítéséhez ne használjon háztartási fehérítőt.

A terhes nők számára a fogfehérítés ellenjavallt.

A gél hőtől/napfénytől távol tartandó. Ne fagyassza le.

A fehérítés nincs hatással a fogtömésekre és a koronákra.

Fehérítéskor ne használjon és ne egyen dohánytermékeket.

Amennyiben bármilyen kérdése adódik a termék megfelelő használatára vonatkozóan, kérjük, haladéktalanul forduljon orvosához.

6. Mellékhatások:

A páciensek néhány százaléka érzékenységet tapasztalhat fogfehérítés közben. Ez esetben vegye ki a fehérítősínt és vegye fel a kapcsolatot a fogorvosával.

A kritikusan magas savtartalmú ételek és gyümölcslevek fogérzékenységet okozhatnak.

Néhány páciens ideiglenes kellemetlenség-érzetet tapasztalt a fogínyén, ajkain, torkán és a nyelvén. Amennyiben az említett tünetek bármelyike két napnál tovább tart Önnél vagy folyamatosan súlyosbodik, forduljon fogorvosához. A kezelés befejezését követően ezek a mellékhatások többnyire 1-3 napon belül megszűnnek.

A kávé, dohány és más termékek egy idő után újra beszínezhetik a fogait. Ez esetben néhány éjszaka alatt újra kifehérítheti fogait.

Az egészséges mosoly érdekében a fehérítés előtt is elengedhetetlen a rendszeres fogászati ellenőrzés és fogmosás.

A gél naptól és hőtől távol tartandó.

A fehérítés befejezését követően távolítsa el a fel nem használt fehérítő gél.

Gyermekek elől távol tartandó.

Ne nyelje le a gél és az öblítő vizet. A termék peroxidot és fluoridot tartalmaz, ezért nagy mennyiségben lenyelve káros lehet.

7. Európát érintő óvintézkedések:

Ne használja 18 éven alatti személynél.

Kizárólag gyakorló fogorvosok részére forgalmazható. Minden használat esetén fogorvosnak kell elvégeznie az első kezelést, vagy ennek megfelelő szintű ellenőrzést szükséges biztosítani a páciens számára. Ezután az eszközt át lehet adni a páciensnek, aki önállóan végezheti el a többi kezelést.

Kérjük, vegye figyelembe a külső csomagolásra/fecskendőre nyomtatott lejárati dátumot.

Szembe ne kerüljön; amennyiben mégis a szemébe kerül, azonnal öblítse ki.

Forgalmazza: Front-Dent Kft. 1135 Budapest, Országbíró utca 35.

www.frontdent.hu