

# schülke →



## antifact® N liquid

aldehidmentes alkohol bázisú  
gyors fertőtlenítőszer  
orvostechnikai eszközökhöz és  
egyéb letörölhető felületekhez

### Amit nyújt

- aldehidmentes
- felhasználásra kész
- rövid behatási idő
- gyors száradás
- VAH listán szerepel
- európai szabványok szerint tesztelt
- színező- és illatanyag mentes

### Alkalmazási területek

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer orvostechnikai eszközökre minden területen, fertőzés kockázatának fokozottan kitett különféle letörölhető felületekre, valamint olyan felületek fertőtlenítésére, ahol gyors behatási időre van szükség, például:

- beteg melletti területek
- beteg ellátó egységek
- vizsgáló ágyak
- műtőasztalok és melletti munkafelületek
- orvosi eszközök felülete
- élelmiszerfeldolgozó-ipari felületek
- ipari termelő területek felületei

### Használati utasítás

Hígítás nélkül alkalmazza, törölje át a felületet és hagyja hatni. Bizonyosodjon meg arról, hogy a felületet teljesen benedvesítette és nedvesen tartja azt a teljes behatási idő alatt. Maximálisan alkalmazható mennyiség 50 ml/m<sup>2</sup>. Minden látható szennyeződést távolítsa el fertőtlenítést megelőzően és használat után szorosan zárja le a flakont!

Ne használja alkohol érzékeny felületen, pl. akril üvegen! Nem alkalmazható szemkritikus és kritikus orvostechnikai eszközök végső fertőtlenítésére!

### Mikrobiológiai hatásspektrum

| Hatásspektrum                                                                           | Koncentráció        | Behatási idő  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>baktericid</b><br>EN13727, EN16615<br>- szérumszinttel                               | felhasználásra kész | 1 perc        |
| <b>tuberkulocid</b><br>EN14348<br>- szérumszinttel                                      | felhasználásra kész | 1 perc        |
| <b>levurocid</b><br>EN13727, EN16615<br>- szérumszinttel                                | felhasználásra kész | 1 perc        |
| <b>fungicid</b><br>EN13697<br>- szérumszinttel                                          | felhasználásra kész | 2 perc        |
| <b>virucid burkos vírusok ellen</b><br>DVV/RKI irányelv szerint                         | felhasználásra kész | 30 mp.        |
| <b>Norovírus</b><br>EN14476<br>- szérumszinttel                                         | felhasználásra kész | 1 perc        |
| <b>Polyoma SV40</b><br>DVV/RKI irányelv szerint                                         | felhasználásra kész | 10 perc       |
| <b>Rotavírus</b><br>DVV-nek megfelelően                                                 | felhasználásra kész | 30 mp.        |
| <b>Adenovírus (típus 5)</b><br>DVV/RKI irányelv szerint                                 | felhasználásra kész | 5 perc        |
| <b>NNK engedély alapján</b><br>baktericid, fungicid,<br>tuberkulocid, szelektív virucid | felhasználásra kész | <b>5 perc</b> |

### Tanúsítványok

- IHO listán szerepel
- VAH tanúsítvány



CE 0297

## Termék adatok

### Összetétel:

100 g aktív hatóanyag tartalma:

25 g ethanol (94 %), 35 g propan-1-ol

### Kémiai / fizikai adatok

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Szín              | színtelen                         |
| Sűrűség           | 0,890 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C   |
| Lobbanáspont      | 27 °C / Módszer: DIN 51755 Part 1 |
| Megjelenési forma | folyadék                          |
| pH                | kb. 7 / 20 °C / (hígítatlanul)    |

## Speciális ajánlás

**Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!**

A termék nagy mértékben kompatibilis fémekkel és műanyagokkal (kivéve akril üveggel és alkohol-érzékeny lakkokkal) Kérjük, gondosan kövesse a tűz- és robbanás-védelmi előírásokat, amikor alkohol bázisú fertőtlenítőszereket használ.

## Rendelési információ

| Termék                           | Kiszerezés | Kódszám |
|----------------------------------|------------|---------|
| antifect® N liquid 500 ml flakon | 20/karton  |         |
| antifect® N liquid 1 l flakon    | 10/karton  |         |
| antifect® N liquid 5 l           | 1/kanna    |         |
| antifect® N liquid 10 l          | 1/kanna    |         |

## Kiegészítők

| Kiegészítők                                           | Kódszám  |
|-------------------------------------------------------|----------|
| ágyra szerelhető tartó 1 l square bottle (ívelt)      | 134415   |
| ágyra szerelhető tartó 500 ml square bottle (ívelt)   | 134414   |
| ágyra szerelhető tartó square bottle 1 l (egyenes)    | 134413   |
| ágyra szerelhető tartó square bottle 500 ml (egyenes) | 134412   |
| kanna kulcs 5 + 10 l                                  | 135810   |
| sűrített levegős fúvóka                               | 120001   |
| dekanter fölcser                                      | 117901   |
| mérőcsésze 50 ml                                      | 136102   |
| nyitó all-in-one (1l eurobottle/kanna/tartály)        | 70000804 |
| schülke adagoló 5 l / 10 l (20ml / pumpa)             | 117101   |
| schülke csap 5 l / 10 l kannához                      | 135501   |
| szórófej 500 /1000 ml flakonhoz                       | 180124   |
| műanyag fali tartó 1l                                 | 134416   |
| műanyag fali tartó 500ml                              | 134411   |

## Kapcsolódó termékek

- mikrozid® AF liquid
- schülke törölkendők
- terralin® liquid

## Környezetvédelmi információ

Schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

## További információ

Kérjük látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

### Forgalmazza:

#### Allegro Kft

1045 Budapest, Berlini utca 47-49.

[www.allegro.hu](http://www.allegro.hu)

#### Vevőszolgálat:

tel: +36 1 350 2107

e.mail: [info@allegro.hu](mailto:info@allegro.hu)



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

**Air Liquide** A company of the Air Liquide-Group

schülke Headquarters  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

**ALLEGRO**  
1045 Budapest,  
Berlini utca 47-49.  
tel.: +36 1 350 2107  
fax: +36 1 329 1854  
e-mail: [info@allegro.hu](mailto:info@allegro.hu)  
[www.allegro.hu](http://www.allegro.hu)