



dentavon® liquid

Használatra kész, folyékony tisztító- és fertőtlenítőszer, formázott anyagok merülő fertőtlenítésére.

Előnyei:

- Használatra kész oldat
- Kiterjedt antimikrobiális hatásspektrum 5 percen belül
- Kiváló anyagkompatibilitás
- Fogászati lenyomatok gyors fertőtlenítésére

Alkalmazási terület

- Fogászati és fogpótló anyagok, akárcsak a szilikon-, poliéter- és alginátból készült fogászatilag formázott anyagok kombinált tisztítására és fertőtlenítésére. (CE 0297)

Mikrobiológiai hatásspektrum

5 perc behatási idő elteltével a dentavon® liquid hatékony a következőkkel szemben:

- Baktériumok,
- gombák (C. albicans),
- burokkal rendelkező vírusok (beleértve HIV, HBV, HCV)

Koncentrációk és behatási idők

Koncentrációk	Behatási idő
Használatra kész oldat Baktériumok, gombák	hígítatlan oldat 5 perc
Burokkal rendelkező vírusok* (HIV, HBV, HCV)	hígítatlan oldat 5 perc

* 01/2004 Bundesgesundheitsblatt (német egészségügyi közlöny) RKI ajánlása szerint

Alkalmazás módja

Öntse a szükséges mennyiségű oldatot egy megfelelő edénybe. Az alginátból készült anyagot röviden merítsük az oldatba és hagyjuk száradni 5 percig. Más anyagokat 5 percig hagyjuk az oldatban. A dentavon® liquid oldat anélkül fertőtleníti, hogy a fertőtlenítendő anyagok háromdimenziós tulajdonságát vagy felületi minőségét negatívan befolyásolná.

A használatban lévő dentavon® liquid oldatot naponta cserélni kell! Erősebb szennyezettség esetén azonban ajánlott sűrűbben cserélni!

Higiéniai okokból és a fertőzések továbbadásának elkerülése érdekében, a fogászatoknak mindig fertőtleníteniük kell a fogászati lenyomatokat, mielőtt tovább adná a fogtechnikai laborokba.

Ha a fogtechnikai laborok nem biztosak abban, hogy a fogászati lenyomatokat előzetesen már fertőtlenítették, akkor minden esetben biztosítani kellene ezen anyagok fertőtlenítését.

Termékadatok

Összetétel:

100g dentavon® liquid tartalmaz:

- 0,98 g glioxál
- 0,98 g glutáraldehid

Kémiai / fizikai adatok

Oldat	
Megjelenés	világoskék, tiszta folyadék
Illat	friss
Hőmérséklet stabilitás	5°C-tól szobahőmérsékletig
pH érték	kb. 3,4

Hasznos információk

A jelentős lenyomatgyártók javasolják, hogy a gyártói instrukciókat minden esetben tartsák be, a felhasználás során fellépő problémák elkerülése érdekében. Különös odafigyelést igényel a meghatározott keverési-, folyamati-, és kezelési idő. Fontos a megfelelő lenyomat kanál és gipsz használata, továbbá a sikeres lenyomatvételhez a gipsz gyors és buborékmentes öntése a lenyomatokba. Ez jelentősen befolyásolja a lenyomatok és ezáltal a gyártandó fogászati összetevők minőségét.

Áztató kádban dentavon® liquiddel történő lenyomat fertőtlenítésnél különösen figyelni kell az előírt 5 perces behatási idő betartására.

Ne tárolja szobahőmérséklet felett és mindig tartsa zárva a tároló edényzetet!

Figyelmeztetés

Az Európai Unió egészségügyi és munkavédelmi előírásainak megfelelően védőkesztyű használata minden esetben kötelező, bármiféle fertőtlenítőszer használata esetén, ami nem kézfertőtlenítésre szolgál.

Soha ne használja a szert a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után!

Környezeti információk

Schülke & Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) és továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma: DES-150 00003).

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egység	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2l	119411
5 literes kanna	1 x 5l	119412

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
5 literes kannához kifolyócsap	135501
5 literes kannához kannakulcs	135810