

Azonnal használható egykomponensű ideiglenes tömőanyag



1. ábra



2. ábra

Felhasználási javaslat

Ideiglenes tömés fogorvosi alkalmazásra.

Alkalmazás

Közvetlenül a nedves vagy száraz üregbe tömőműszer segítségével kell behelyezni a szükséges mennyiségű Fermin-t (1. ábra). A tömés kb. 15 perc alatt köt meg a nyál hatására, és 1 órán át nem szabad rágyomásnak kitenni.

Az ideiglenes tömés eltávolítása

A Fermin az üregből szondával vagy exkavátorral is eltávolítható (2. ábra).

Ellenjavallatok

Nem alkalmazható közvetlenül a megnyílt fogbélre.

Figyelem

- ◆ A cement használata után pulpairritáció előfordulhat. Ezért mély kavitás esetén a Fermin használata előtt alábélelést kell alkalmazni.
- ◆ Kizárólag szakképzett fogászati felhasználásra.

Tárolás

A tégely szorosan lezárva, maximum 25°C/77°F hőmérsékleten tartandó.

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
Telefon 07243/510-0 · Fax 07243/510-100
www.detax.de · post@detax.de



04/2013